

**Agli utilizzatori dei seguenti prodotti Dräger:
Incubator 8000 (con regolazione della temperatura cutanea o
Thermomonitoring),
Babytherm 8000 OC e RH 600
Apparecchiature contenenti RH 600 (PP 800, PP 8000 e Babytherm 4200))**

2008-06

**Azione di riadattamento del modulo per la temperatura cutanea
Comunicazione del giugno 2000 per apparecchiature allora interessate
163 apparecchiature probabilmente non ancora riadattate in tutto il mondo, si richiede la
vostra collaborazione**

Gentili Signore, egregi Signori,

In una comunicazione del giugno 2000 Dräger Medical informava tutti i clienti interessati circa un potenziale problema nel modulo per la temperatura cutanea delle suddette apparecchiature. In caso di malfunzionamento non è del tutto escluso il surriscaldamento del sensore di temperatura cutanea e una conseguente possibile ustione locale del paziente. Nel frattempo, la quasi totalità degli apparecchi potenzialmente interessati è stata riadattata gratuitamente eliminando il problema.

Fino ad oggi tuttavia non è stato possibile rintracciare 163 degli oltre 10.000 apparecchi (nel mondo) allora interessati e pertanto tali apparecchi non sono stati ancora riadattati. Non è da escludersi che nel frattempo tali apparecchi, a causa della loro vetustà (fino a 20 anni), siano stati messi fuori servizio e/o rottamati.

Per poter garantire che tutti gli apparecchi ancora in uso siano riadattati, chiediamo la vostra collaborazione:

vi chiediamo di controllare se nella vostra dotazione di apparecchiature si trova uno degli apparecchi elencati nell'allegato 1 (con numero di serie corrispondente). Se così fosse, vi preghiamo di rivolgervi al vostro contatto DrägerService (Assistenza Tecnica) per concordare una scadenza per il riadattamento gratuito dell'apparecchio. In questo caso osservate le indicazioni per la sicurezza allegate fino al momento in cui l'apparecchio sarà stato riadattato.

Se doveste assodare che uno degli apparecchi riportati nell'allegato 1 faceva parte della vostra dotazione, ma è già stato messo fuori servizio, cortesemente comunicatelo a: Sig. Ulrich Frase, tel.: +49 (0) 451 882 2085; fax: +49 (0) 451 882 72085; e-mail: ulrich.frase@draeger.com.

Ringraziandovi per la collaborazione vi porgiamo Cordiali saluti

Dräger Medical AG & Co. KG

Frank Clanzett
Safety Officer for Medical Devices