

Dräger DrugTest® 5000 Analyser

Das System Dräger DrugTest® 5000 besteht aus zwei Hauptkomponenten: den DrugTest 5000 Test-Kits und dem DrugTest 5000 Analyser. Es ist ein schnell und genau arbeitendes System zur Überprüfung von Speichelproben z. B. auf Amphetamine, sogenannte Designer-Amphetamine, Opiate, Kokain und dessen Abbauprodukte, Benzodiazepine, Cannabinoide oder Methadone dar.



ST-13284-2007

Mit weniger als 4,5 kg Gewicht ermöglicht dieses opto-elektronische Gerät eine zuverlässige und genaue Untersuchung der im Test-Kit enthaltenen Probe innerhalb nur weniger Minuten. Es beinhaltet ein beleuchtetes, benutzerfreundliches, menügeführtes Display, welches selbst unter kleinen Winkeln gut ablesbar ist. Das vollfarbfähige Display kann jederzeit in einer aus fünf vorinstallierten Sprachen ausgegeben werden, wobei das Auswahlangebot individuell den Kundenwünschen angepasst werden kann. Die Fehlinterpretation von Ergebnissen wird dadurch vermieden, dass jeweils nur ein einziges, und zwar das genaue Ergebnis, ablesbar ist. Der in den Analyser integrierte Datenspeicher gestattet die Speicherung von bis zu 500 einzelnen Messergebnissen.

Der Dräger DrugTest® 5000 Analyser mit seiner einfachen Drei-Tasten-Bedienung kann mit einer Vielzahl von Datenerfassungs- und Datenausgabegeräten wie PC, Drucker oder Barcode-Lesegerät verbunden werden.

Über die Möglichkeit der Datenverwaltung hinaus existiert eine integrierte Selbsttestfunktion, welche die Temperatur, die Optik sowie die allgemeinen Funktionen mit mehreren Sensoren überwacht. Nicht zuletzt durch die Tragetasche und den Transportkoffer eignet sich dieses mobil einsetzbare System als Komplettausrüstung zur Überwachung auf Drogenmissbrauch für Vor-Ort-Sofortmessung durch seine flexible Ausstattung (vgl. Bestellinformation).



ST-13284-2007

Das mobile Dräger DrugTest® 5000 System:
unkompliziert, schnell, zuverlässig und sicher im Test auf Drogen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 V Gleichspannung (11 bis 15 V Gleichspannung)
Stromaufnahme	üblicherweise 3 A
Abmessungen (B x H x T)	200 mm x 250 mm x 220 mm
Gewicht	4,5 kg
Temperatur	Betrieb: +5 bis +40 °C (+41 bis +104 °F) Lagerung/Transport: -20 bis +60 °C (-4 bis +140 °F)
Feuchtigkeitsbereich	relative Feuchte 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Schnittstellen	optische Infrarotschnittstelle (IR für Drucker), PS/2, USB Slave
Dauer einer Messung	5 bis ca. 8,5 Minuten, abhängig von der Art des Tests
Speicher-Kapazität	500 Datensätze

BESTELLINFORMATIONEN

Benennung	Bestell-Nr.
Analyzer Dräger DrugTest® 5000 einschließlich Netzteil, Verbindungskabel und Bedienungsanleitung	83 19 900
Zubehör	
Kompakttastatur(PS/2-Schnittstelle, Abmessungen ca. 28,2 x 13,2 x 2,4 cm):	
„QWERTZ“ – Deutsche Tastenbelegung	83 15 095
„QWERTY“ – Englische Tastenbelegung	83 15 497
„AZERTY“ – Französische Tastenbelegung	83 15 142
Dräger Mobile Printer	83 19 310
Papier für Dräger Mobile Printer (jeweils 5 Rollen)	83 19 002
Tragetasche für Analyzer Dräger DrugTest® 5000	83 19 960
Transportkoffer	83 19 925
Auto-Anschlusskabel 12 V Kabel zur Verbindung zwischen Autostecker-Buchse/Zigarettenanzünder und Analyzer Dräger DrugTest® 5000	83 12 166
USB-Verbindungskabel zur Kommunikation mit einem PC	AG 02 661
Barcode-Lesegerät	AG 02 491
SW-Modul Dräger DrugTest® 5000	83 19 977

Analyzer, Drucker (Mobile Printer), Tastatur und die Test-Kits sind für einen mobilen Gebrauch ausgelegt.

Zum sicheren Transport aller Systemkomponenten sind optional ein Transportkoffer und/oder eine Tragetasche lieferbar. Mittels der Tastatur ist es möglich Probanden- und/oder Bedienerdaten einzugeben, so dass diese Daten mit dem Testergebnis des Dräger DrugTest® 5000 als Vorort Protokoll ausgedruckt werden können.



Tragetasche, das gesamte System beinhaltend



Transportkoffer



Kompakttastatur



Dräger Mobile Printer

NIEDERLASSUNGEN:

VERTRIEB REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

VERTRIEB REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN:

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

SCHWEIZ
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80

HAUPTSITZ:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com