



El seguimiento profesional
de la ictericia

JAUNDICE METER
JM-103

Nuestra experiencia es su comodidad... para usted y sus pacientes



MÁS DE UN SIGLO DE INNOVACIÓN

Dräger Medical ha modelado los cuidados críticos gracias a sus tecnologías innovadoras durante más de 100 años. En la actualidad, seguimos mejorando la tecnología en el entorno de cuidados intensivos neonatales. Desde la termorregulación, la ventilación neonatal y la monitorización neonatal hasta el tratamiento de la ictericia con el medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger y nuestra solución de fototerapia PT-4000, ofrecemos un enfoque holístico a las necesidades de cuidados de su servicio. Este enfoque puede ayudarle a crear las sinergias capaces de optimizar la eficiencia de los procesos y la calidad de los cuidados.

Nuestras soluciones potencian las últimas novedades en las prácticas clínicas. El medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger no sólo apoya las últimas novedades, sino también los cambios en los cuidados.



D-16735-2010



D-16735-2010

MT-3453-2007

MT-7180-2006

POTENCIAMOS SU EXPERIENCIA MÉDICA CON NUESTRA EXPERIENCIA

Como experto en cuidados neonatales, la sensibilidad a las necesidades del paciente adquiere un significado especial para usted; lo mismo se aplica a Dräger. Esto es evidente en el medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger. Incorpora un diseño innovador profesional y refleja el conocimiento de los retos sanitarios. A su vez, esto le ayuda a lograr de forma sencilla y eficaz un seguimiento moderno de la ictericia, tanto si está en un hospital como si se encuentra en una consulta particular. Al mismo tiempo ayuda a los bebés con una edad gestacional de al menos 35 semanas a descansar con más placidez.

FACILITA EL CRIBADO RUTINARIO

La medición de la bilirrubina transcutánea (BTC) ofrece una alternativa delicada e indolora a la medida tradicional de la ictericia. No es necesario extraer sangre, con lo cual se elimina gran parte de la tensión a los bebés delicados y a sus padres, lo que a su vez implica menos tensión para usted. Al mismo tiempo, el medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger le facilita el acceso a la información que quiere de forma instantánea. Piénselo: sin demora, sin la inquietud de esperar los resultados del laboratorio. Cuando se usa con otros síntomas clínicos, es una información fiable para la toma de decisiones profesional.

El seguimiento profesional simplifica el proceso de los cuidados fiables



MENOS PASOS PARA OBTENER INMEDIATAMENTE INFORMACIÓN

Con el medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger, puede confiar en que obtiene la información fiable que necesita cuando la quiere. A diferencia de los tradicionales análisis de sangre, el medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger le ofrece resultados en segundos en lugar de horas. Los resultados al alcance de la mano, de forma que puede acelerar la toma de decisiones y ayudar en la identificación de los bebés que precisan de evaluación y tratamiento adicional en relación con la ictericia.

Al colaborar estrechamente con los profesionales sanitarios, Dräger le ofrece una solución diseñada específicamente para superar de forma eficaz los retos a los que se enfrenta cuando trata la ictericia. Realice esta tarea vital en el menor número de pasos posibles para disponer de más tiempo para atender a los niños. Su diseño ergonómico y compacto hace que su uso sea más sencillo, y la larga duración de la batería le permite trabajar durante más tiempo entre las recargas.

LA FACILIDAD DE USO EMPIEZA POR UNA FORMACIÓN ADECUADA

La comprensión profunda es esencial para usar el medidor de modo eficaz y lograr resultados óptimos constantemente con cualquier dispositivo médico. Como parte de nuestro compromiso constante con la formación eficaz, Dräger le ofrece una serie de herramientas de Education & Training diseñadas para que los profesionales sanitarios optimicen la utilidad y el funcionamiento seguro de los sistemas. Un extenso vídeo educativo y su correspondiente manual de formación le instruyen de forma clara y precisa para que se convierta rápidamente en un experto en el uso rutinario del medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger. Estos recursos le permiten impartir la formación cuando más le conviene, al tiempo que refuerza su confianza en el manejo del equipo.



Algunos hospitales o consultas de médicos trazan la lectura de la bilirrubina transcutánea, medida con el medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger, en un gráfico denominado nomograma. Puede ayudar a determinar a qué bebés hay que hacerles un análisis de laboratorio para bilirrubina o precisan de un seguimiento.



Simplificamos las medidas

POTENCIAMOS LA EFICACIA DEL PROCESO


La experiencia real contribuye a la efectividad de su empresa. Gracias a que proporciona mediciones fiables de BTC rápidamente, el medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger agiliza la rutina del seguimiento de la ictericia. Suprime el lento proceso de extracción de sangre, la programación del trabajo de laboratorio y los gastos de procesamiento. También potencia la eficacia del cribado de BTC y mejora las mediciones fiables con muchos menos pasos, lo cual le ahorra tiempo y frustración.

REDUCCIÓN DE LOS GASTOS TOTALES DE SU EMPRESA

La experiencia real también contribuye a mejorar su balance final y la calidad de los cuidados clínicos. Como el medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger incluye una punta reutilizable de la sonda, no precisa de material desechable costoso. Dado el volumen de medidas realizadas en la enfermería, el coste de estos materiales desechables puede superar rápidamente el gasto inicial del dispositivo. Con el medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger obtiene calidad consistente, de forma rentable durante la vida útil del dispositivo.

La consecuencia es que ahorra tiempo y dinero al tiempo que ofrece un estándar de cuidados excepcional. Este es el valor real de la experiencia que obtiene con el medidor Jaundice Meter JM-103 de Dräger.

3 pasos fáciles

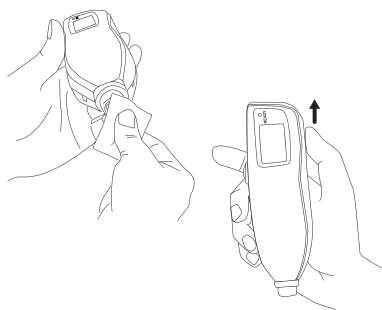

1

Preparación

Limpie la punta de la sonda con una gasa con alcohol. ENCIENDA el dispositivo. Se ilumina la luz de PREPARADO. Aparece el número seleccionado de mediciones.



2


Medición

Ponga la sonda de medición en posición perpendicular con el esternón o la frente del bebé y presione suavemente hasta que escuche un clic. Si va a realizar un promedio, espere hasta que se ilumine la luz de PREPARADO y repita el procedimiento. Cuando se toma la última medición, lea el valor. Si va a realizar un promedio, aparece en la pantalla "AVG" con el resultado.


3

Limpieza y recarga

APAGUE el dispositivo. Limpie la punta de la sonda con una gasa con alcohol y devuelva el dispositivo a la unidad de carga colocándolo con la pantalla orientada hacia usted. O limpie la punta de la sonda y siga realizando mediciones de otros bebés.

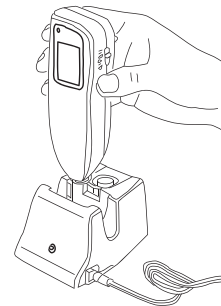

D-16740-2010

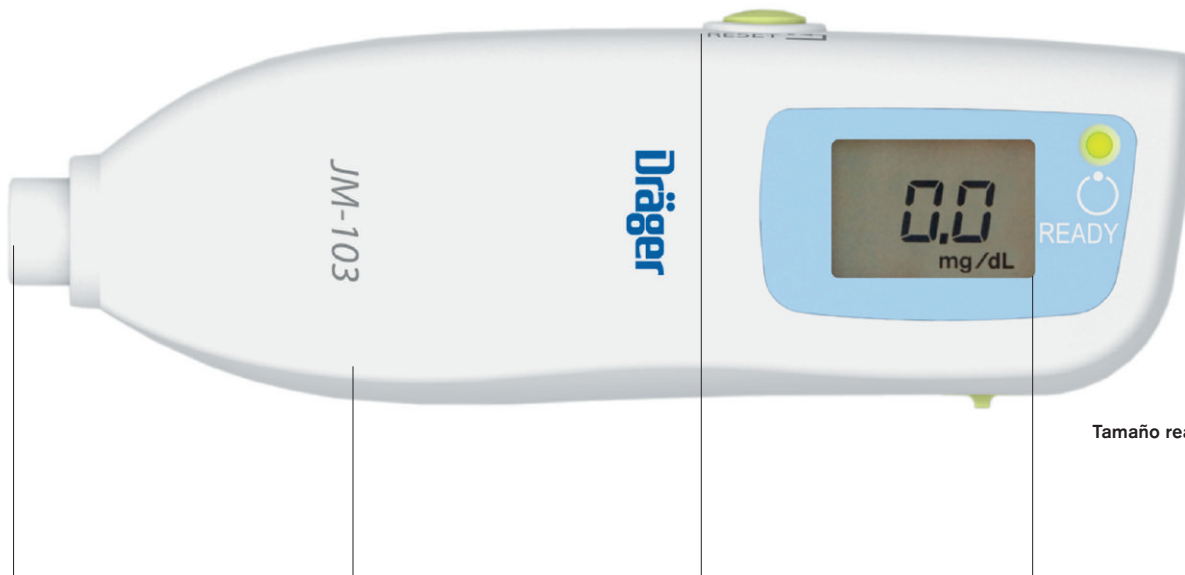

D-16738-2010

Tamaño real

Sonda reutilizable

Sólo tiene que limpiarla con alcohol y volverla a usar cuando sea necesario. No hay puntas desechables que eliminar, registrar o volver a pedir.

Comodidad portátil

El dispositivo compacto se ajusta fácilmente a la mano o el bolsillo y se limpia rápidamente después del uso.

Diseño ergonómico

Los controles garantizan el funcionamiento adecuado al tiempo que impiden la entrada de contaminantes y prolongan la vida útil del dispositivo.

Pantalla fácil de leer

Obtenga los resultados en segundos, no horas. Los números de gran tamaño ayudan a asegurar una interpretación precisa. Los resultados se muestran en mg/dl o $\mu\text{mol/l}$, según la configuración del usuario.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Medical Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36-8300
Fax +54 11 48 36-8311
info-argentina@draeger.com

CHILE

Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
Tel +562 482-1000
Fax +562 482-1001
info.cl@draeger.com

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Calle 93B# 13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881
Fax +57 1 63 58-826

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 40 72
Fax +52 55 52 61 41 32

Fabricante:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemania
El sistema de gestión de calidad
de Dräger Medical GmbH
está certificado según el anexo
II.3 de la directriz 93/42/EEC
(Productos médicos) y según
ISO 9001 e ISO 13485.