

## Vaporizadores Dräger Vapor 2000 y D-Vapor para agentes anestésicos volátiles

Con más de 400.000 unidades vendidas en todo el mundo, los vaporizadores Dräger llevan siendo el estándar de referencia más de 50 años. Con una calidad duradera y consistente, y fabricados por Dräger en Lübeck.



### LA ECONOMÍA UNIDA A LA ERGONOMÍA

Tanto el Vapor 2000 como el D-Vapor se han diseñado para contener 300 ml de líquido anestésico. Esto supone un volumen mayor que el de toda una botella estándar. Incluso pueden añadirse 250 ml si el Vapor no está vacío del todo. Esto significa que se puede rellenar el Vapor de forma sencilla y poner en funcionamiento rápidamente sin tener que preocuparse de dónde almacenar el resto del anestésico.

### ALTA COMPATIBILIDAD

Los vaporizadores Dräger están diseñados para funcionar con prácticamente cualquier estación de trabajo de anestesia Dräger. Están equipados con conectores compatibles con los de Dräger (DW-2000) y Selectatec (S-2000), así como con el conector estándar ISO de 23 mm.

### FABRICADOS PENSANDO EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

El color de cada vaporizador se corresponde con el código de color del agente anestésico para el que fue diseñado. La forma de cada boquilla de llenado evita que el vaporizador se llene con el agente anestésico equivocado. Además, el nuevo

sistema de montaje Dräger AutoExclusion impide de forma eficaz la posibilidad de que se active más de un vaporizador simultáneamente. Tan pronto como uno de los vaporizadores esté abierto, el otro se bloquea automáticamente. En conjunto, estas características redundan en una mejora de la seguridad del paciente y en una menor probabilidad de errores significativos por parte del usuario.

### BATERÍA DE RESERVA

El funcionamiento del D-Vapor difiere ligeramente. Funciona con corriente eléctrica y va provisto de una batería que lo mantiene encendido aunque se produzca un corte de corriente.

### TRANSPORTE SEGURO Y SENCILLO

Cuando se fijan en posición de transporte, se puede inclinar o incluso dar la vuelta al Vapor 2000 o al D-Vapor sin que sufran efectos perjudiciales. El agente anestésico se mantiene de manera segura en el interior del vaporizador. Después de conectar el vaporizador y desbloquear la posición de transporte, quedan listos de inmediato para su uso según las especificaciones.





Dräger Vapor 2000 – isoflurano



Dräger Vapor 2000 – sevoflurano



Dräger D-Vapor - desflurano

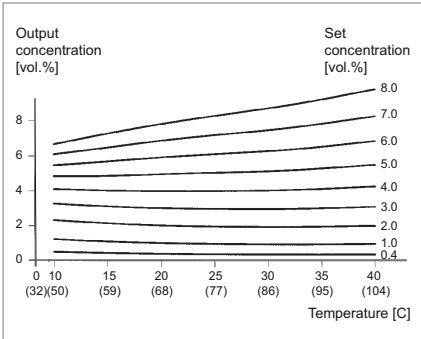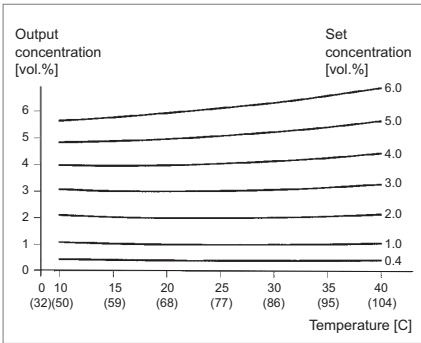

## FUNCIONAMIENTO EN UN

### RANGO MÁS AMPLIO DE TEMPERATURA

El Dräger Vapor 2000 y el D-Vapor se pueden utilizar con seguridad a temperaturas comprendidas entre los 10 y los 40 °C. Esto los hace especialmente adecuados para su uso en salas de operaciones en las que la temperatura juega un papel esencial, como en la cirugía pediátrica, la cirugía cardíaca, las unidades de quemados y la ortopedia.

## MANTENIMIENTO CERO

La serie de vaporizadores Vapor no requiere ningún mantenimiento ni calibración. Esto ahorra tiempo y reduce costes.



## NUEVO PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE ANESTESIA ZEUS IE:

Suministro integrado de agente anestésico totalmente electrónico. Los módulos DIVA para el Zeus IE ofrecen la misma flexibilidad que nuestros vaporizadores estándar.

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Alemania

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### ARGENTINA

Dräger Medical Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este 1717  
B1607BLF San Isidro  
Buenos Aires  
Tel +54 11 48 36-8300  
Fax +54 11 48 36-8311  
[info-argentina@draeger.com](mailto:info-argentina@draeger.com)

### CHILE

Dräger Medical Chile Ltda.  
Alonso de Córdova 5151, Piso 19  
Las Condes  
Santiago  
Tel +562 482-1000  
Fax +562 482-1001  
[info.cl@draeger.com](mailto:info.cl@draeger.com)

### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.  
Calle 93B# 13-44 Piso 4  
Bogotá D.C.  
Tel +57 1 63 58-881  
Fax +57 1 63 58-826

### ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.  
C/ Xaudaró, 5  
28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 358 36 19  
[clientesdraegermedical@draeger.com](mailto:clientesdraegermedical@draeger.com)

### MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.  
German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 40 72  
Fax +52 55 52 61 41 32  
Fabricante:  
Dräger Medical AG & Co. KG

23542 Lübeck, Alemania

El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical AG & Co. KG está certificado según el anexo II.3 de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 e ISO 13485.

Desde septiembre de 2010:  
Dräger Medical AG & Co. KG  
cambia a  
**Dräger Medical GmbH**