

Drägersorb® 800+

La cal sodada es un componente necesario de las máquinas de anestesia con sistema de reinhalación, para absorber el dióxido de carbono (CO₂) contenido en el aire espirado del paciente.



Dräger es el único fabricante de aparatos de anestesia que también produce cal sodada. De esta forma, existe la posibilidad de desarrollar una cal sodada de aplicación óptima y mejorarla en correspondencia con el avance tecnológico de los aparatos.

- Elevada capacidad de absorción de CO₂ gracias a un aprovechamiento homogéneo, su forma de píldora evita la formación de canales, reducción de costes gracias a su larga duración
- La escasa formación de polvo aumenta la seguridad en el trabajo y protege los equipos de anestesia
- Mayor seguridad para el paciente incluso en el caso de un secado involuntario de la cal sodada, los productos de descomposición no deseados son mínimos
- El cómodo embalaje facilita al usuario el manejo de la cal sodada

DRÄGERSORB® 800+ – ALTA RENTABILIDAD

Gracias a su forma de píldora, Drägersorb 800+ evita la formación de canales. La cal sodada absorbe el dióxido de carbono homogéneamente y se aprovecha con eficacia. Gracias a la forma de píldora por una parte y a la elevada porosidad del material por otra, se crea la máxima superficie de intercambio. Por tanto, Drägersorb 800+ puede absorber más CO₂ y permanece durante más tiempo activa que la cal sodada convencional.

DRÄGERSORB® 800+ – CREA UNA BUENA ATMÓSFERA

Drägersorb 800+ es mecánicamente más fuerte gracias a su forma de píldora, y aumenta su resistencia a la abrasión lo que reduce decisivamente su desgaste frente a otras cales sodadas. De esta forma, se protegen los pulmones de los pacientes y del personal de anestesia. Por otra parte, las emisiones de polvo son perjudiciales para los equipos de anestesia de alta gama. También por ello se ha desarrollado Drägersorb 800+, para proteger sus inversiones importantes y para reducir los costes corrientes.



Absorbedor de un solo uso

MT-562-99



Bidón 5 L

MT-2004-2008



Cartucho de un solo uso

D-566-2009

Drägersorb® CLIC
Adaptador

DRÄGERSORB® 800+ – SEGURIDAD ADICIONAL

Drägersorb 800+ reduce claramente la formación de sustancias de descomposición en caso de secado accidental.¹ Debe emplearse con los productos anestésicos de inhalación halogenados usuales. Naturalmente, sólo una cal sodada fresca garantiza una aplicación óptima en los pacientes. Un claro cambio de color de blanco a violeta avisa de cuándo debe cambiarse la cal sodada.

DRÄGERSORB® 800+ – EMBALAJE PRÁCTICO

El cartucho de un solo uso Drägersorb CLIC, que se aplica en los aparatos modernos de anestesia Dräger, ofrece una solución rápida, limpia y simple.

¹ Un instituto independiente (Spectral Service Köln) ha confirmado los resultados de la medición.

Las ventajas de aplicación son:

- De nuevo mayor confort para el personal de anestesia, ya que no se produce contacto con la cal
- Sin contaminación por polvo
- Un mejor aprovechamiento del cartucho y, en consecuencia, reducción de costes gracias a la posibilidad de cambiar en cualquier momento el cartucho incluso durante una intervención quirúrgica

El cartucho de un solo uso Drägersorb CLIC para aparatos de anestesia de Dräger se coloca mediante un adaptador en los soportes del canister existentes.

Asimismo, Drägersorb 800+ se suministra en los conocidos bidones de 5 L.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Denominación	Nº de material
Bidón 5 L	MX00001
Drägersorb CLIC – cartucho 800+ de 1,2 L (6 unidades/caja)	MX00004
Drägersorb CLIC – Adaptador	MX50090

Pedido de otros accesorios CLIC a petición.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Medical Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36-8300
Fax +54 11 48 36-8311
info-argentina@draeger.com

CHILE

Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
Tel +562 482-1000
Fax +562 482-1001
info.cl@draeger.com

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B# 13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881
Fax +57 1 63 58-826

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 40 72
Fax +52 55 52 61 41 32

Fabricante:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemania
El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical GmbH está certificado según el anexo II.3 de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 e ISO 13485.