

Dräger DrugTest® 5000 Testisarja

Dräger Drug-Test® 5000 -testisarjasta ja Dräger DrugTest® 5000 -analysointilaitteesta koostuva järjestelmä tarjoaa nopean ja tarkan menetelmän huumaavien aineiden, kuten amfetamiinien, metamfetamiinien, opiaattien, kokaiinin ja metaboliittien, bentsodiatseptiinien ja kannabinoidien väärinkäytön toteamiseen sylkinäytteestä sekä tarkkaan diagnostiseen arviointiin ja tiedonhallintaan.



Ergonomisesti muotoillut, helppokäyttöiset ja heti käyttövalmiit testisarjat koostuvat innovatiivisesta testikasetista syljenkeräimeen. Testisarjoja on helppo käsitellä oikealla tai vasemmalla kädellä, käsineet kädessä tai ilman käsineitä. Menetelmä on hienovarainen eikä anna mahdollisuutta väärintulkintaan. Tulos, joko negatiivinen tai positiivinen, tulee jokaisen aineen kohdalta selvästi näkyviin. Kestävien huokoisten materiaalien ja kapillaariominaisuuksien ansiosta testi on hygieeninen. Testaaja ei joudu kosketukseen näytteen kanssa.

Testin suorittamiseen on viisi yksinkertaista vaihetta, jotka eivät anna mahdollisuutta virheisiin.

Ensiksi suojatulppa poistetaan syljenkeräimestä ja testikasetti ojennetaan testattavalle. Testattava laittaa keräimen

suuhunsa ja kerää sylkinäytteen liikuttamalla keräintä edestakaisin posken ja ikenen välissä. Kun keräimeen on imeytynyt riittävä määrä nestettä, keräimessä olevan indikaattorin väri muuttuu siniseksi ja testikasetti voidaan antaa takaisin testajalle. Testaaja, joka on koko ajan seurannut näytteenottoa, asettaa näytteen sisältävän testikasetin analysointilaitteeseen ja odottaa tulosta, joka tulee näkyviin muutamien minuuttien kuluttua.

Näyte voidaan identifioida kirjoittamalla nimi ja päivämäärä testikasetin koteloon. Dräger DrugTest® 5000 -järjestelmään on testisarjojen rinnalle saatavissa erityinen näyteputki Dräger DCD 5000, johon testattavalta voidaan ottaa uusi sylkinäyte mahdollista laboratorioissa tapahtuvaa testituloksen verifiointia varten.



Kannettava Dräger DrugTest® 5000 -testisarja:


helppo, nopea, luotettava ja turvallinen huumetestti.

TILAUSTIEDOT

	Tilausnumero
Jokainen Dräger DrugTest® 5000 -testisarja koostuu yhdestä testikasetista ja yhdestä testipanoksesta	
Dräger DrugTest® 5000 -harjoittelutestisarja	83 19 970
Dräger DrugTest® 5000 -testisarja 6 huumausaineen paneeleineen	83 19 830
Dräger DrugTest® 5000 -testisarja 6 huumausaineen paneeleineen (USA versio)	83 19 965
Dräger DrugTest® 5000 -testisarja 2 huumausaineen paneeleineen	83 19 990*
Pakkauskoot 20 täydellistä testisarjaa	
Lisävarusteet	
Dräger DCD 5000 -näyteputki	83 19 910


* kehitteillä (pyydettyäessä)

DRÄGER DRUGTEST® 5000 – TESTIN VIISI YKSINKERTAISTA VAIHETTA:

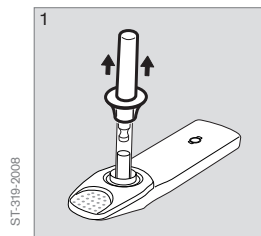


ST-319-2008

Poista keräimen suojus

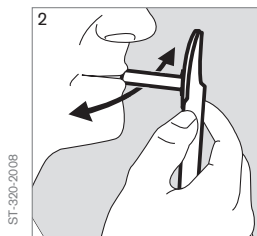


ST-320-2008

Laita keräimen pää suuhun

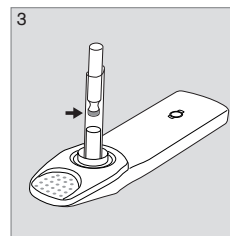


ST-321-2008

Keräimen sisäänrakennettu ilmaisin muuttuu siniseksi

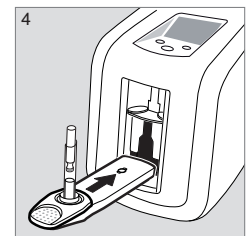

ST-322-2008

Aseta sylkinäytteen sisältämä testikasetti analysaattoriin

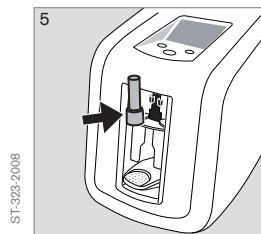

ST-323-2008

Aseta puskurointinesteam-pulli analysaattoriin. Odota testitulosta.

Varastointi ja stabiilisuus

Testisarjat varastoidaan alkuperäispakkauksissaan +4 ... +30 °C lämpötilassa. Älä käytä testisarjaa, jonka pakkaus on rikkoutunut (esim. reikä tai repeämä). Testisarja on käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen. Testisarjan viimeinen käyttöpäivämäärä on painettu pakkaukseen. Testisarjaa ei saa käyttää käyttöajan kuluttua umpeen.

HEADQUARTERS:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

SUBSIDIARIES:

DENMARK

Dräger Safety Danmark A/S
Generatorvej 6 B
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01
www.draeger.dk

NORWAY

Dräger Safety Norge A/S
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Niels Hansensvei 2, 0667 Oslo
Tel +47 41 40 24 00
Fax +47 22 64 31 99
www.draeger.no

SWEDEN

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19 D
43330 Partille
Tel +46 313 40 90 90
Fax +46 313 40 90 99
www.draeger.se

FINLAND

Dräger Suomi Oy
Päiväläisentie 4
00390 Helsinki
Tel +358 207 1196 10
Fax +358 207 1196 11
www.draeger.fi