

## Dräger DrugTest® 5000 取樣器

Dräger DrugTest® 5000毒品分析系統包括兩項主要元件：DrugTest 5000取樣器與DrugTest 5000毒品分析儀。系統能快速、準確地透過採集唾液，進行毒品濫用分析，可偵測毒品包括：amphetamines, designer amphetamines, opiates, cocaine 與 metabolites, benzodiazepines, cannabinoids或 methadone。



人體工學設計，方便手握、隨時可供使用。取樣器主要包括取樣器載台、與唾液取樣管(a test cassette complete with oral fluid collector)。十分容易操作，無論使用左手或右手、戴手套或沒戴手套，都可使用。這樣可避免尷尬、消除任何可能的誤解，並確保唯一顯示結果是準確的。

取樣管由堅硬的多孔材質製成，含毛細管特性。非侵入性的測試，可避免和樣本或取樣器零件接觸，確保採樣過程衛生乾淨。

為減少操作失誤的風險，包括5個憑直覺就會操作的檢測步驟：

首先，從唾液取樣管上取下保護外蓋，並將整個取樣器載台拿給受測者。

受測者將取樣管放入口中，斜向側邊在臉頰與牙齦間採集唾液樣本。

只要採集到足夠的唾液，內置的顯示層會變成藍色，就可將取樣器交還操作人員。

操作人員在旁觀察整個採樣過程，然後將取樣器載台(test cassette)與檢測藥蓋(cartridge)插入分析儀下方的卡槽內，只要幾分鐘等待時間，就能從分析儀上看到分析結果。

取樣器載台上可註明姓名與日期，方便辨識個別樣本。如果需要的話，可搭配Dräger DCD 5000樣品儲存管使用，方便二次取樣、儲存樣本、或運送樣本到實驗室進行分析。

亦可搭配Dräger SSK 5000使用，可快速當場可靠地檢測物質表面是否受到藥物(毒物)的污染。



攜帶式Dräger DrugTest® 5000採樣器  
方便、快速、可靠且安全地偵測毒品

## 訂購資訊


產品描述	訂購編號
每組Dräger DrugTest® 5000取樣器，包括袋裝唾液取樣管 (pouched sample collection)、取樣器載台 (test cassette)，以及檢測藥蓋 (cartridge)	
Dräger DrugTest® 5000訓練用取樣器	83 19 970
Dräger DrugTest® 5000 Test Kit-6 6種毒品取樣器	83 19 830
Dräger DrugTest® 5000 Test Kit-6 (USA version) 6種毒品取樣器 (美國版)	83 19 965
Dräger DrugTest® 5000 Test Kit MTD 6 6種毒品取樣器	83 20 930
Dräger DrugTest® 5000 Test Kit-2 2種毒品取樣器	83 19 990*
每盒有20組取樣器	

### 配件


Dräger DCD 5000 (device for collecting oral fluid samples) 樣本儲存管	83 19 910
Dräger SSK 5000 (surface screening kit) 快速毒性物質檢測器	83 20 490

\* 研發中(可供洽詢)


## Dräger DrugTest® 5000 – 5個憑直覺就會操作的檢測步驟：

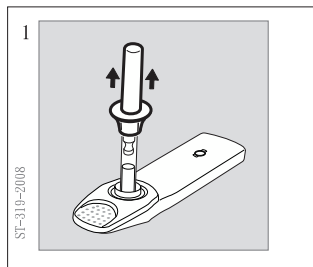


取下保護外蓋

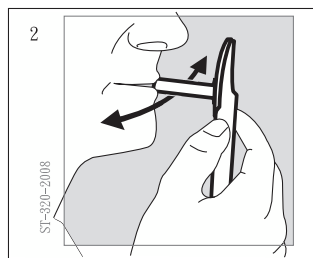


將取樣器放入口中

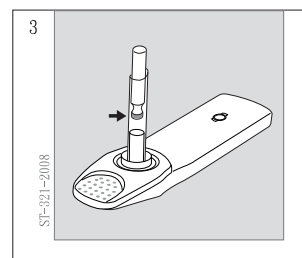

內置的顯示層會變成藍色

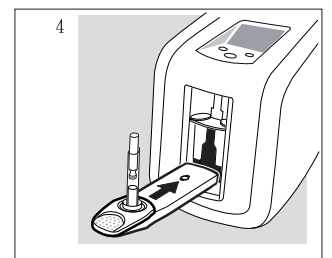

將取樣器載台與檢測藥蓋一起插入分析儀下方卡槽中

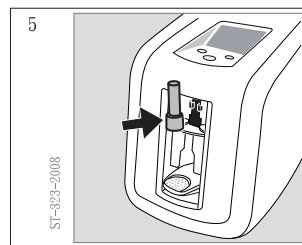

分析儀上顯示分析結果

### 存放與安定性

取樣管必須存放在4~30°C (39~86°F)的環境下，存放於原始的鋁箔袋中。如果鋁箔袋受污染或有破損(例如有破洞或被撕開)，請勿再使用此取樣器。一開啟後請立即使用，且過有效期限後不可再使用，有效期限印製於鋁箔袋上。

### 德國總公司

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstrasse 1, 23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

### 子公司

台灣德爾格安全防護設備股份有限公司

235 北縣中和市中正路868-5號12樓

台北業務單位 Tel: 02 2223 6388 Fax: 02 2223 2258

新竹維修中心 Tel: 03 577 5871 Fax: 03 563 0539