

## Drug Check™ 毒品检测试纸

做为诊断和法院调查的一部分，德尔格DrugCheck™毒品检测器可以在一件唾液样品中同时定性检测多达六种违禁物质。这种简洁而又直接的检测适用于任何人在任何时间任何地点进行检测。



### 简单可靠

收集、检测和保存三步走程序是德尔格DrugCheck™毒品检测的显著特征。检测套装包括一个取样器，检测管和检测带。友好的测试过程不会令测试者感到不必要的困窘，保证对取样过程的精确控制，这表明任何篡改测试的尝试都是绝对不可能的，从而建立用户和被测试者之间的信任基础。

### 卫生重中之重

取样器都是独立包装，方便卫生。将唾液样本挤压进检测管，液体会自动流入位置，保证检测卫生，无液滴渗漏。

### 高灵敏度

十分钟内，就可以利用检测带在违禁品（可卡因，鸦片，安非他明，脱氧麻黄碱，苯环己哌啶和大麻）演变为代谢产物前准确检测。对大麻、麻药和麻药油的重要组成部分—D9四氢大麻醇（D9 THC）的检测反应具有很高灵敏度。

### 更多优点

犹如具有很高灵敏度一样，检测提供给使用者其它诸多优点。德尔格DrugCheck™的检测原理就是能够在现场直接进行分析，尽管也可以将唾液样品保存在检测管中，然后送到实验室进行分析。



### 订购信息

Draeger DrugCheck™ (25盒)


8319550

### 技术数据

德尔格DrugCheck™浓度极限值（分离点值）


	毒品	ng/ml
COC	可卡因	20
OPI	鸦片剂	40
AMP	安非他明	50
MET	脱氧麻黄碱	50
PCP	苯环己哌啶	10
THC	△9四氢大麻醇	50

1

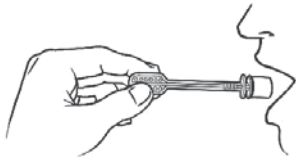


取样

2

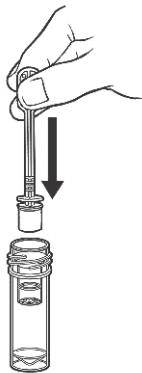


将取样器插入提取装置

3

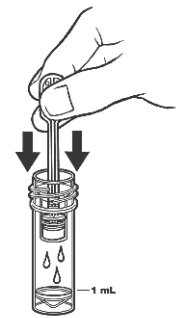


挤出唾液样本

4

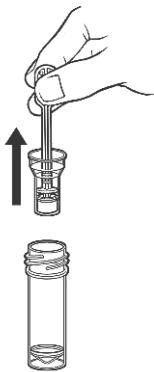


取出取样器和提取装置

5

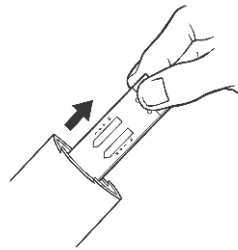


从包装里取出检测带

6

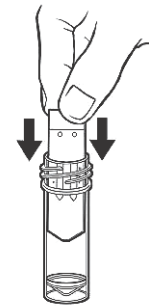


将检测带插入试管中

如A1—A3所示

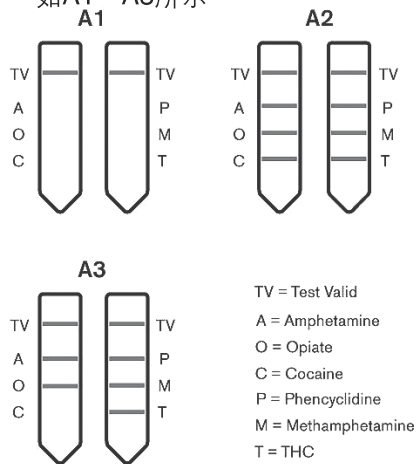

7

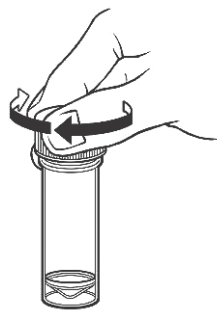

保存样本留待他用

A1检测到所有毒品  
 A2未检测到毒品  
 A3检测到可卡因