

Apollo/Primus 呼吸システム 分解 / 組立て



分解

1

スクレュードライバー（六角ドライバー）でベンチレーターの3つのネジを緩めます。

90°



スクレュードライバー（六角ドライバー）でベンチレーターの3つのネジを締めます。

9

2

ハンドルを持って、呼吸システムを持ち上げ、取り外します。



ハンドルを持って呼吸システムマウントに呼吸システムを載せます。

8

3

ハンドルを持って、呼吸システムを持ち上げ、取り外します。



スクレュードライバー（六角ドライバー）でベンチレーターの3つのネジを締めます。

7

4

クリックCO2アブソーバーを外し、クリックアダプターを外します。（オプション）



CLIC CO2アブソーバーを挿入し、クリックアダプターを締めて取付けます。

6

5

クリーニング用ディスクをクリックアダプターに挿入します。クリックアダプターをカチッと音がかさるまで閉めます。



クリーニング用ディスクをアダプターから外します。クリックアダプターをカチッと音がかさるまで閉めます。

5

6

吸気ポート、呼気ポートを緩めて、取り外します。



吸気ポート、呼気ポートを取付け、締めます。

4

7

吸気側、呼気側の両方のフローセンサーを取外します。



吸気側・呼気側両方のフローセンサーを挿入します。

3

8

呼吸システムの5つのネジを緩め、カバーを取外します。

90°



スクレュードライバーで呼吸システムのカバーを付けてください。

2

9

呼吸システムの金属バルブプレートを持ち上げて外します。



呼吸システムの金属バルブプレートハウジング基盤に取り付けます。

1

組立て

再処理方法

この説明書は取扱説明書にかわるものではありません。機器をご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読み下さい。

134° C (273° F) オートクレーブ滅菌



注意： SpiroLife®センサーはプラズマ、放射線滅菌には適していません。

機械洗浄および消毒



注意： すべての内部のスペースと表面が完全に水が流れて洗浄できるように、位置をはなしてください。

消毒浸漬による



注意： Dräger フローセンサーの取扱説明書に記載された消毒剤をご使用ください。