


## Ghid de pornire rapidă – HI-Flow Star pentru adulți

### 1a Conectare la un blender

1. Conectați furtunul de O<sub>2</sub> (A) al kitului de blender la blender (B) și la camera de apă (C).
2. Conectați furtunul de inspir încălzit la a doua deschidere a camerei de apă.
3. Atașați adaptoarele de încălzire a cablului și senzorii de temperatură pe sistemul format din umidificator și furtun.

Dacă blenderul este utilizat cu un adaptor de 22 mm (disponibil separat), furtunul albastru scurt de inspir este utilizat în locul furtunului de O<sub>2</sub>.


Furtunul albastru scurt de inspir nu este utilizat pentru conectarea la un blender.

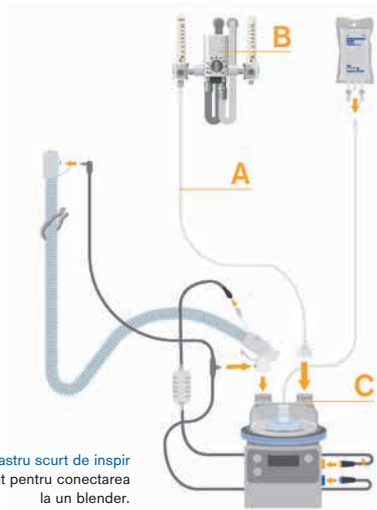

### 1b Conectarea la un ventilator


1. Conectați furtunul albastru scurt de inspir (A) la portul de inspir al ventilatorului (B) și la camera de apă (C).
2. Conectați furtunul de inspir încălzit la a doua deschidere a camerei de apă.
3. Conectați adaptoarele de încălzire ale cablului și senzorii de temperatură pe sistemul format din umidificator și furtun.

Kitul de blender nu este utilizat pentru conectarea la un ventilator.

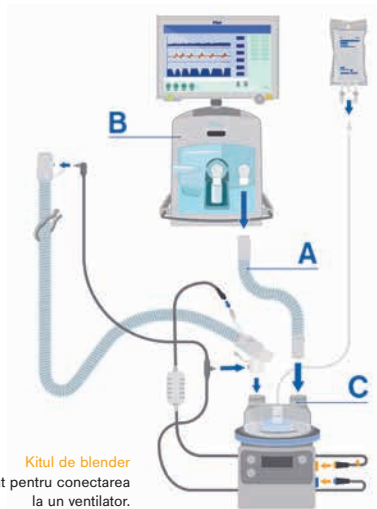

2

1. Folosiți calibrul pentru a stabili dimensiunea canulei nazale necesare. Calibrul indică dimensiunile canulelor nazale disponibile.
2. Canulele nazale ar trebui să închidă nările doar până la maximum 50%.
3. Conectați canula nazală la furtunul de inspir.
4. Porniți dispozitivul conform instrucțiunilor de utilizare și setați parametri. Verificați că iese un flux de ventilație din canula nazală.

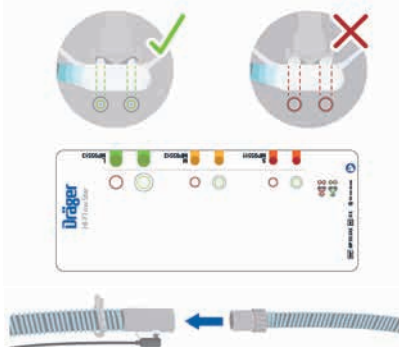

3

1. Pentru cea mai bună potrivire posibilă, atașați clema pentru pat la îmbrăcămintea pacientului sau la așternutul patului.



4

1. Furtunul canulei nazale poate fi poziționat la stânga sau la dreapta pacientului.
2. Rotiți canula nazală în așa fel încât furtunul canulei nazale să fie orientat în direcția dispozitivului.
3. Așezați cu atenție canula nazală în nasul pacientului și poziționați echipamentul de pus pe cap.
4. Dimensiunea echipamentului de pus pe cap poate fi schimbată prin ajustarea elementelor de închidere cu arici.

