


Stručná příručka – HI-Flow Star pro dospělé

1a Připojení ke směšovači

1. Připojte hadici O₂ (A) soupravy směšovače ke směšovači (B) a vodní komoře (C).
2. Připojte vyhřívanou inspirační hadici ke druhému otvoru vodní komory.
3. Připojte adaptéry vyhřívacího kabelu a teplotní senzory ke zvlhčovači a hadicovému systému.

Pokud se směšovač používá s 22mm adaptérem (dostupný samostatně), používá se namísto hadice O₂ krátká modrá inspirační hadice.


Krátká modrá inspirační hadice se nepoužívá k připojení ke směšovači.

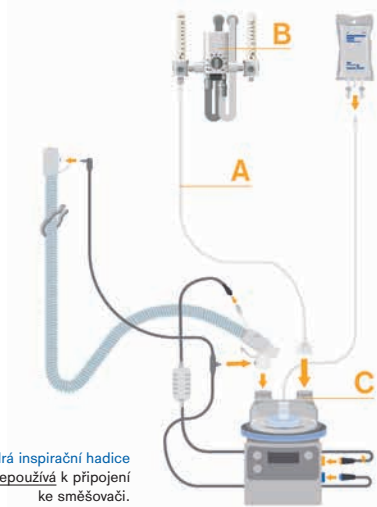

1b Připojení k ventilátoru


1. Připojte krátkou modrou inspirační hadici (A) k inspiračnímu portu ventilátoru (B) a vodní komoře (C).
2. Připojte vyhřívanou inspirační hadici ke druhému otvoru vodní komory.
3. Připojte adaptéry vyhřívacího kabelu a teplotní senzory ke zvlhčovači a hadicovému systému.

Souprava směšovače se nepoužívá v případě připojení k ventilátoru.

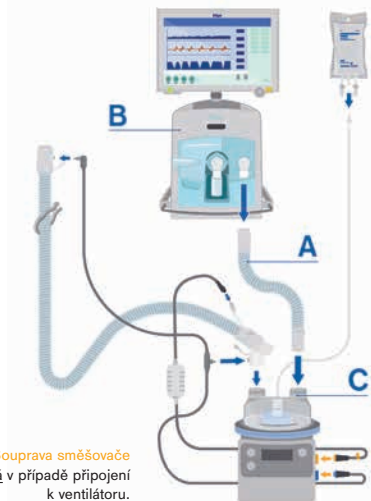

2

1. Použijte kalibr k určení velikosti nosních koncovek. Kalibr ukazuje dostupné velikosti nosních koncovek.
2. Nosní koncovky by měly uzavřít nosní dírkou maximálně na 50 %.
3. Připojte nosní kanylu k inspirační hadici.
4. Spusťte přístroj dle návodu k použití a nastavte parametry. Zkontrolujte, zda z nosních koncovek proudí vzduch.

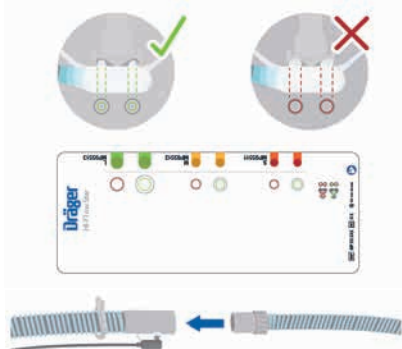

3

1. Pro nejlepší možné nasazení upevněte sponu na lůžko k oděvu pacienta či ložnímu prádlu lůžka.



4

1. Hadice nosní kanyly může být vedena z levé nebo pravé strany pacienta.
2. Otočte nosní kanylu tak, aby hadice z nosní kanyly vedla ve směru přístroje.
3. Opatrně umístěte nosní koncovky do nosu pacienta a nasadte náhlavní soupravu.
4. Velikost náhlavní soupravy lze změnit seřízením upevňovacích prvků na suchý zip.

