

ドレーゲル機器外装表面除菌洗浄

外装表面除菌洗浄には、洗浄と除菌が一度に行えながらも金属やプラスチックへの影響が少ないルビスタ/RUBYSTA®のご使用を推奨します。



OR



全身麻酔装置

本体外装、気化器、ディスプレイ

各種ツマミ、ボタン、コネクター

麻酔バックアーム

各種金属部品

ICU-Ward



汎用人工呼吸器

本体外装、ディスプレイ

各種ツマミ、ボタン、コネクター

キャビネット

各種金属部品

NICU



定置型保育器

本体外装、ディスプレイ

各種ツマミ、ボタン、コネクター

クリアカバー

各種金属部品

ER



可搬型人工呼吸器

本体外装、ディスプレイ部分

各種ツマミ、ボタン、コネクター

フック、持ち手

各種金属部品



ご使用方法



- ・ルビスタ1包(5g)に対して水道水500mL(500g)で溶かし、1%(w/v)の調製剤を作成してください。なお溶けにくい場合は、ぬるま湯をご使用ください。
- ・調製剤は、調製後約7日間ご使用頂けます。
- ・調製液は、直射日光を避け、常温にて保管してください。
- ・環境清拭用ルビスタワイプに調製剤を浸してご使用下さい。

* ルビスタ Product informationより抜粋
* ルビスタ/RUBYSTA®は杏林製薬の登録商標です。

【ルビスタ/RUBYSTA®に関するお問合せ窓口】
 杏林製薬株式会社 0120-093610
 受付時間 9:00~17:00(月~金 ※土日祝日除く)

ドレーゲルジャパン株式会社 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル4F
 カスタマーサービス TEL: 03-6447-7222

* 本冊子は、取扱説明書に代わるものではありません。取扱説明書を常に参照してください。取扱説明書、病院のガイドラインおよびポリシーは常に確実に順守してください。