

Retraitement du Caleo de Dräger



! Veuillez suivre les directives de retraitement en vigueur dans votre hôpital. Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation de l'appareil pour obtenir les instructions complètes concernant le démontage, le montage, le nettoyage et la désinfection des surfaces.

Exigence : il ne doit pas y avoir de patient dans l'appareil.

Désinfection des surfaces avec nettoyage pour :

- Appareil de base/Chariot
- Toutes les pièces démontées
- Capot et parois latérales (intérieur et extérieur)
- Rainures du tiroir cassette radio : tirez un chiffon imbibé de désinfectant à travers chaque rainure.

Nettoyage en machine et désinfection thermique :

- Passants
- Turbine
- Réservoir d'eau (en option)

Avant toute utilisation, assurez-vous que toutes les surfaces sont sèches et exemptes de résidus de désinfectant.

Démontage ►

1 Placez l'incubateur dans la position la plus basse.



18 Réglez l'incubateur à la hauteur désirée.

2 Fermez et retirez le kit de connexion.



17 Raccordez et ouvrez le kit de connexion.

3 Retirez la poche d'eau stérile ou le réservoir d'eau (en option).



16 Raccordez le réservoir d'eau ou la poche d'eau stérile.

4 Retirez la double paroi supérieure et le joint d'étanchéité continu.



15 Installez le joint d'étanchéité continu et la double paroi supérieure.

5 Retirez le capot.



14 Remettez le capot en place.

6 Mode Nettoyage



13

◀ Montage

! Utilisez uniquement des produits désinfectants autorisés dans votre pays et adaptés à la procédure de retraitement en question. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Démontage ▶

7 Ouvrez les parois latérales.



12 Fermez les parois latérales.

8 Retirez les passants.



11 Insérez les passants.

9 Ouvrez les hublots d'accès à la tête et aux pieds.



10 Fermez les hublots d'accès à la tête et aux pieds.

10 Retirez le matelas.



9 Insérez le matelas.

11 Retirez la plaque du matelas.



8 Insérez la plaque du matelas.

12 Retirez le bras du support tuyau (en option).



7 Insérez le bras du support tuyau (en option).

13 Déverrouillez et retirez le tiroir cassette radio.



6 Insérez et verrouillez le tiroir cassette radio.

14 Retirez le plateau.



5 Insérez le plateau.

15 Retirez la turbine et la pièce de raccordement.



4 Insérez la turbine et la pièce de raccordement.

16 Retirez le tiroir.



3 Insérez le tiroir.

17 Nettoyez et désinfectez l'appareil de base dans sa totalité.



2

18 Retirez la molette de réglage de l'écran et nettoyez et désinfectez l'écran.



1 Insérez la molette de réglage de l'écran.

◀ Montage