



VERKORTE INSTRUCTIE DRUGCHECK® 3000




Lees vooraf de originele gebruiksaanwijzing* van de geleverde DrugCheck® 3000 (NL, 5-panel of 6-panel).
De testafnemer dient bij voorkeur wegwerphandschoenen te dragen.

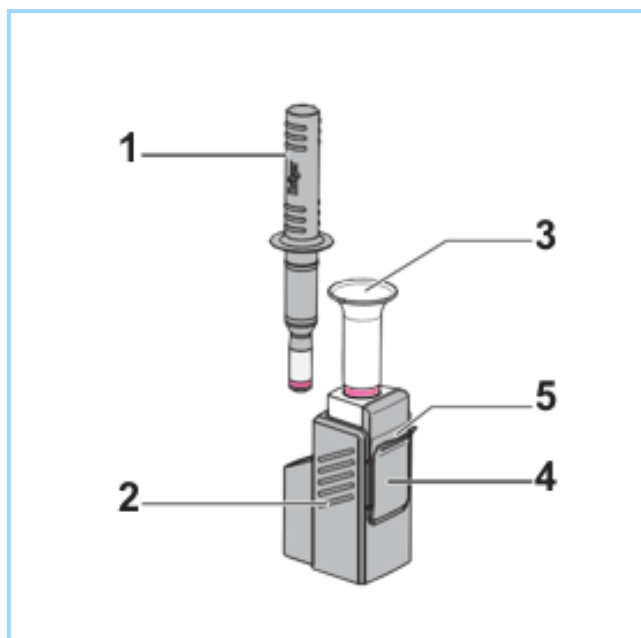


1. monsterafnemer met kleurindicator
2. testcassette met indicatorring
3. trechtervormige testopening
4. vergrendelklepje
5. zichtvenster met teststrip

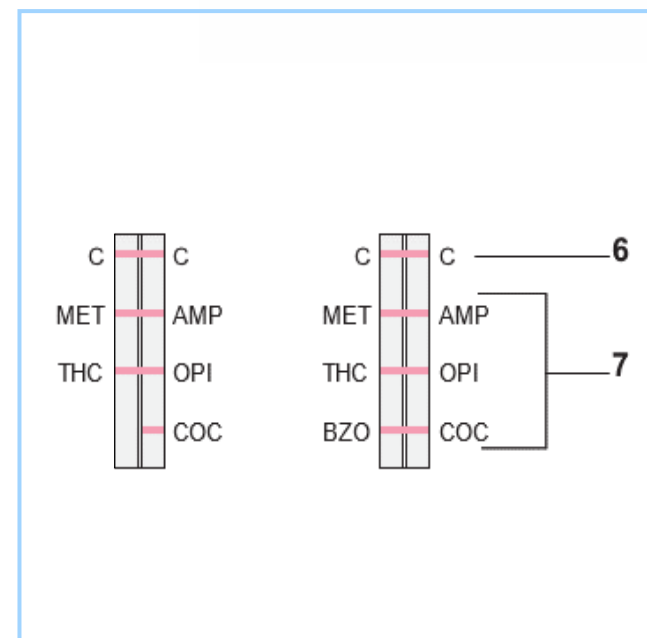


6. bereik controlelijnen (C)
7. bereik testlijnen
(5-panel = MET, AMP, THC, OPI, COC)
(6-panel = MET, AMP, THC, OPI, BZO, COC)

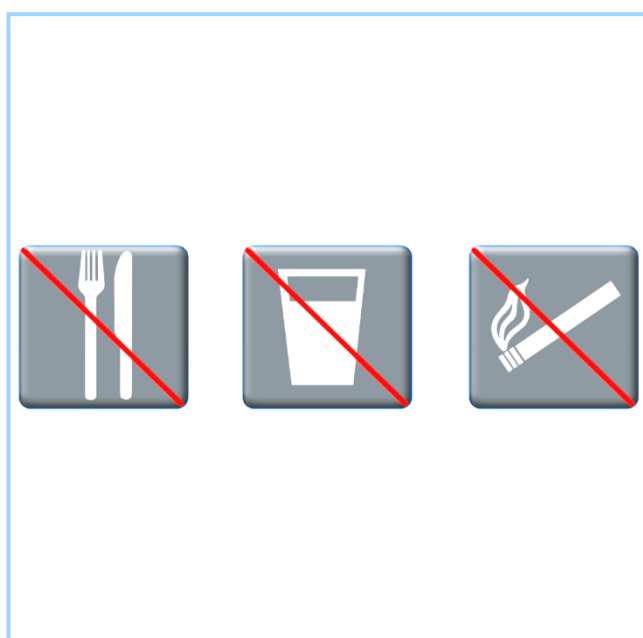


De testpersoon mag minimaal 10 minuten voorafgaand aan de test niet roken, eten of drinken.
Informeert de testpersoon vooraf over het verloop van de test.

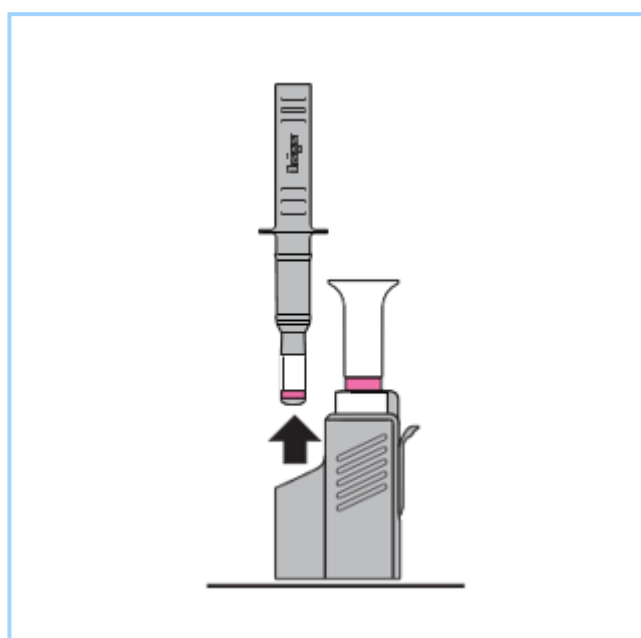


De monsterafnemer uit de testcassette halen en aan de testpersoon overhandigen.

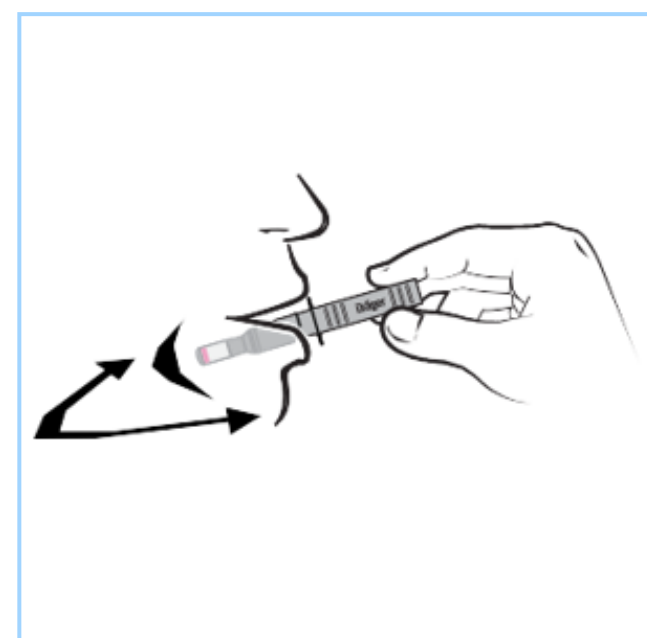


Instrueer de testpersoon om de monsterafnemer in de wangzak te nemen en van één kant van de mond rustig naar de andere kant heen en weer te bewegen.
Dit duurt ca. 15 seconden.

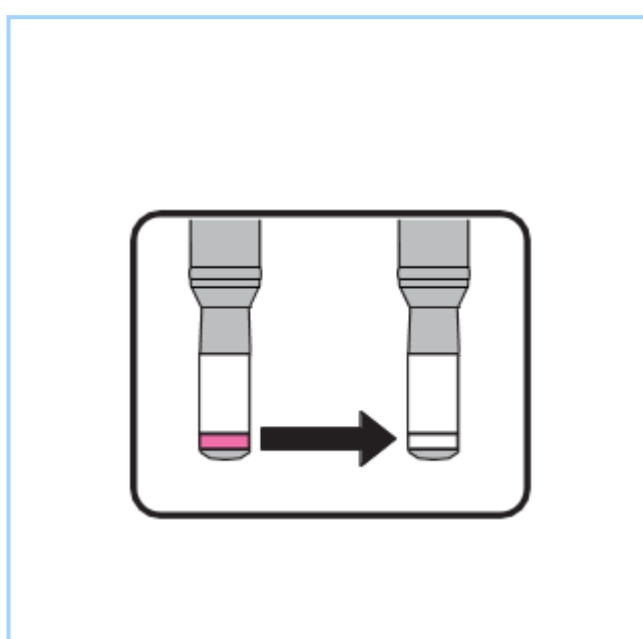

Als de rode kleurindicator op het mondstuk verkleurt, kan de speekselafname worden beëindigd.
De testpersoon mag niet op de monsterafnemer zuigen of kauwen!

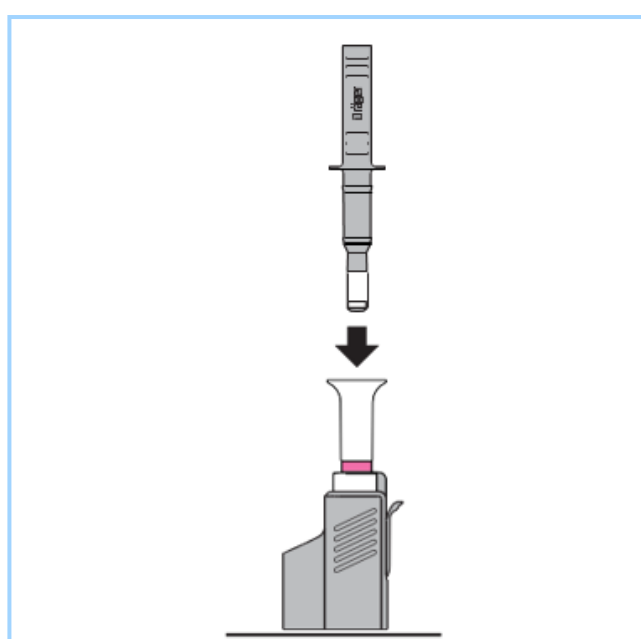


De monsterafnemer in de trechtervormige testopening van de testcassette steken en volledig tot aan de aanslag naar beneden duwen om de ampul te breken.

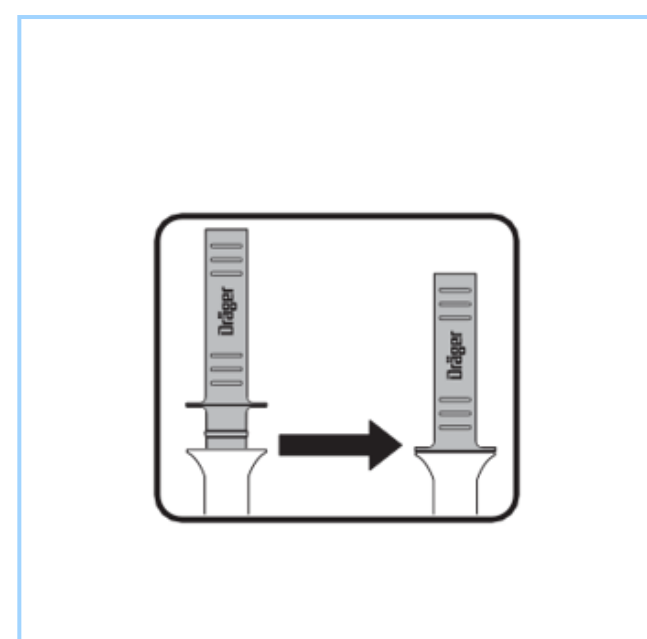


Er mag zich geen tussenruimte bevinden tussen de monsterafnemer en de testcassette.

*Let op: deze instructiekaart is geen vervanging van de originele gebruiksaanwijzing!


vervolg verkorte instructie DrugCheck® 3000

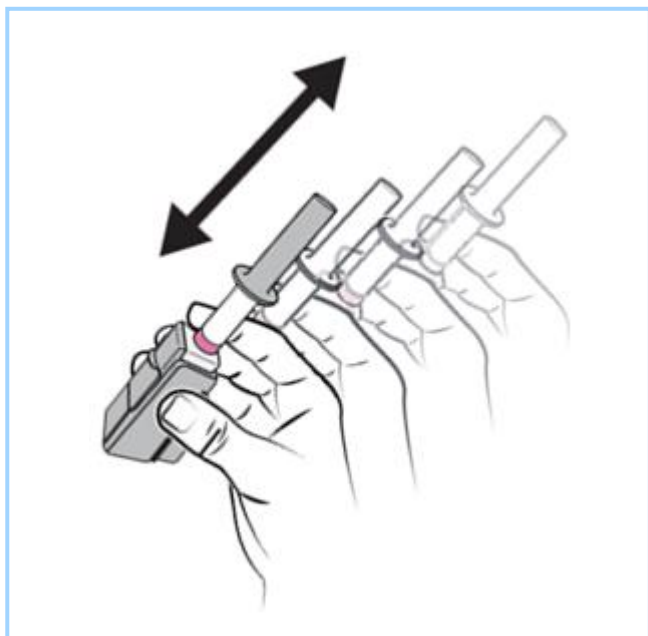


De testcassette minimaal 15 tot maximaal 30 seconden* stevig schudden totdat de rode indicatorring vervaagd of verdwenen is.

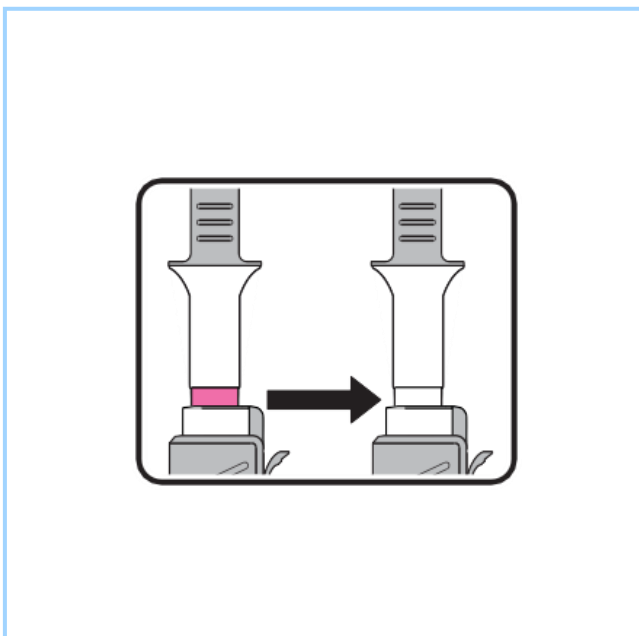


Indien er na 30 seconden nog geringe kleurresten in de indicatorring aanwezig zijn, zullen deze de beoordeling niet beperken.

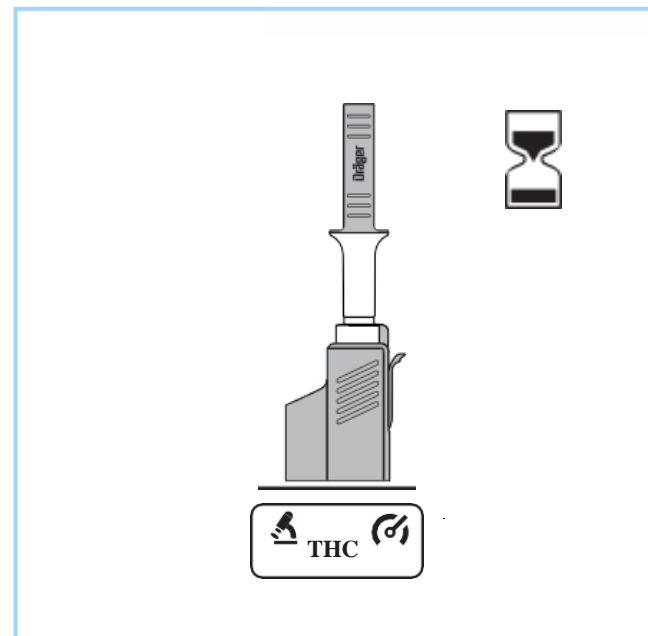


Plaats de testcassette rechtopstaand op een vlakke ondergrond (of rechtop vasthouden). Wacht 10 of 60 seconden*, afhankelijk van de gewenste cut-off waarde van cannabis (raadpleeg de gebruiksaanwijzing).

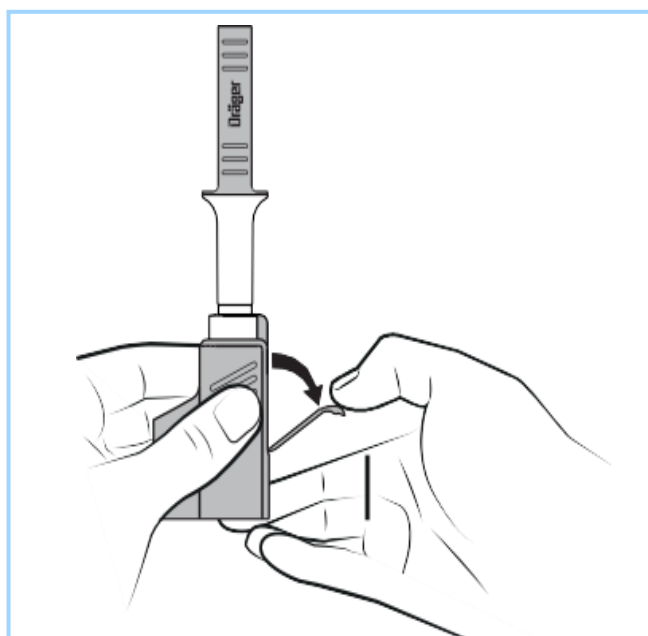


Na verloop van de wachttijd het vergrendelklepje van de testcassette afbreken en verwijderen.

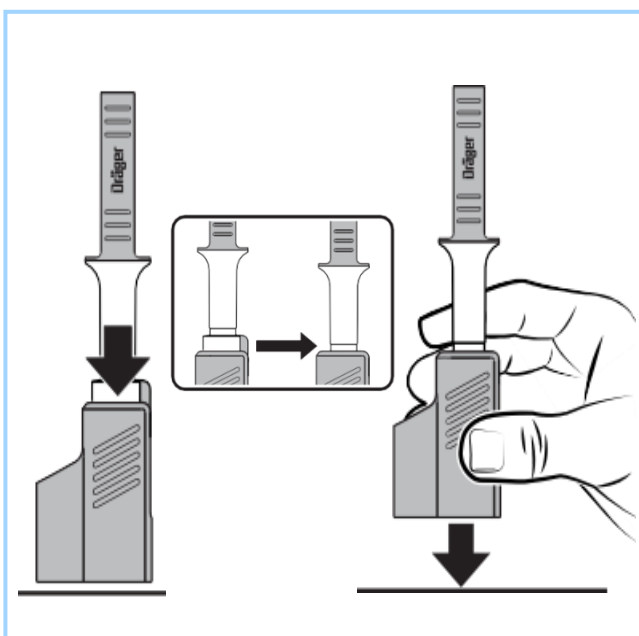

De testcassette met de monsterafnehmer rechtop krachtig tot aanslag naar onderen drukken en licht met de onderkant op een vlakke ondergrond kloppen. Het speekselmonster loopt nu naar boven voor analyse.

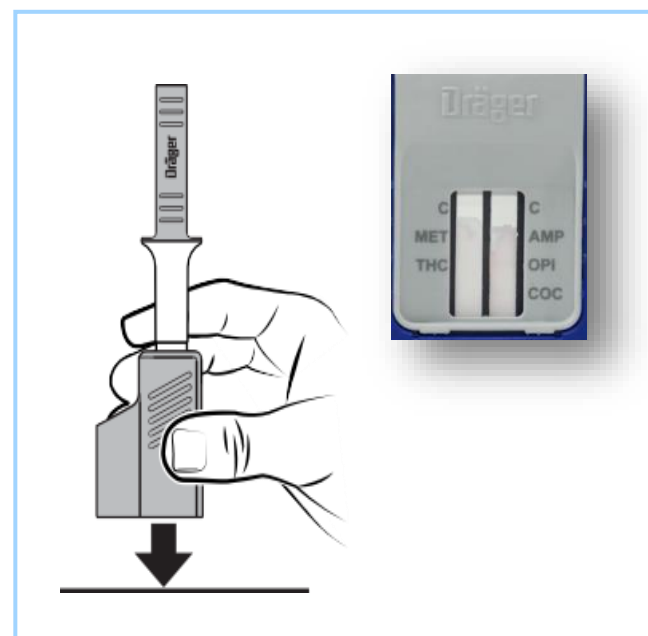


Als het speekselmonster niet binnen een minuut langs de teststrip loopt, de testcassette met de onderkant nog een keer op een vlakke ondergrond kloppen. Let constant op de lijnvorming op de teststrip.

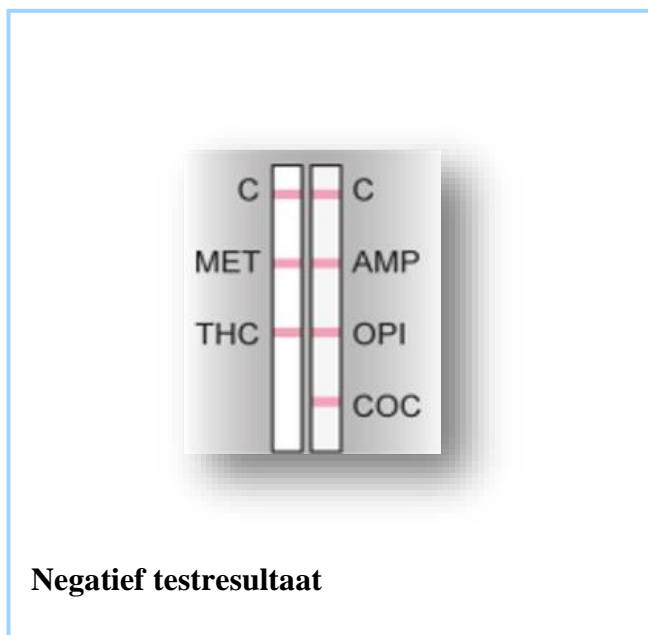


Negatief testresultaat

Zodra naast de controlelijnen ook drugslijnen verschijnen, kunnen de "negatieve" resultaten voor de betreffende drug worden afgelezen. Dat betekent dat er geen drugs boven de cut-off waarden in het monster aanwezig zijn.

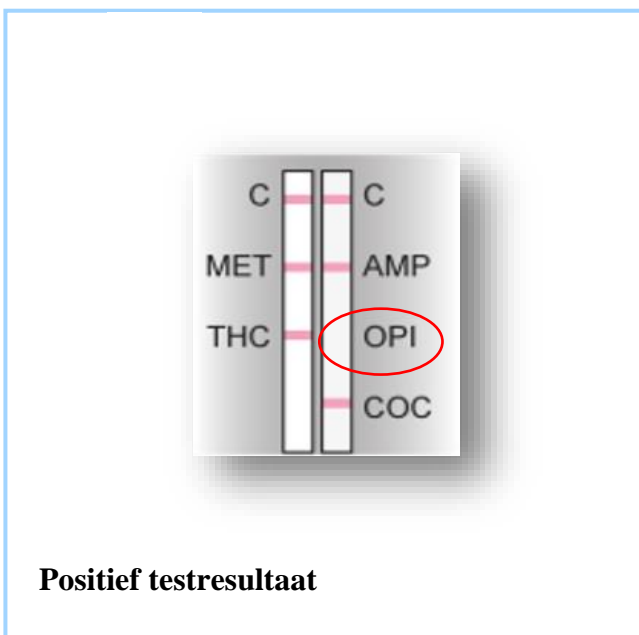

Positief testresultaat

Als er een controlelijn (C) aanwezig is en minimaal 5 minuten* na het starten van de analyse geen rode lijn in het bereik van de drug zichtbaar is, is het testresultaat voor deze drug positief, dus het monster bevat drugs.

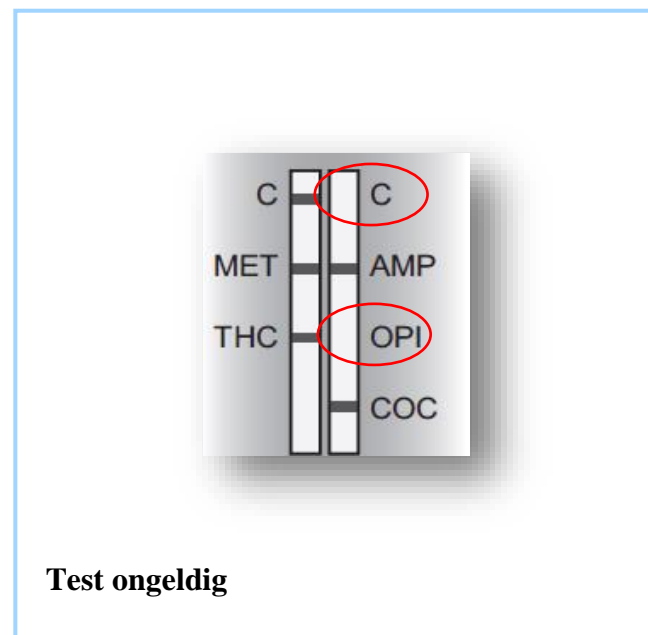

Test ongeldig

De testresultaten moeten binnen 10 minuten* na het starten van de analyse worden geëvalueerd. Als er na 10 minuten* geen controlelijnen op één of beide teststrippen verschijnen is de test ongeldig.

*Let op: dit zijn waarden voor de 6-panel testcassette; voor de NL-5 panel raadpleeg de originele gebruiksaanwijzing!