

DID YOU KNOW?




QuickSet

What is it?

クイックセットを用いることで、パラメーターの変更後、確定操作なしで新しいパラメーターに変更できます。パラメーターをリアルタイムで調節し、人工呼吸器の画面でモニタリングすることが可能になります。

使用方法

1. パラメーターを選択します
2. ボタンが黄色になります
3. ロータリーノブを 1.5 秒間押し続けます
4. ボタンが黄緑色になります
5. 押したままノブを回転させます
6. 設定がすぐに適用されます

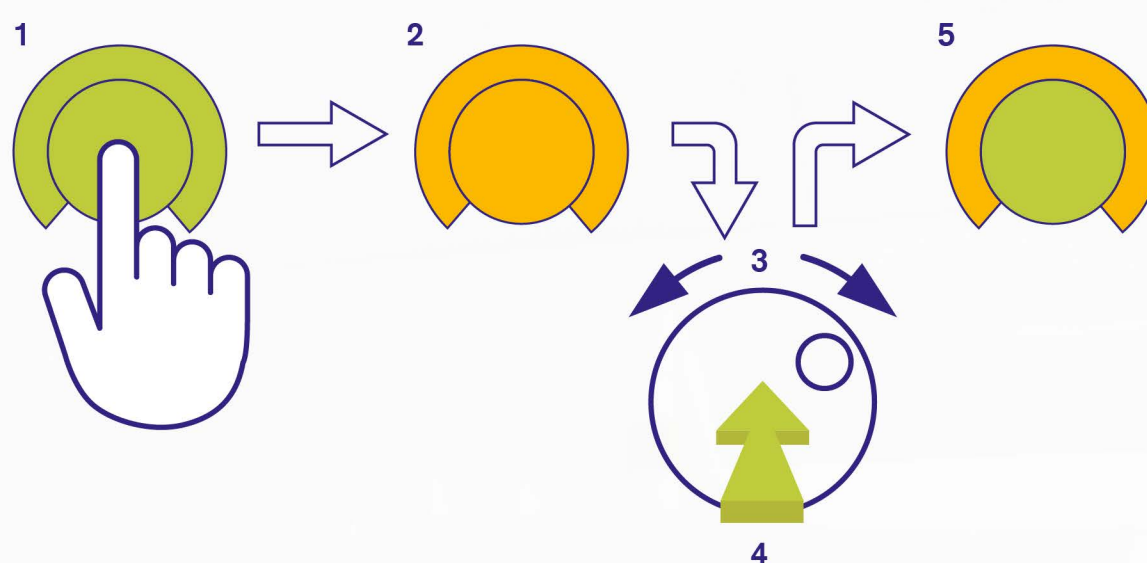

どうしてこれが重要なのか

リクルーメント手技においては、パラメーターの変更や確認に時間を費やすことなく、リアルタイムでパラメーターの継続的な調節を行うことが重要だからです。

どうしてアウトカム改善に役立つのか

PEEP と吸気圧を一定レベルに維持するため、クイックセットはリクルーメント手技実施に役立ちます¹

