



DID YOU KNOW?

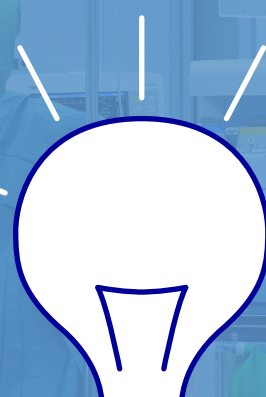

THE INSPIRATORY AND EXPIRATORY TRIGGER

What is it?

吸気トリガーは、設定したフロートリガー値に達した自発呼吸をカウントします。この設定は自発呼吸がある状態での強制換気中の呼吸回数の測定、また、プレッシャーサポートを伴う換気モードのトリガーとして使用できます。

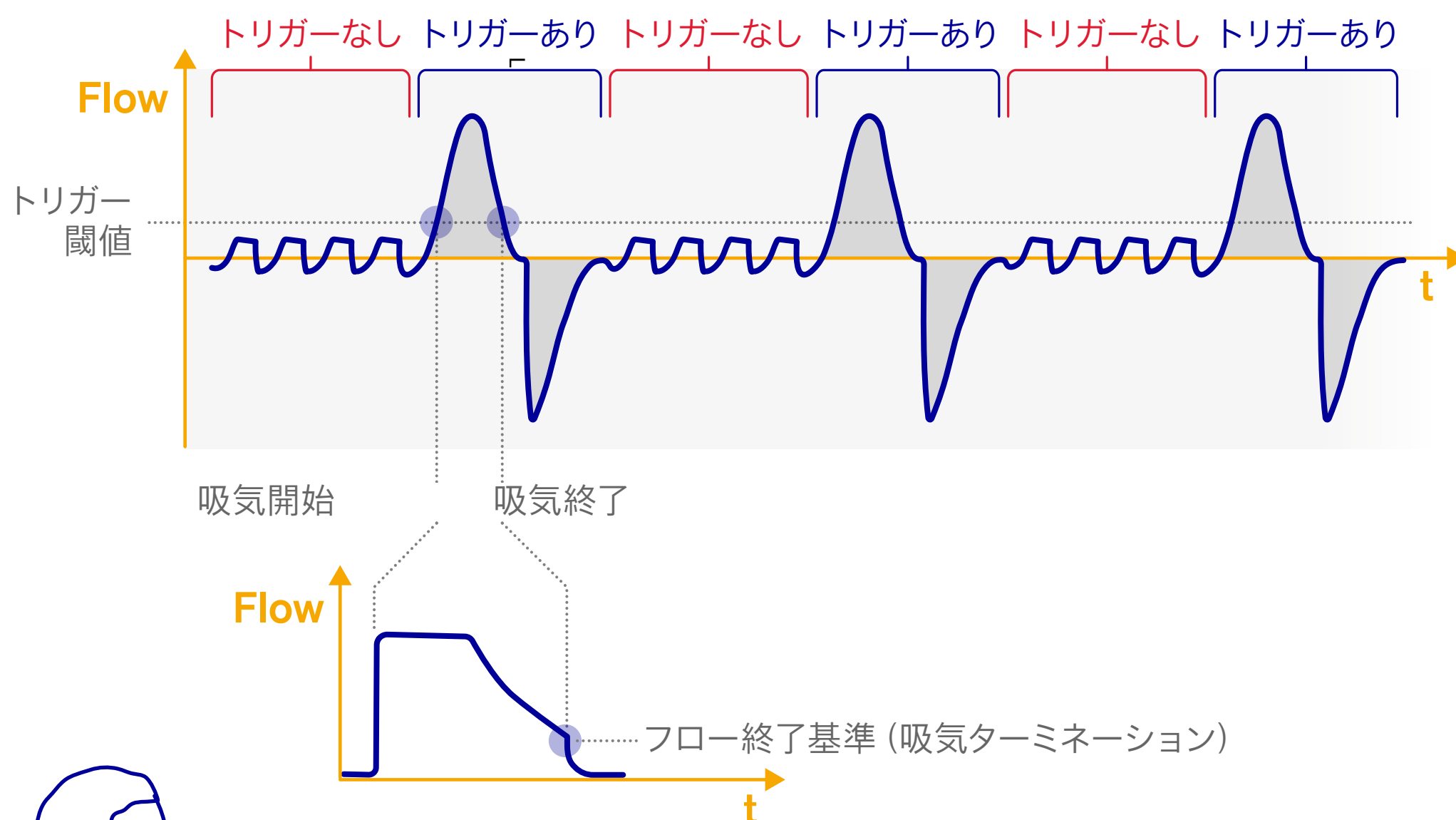

呼気トリガーは、吸気フロー終了基準をもとに**吸気の長さと呼気の開始**を決定します。この基準は、吸気が終了し呼気が開始するタイミングを、吸気ピークフローの%として示されます。

どのようにアウトカム改善に役立ちますか？

- 人工呼吸器装着中の非同調を予防します
- 患者の肺の状態と呼吸パターンに合わせて呼吸サポートを適応させます