

## Компактная дыхательная система линейки аппаратов Dräger Fabius Порядок разборки и сборки



### Разборка

- 1** Отсоедините все шланги, кабели и абсорбер, снимите дыхательную систему.



Подсоедините дыхательную систему, подключите все шланги, кабели и абсорбер.

- 2** Отвинтите CLIC адаптер (опционально) на контейнере абсорбера. Визуально проверьте герметичность CLIC адаптера.



Проверьте наличие всех фиксаторов. Прикрутите CLIC адаптер (опционально) на контейнере абсорбера.

- 3** Вставьте чистящий диск в адаптер. Закройте адаптер до щелчка.



Извлеките чистящий диск из адаптера. Закройте адаптер до щелчка.

- 4** Отсоедините порт выдыха и датчик потока. Снимите ограничитель с датчика потока.



Присоедините ограничитель на датчике потока. Подключите датчик потока, подключите и плотно зафиксируйте порт выдыха.

- 5** Снимите клапаны вдоха и выдыха.



Установите клапаны вдоха и выдыха.

- 6** Снимите клапан APL.



Установите клапан APL.

- 7** Снимите затвор с линии забора смеси для анализа газового состава (опционально).



Установите затвор на линии забора смеси для анализа газового состава (опционально).

- 8** Снимите порт отработанного газа.



Установите порт отработанного газа.

- 9** Снимите корпус аппарата ИВЛ. Снимите диафрагму.



Вставьте диафрагму, установите корпус аппарата ИВЛ.

### Сборка

## Компактная дыхательная система линейки аппаратов Dräger Fabius Инструкции по повторной обработке



	Ручная очистка и дезинфекция	Автоматическая очистка и дезинфекция	Стерилизация
	✗	✓	✓
	✓	✗	✗
	✓	✗	✓
	✗	✓	✗

Расположите элементы таким образом, чтобы обеспечить хорошее промывание внутренних пространств и поверхностей и свободный отток воды.

### Визуальный осмотр



Данные рекомендации не отменяют инструкции по применению и не являются ее заменой.

После автоматической очистки и дезинфекции требуется стерилизация горячим паром (сухожаровая) для высушивания дыхательной системы. **Клапаны, корпус дыхательного аппарата и рукав AGS:** Убедитесь, что чистящие и ополаскивающие жидкости проникают через раскрытый клапан. Слейте воду, скопившуюся в диафрагме аппарата. Дополнительные указания и пояснения приведены в соответствующих инструкциях по применению.