

Dräger Primus Familie* Atemsystem Demontage / Montage



Demontage

1 Die 3 Schrauben des Ventilators mit dem Schraubendreher (Innensechskant) lösen.



Die 3 Schrauben des Ventilators mit dem Schraubendreher (Innensechskant) anziehen.

2 Atemsystem am Griff nach oben herausziehen.



Atemsystem am Griff auf Atemsystemaufnahme aufsetzen.

3 Obere Ventilator-Rollmembran entnehmen.



Ventilator-Rollmembran einlegen, so dass die Dräger-Inschrift von oben lesbar ist.

4 CLIC CO₂-Absorber abnehmen. CLIC Adapter abschrauben (optional).



CLIC Adapter anschrauben (optional). CLIC CO₂-Absorber einsetzen.

5 Reinigungsplatte in den Adapter einführen. Adapter schließen, so dass dieser einrastet.



Reinigungsplatte aus dem Adapter entfernen. Adapter schließen, so dass dieser einrastet.

6 Inspirations- und Expirationstülle lösen und abziehen.



Inspirations- und Expirationstülle aufsetzen und festdrehen.

7 Beide Flow Sensoren entfernen.



Beide Flow Sensoren einsetzen.

8 Die 5 Schrauben des Atemsystems mit dem Schraubendreher lösen, Deckel abnehmen.



Deckel aufsetzen, die 5 Schrauben des Atemsystems mit dem Schraubendreher anziehen.

9 Mittelteil des Atemsystems nach oben abnehmen.



Mittelteil des Atemsystems auf Gehäuse-Unterteil aufsetzen.

* Primus Infinity Empowered, Primus, Pallas, Apollo


Montage

Dräger Primus Familie* Atemsystem Aufbereitungsanweisungen



	Manuelle Reinigung und Desinfektion	Maschinelle Reinigung und Desinfektion	Sterilisation
	✗	✓	✓
	✓	✗	✗
	✓	✗	✓

Sichtprüfung

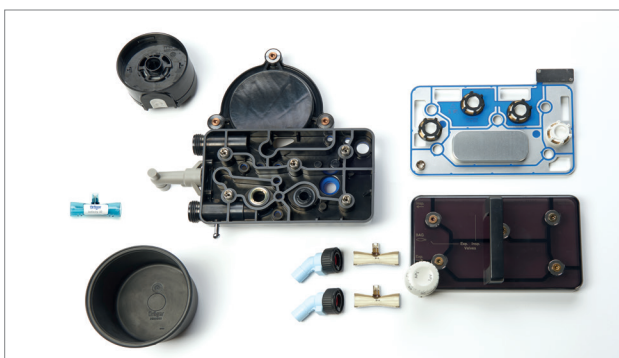

Tauchdesinfektion

Bitte die in den Gebrauchsanweisungen für Dräger-Flow Sensoren aufgelisteten Desinfektionsmittel verwenden.

Maschinelle Reinigung und Desinfektion

Teile so positionieren, dass alle Innenräume und Oberflächen vollständig gespült werden und das Wasser frei ablaufen kann.

Sterilisation

SpiroLife® Flow Sensoren eignen sich nicht für Plasma-oder Strahlensterilisation

Diese Anleitung stellt keinen Ersatz für die Gebrauchsanweisung dar.