

Дыхательные системы линейки* аппаратов Primus® Порядок разборки и сборки



Разборка

1 Отвинтите три винта на аппарате ИВЛ шестигранным ключом.



Закрутите три винта на аппарате ИВЛ шестигранным ключом.

2 Потяните дыхательную систему за ручку вверх и наружу.



С помощью ручки вставьте дыхательную систему в крепежное приспособление.

3 Снимите верхнюю диафрагму аппарата.



Вставьте диафрагму аппарата таким образом, чтобы сверху было видно надпись Dräger.

4 Снимите абсорбер CO₂ CLIC. Открутите CLIC адаптер (опционально).



Зафиксируйте винтами CLIC адаптер (опционально). Установите абсорбер CO₂ CLIC.

5 Вставьте чистящий диск в адаптер. Закройте адаптер до щелчка.



Извлеките чистящий диск из адаптера. Закройте адаптер до щелчка.

6 Отвинтите форсунки вдоха и выдоха и вытяните их.



Установите форсунки вдоха и выдоха и плотно закрутите.

7 Снимите оба датчика потока.



Вставьте оба датчика потока.

8 Отверткой отвинтите пять винтов на дыхательном аппарате и снимите крышку.



Установите крышку на дыхательный аппарат и отверткой закрутите пять винтов.

9 Поднимите среднюю часть дыхательного аппарата.



Установите среднюю часть дыхательного аппарата на дно корпуса.

* Primus Infinity Empowered, Primus, Pallas, Apollo

Сборка


Дыхательные системы линейки* аппаратов Primus®

Инструкции по повторной обработке



	Ручная очистка и дезинфекция	Автоматическая очистка и дезинфекция	Стерилизация
	✗	✓	✓
	✓	✗	✗
	✓	✗	✓

Визуальный осмотр

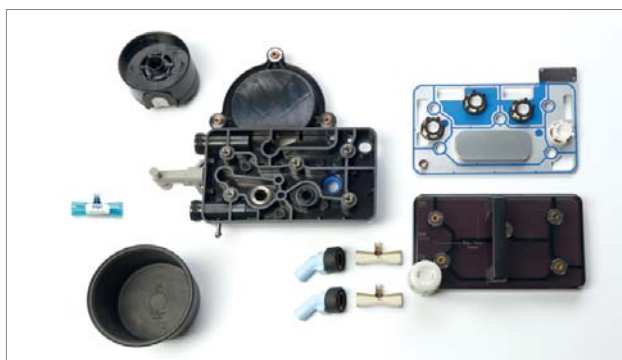

Иммерсионная дезинфекция:

Используйте только дезинфицирующие препараты, перечисленные в инструкции по эксплуатации датчиков потока Dräger.

Автоматическая очистка и дезинфекция:

Расположите элементы таким образом, чтобы обеспечить хорошее промывание внутренних пространств и поверхностей и свободный отток воды.

Стерилизация:

Стерилизация датчиков потока SpiroLife® плазмой или облучением запрещена.

Данные рекомендации не отменяют инструкции по применению и не являются ее заменой.