

Дыхательная система Dräger Zeus®

Порядок разборки и сборки



Разборка

1 Отвинтите CLIC адаптер (опционально).



Завинтите CLIC адаптер (опционально).

2 Вставьте чистящий диск в адаптер. Закройте адаптер до щелчка.



Извлеките чистящий диск из адаптера. Закройте адаптер до щелчка.

3 Отвинтите и извлеките порт выдоха.



Проверьте решетки клапана выдоха*. Вставьте и зафиксируйте порт выдоха.

4 Отвинтите и извлеките порт вдоха.




Проверьте решетки клапана вдоха. Вставьте и зафиксируйте порт вдоха.

5 Снимите датчики потока.



Вставьте датчики потока.

6 Ключом поверните винты примерно на 120° против часовой стрелки.

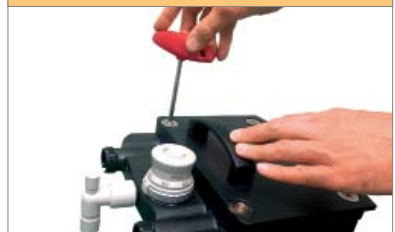

Ключом поверните винты примерно на 120° по часовой стрелке.

7 Снимите верхнюю часть дыхательной системы.



Установите верхнюю часть дыхательной системы на нижнюю.

8 Отвинтите клапан APL.



Завинтите клапан APL.

* Если решетка повреждена, обратитесь в DrägerService®

Сборка

Дыхательная система

Dräger Zeus®

Инструкции по повторной обработке



	Ручная очистка и дезинфекция	Автоматическая очистка и дезинфекция	Стерилизация
	✗	✓	✓
	✓	✗	✓

Расположите элементы таким образом, чтобы обеспечить хорошее промывание внутренних пространств и поверхностей и свободный отток воды.

Визуальный осмотр



Ручная очистка и дезинфекция:

Обязательно используйте дезинфицирующие средства, указанные в Инструкциях по эксплуатации датчиков потока Dräger.

Автоматическая очистка и дезинфекция:

Рекомендации: Расположите элементы таким образом, чтобы обеспечить хорошее промывание внутренних пространств и поверхностей и свободный отток воды.

Стерилизация:

Стерилизация датчиков потока SpiroLife® плазмой или облучением запрещена.

Данные рекомендации не отменяют инструкции по применению и не являются ее заменой.