

Système patient Dräger Perseus® A500 Démontage/montage



Démontage

1 Dévisser l'adaptateur CLIC.

D-41771-2012

9 Visser l'adaptateur CLIC.

2 Insérer le disque de nettoyage dans l'adaptateur. Fermer l'adaptateur jusqu'à enclenchement.

D-41778-2012

8 Retirer le disque de nettoyage de l'adaptateur. Fermer l'adaptateur jusqu'à enclenchement.

3 Dévisser et retirer le raccord expiratoire.

D-41784-2012

7 Pousser dans le port expiratoire et serrer avec l'écrou moleté.

4 Dévisser et retirer le raccord inspiratoire.

D-41925-2012

6 Pousser dans le port inspiratoire et serrer avec l'écrou moleté.

5 Retirer les capteurs de débit.

D-41921-2012

5 Insérer les capteurs de débit.

6 Tourner les trois loquets de 120° env. dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

41917-2012

4 Tourner les trois loquets de 120° env. dans le sens des aiguilles d'une montre.

7 Soulever la partie supérieure du système patient.

D-41916-2012

3 Placer la partie supérieure du système patient sur la partie inférieure.

8 Dévisser la valve APL.

D-41914-2012

2 Aligner correctement la valve APL et serrer avec l'écrou moleté.

9 Retirer les valves (rouge et bleue).

D-41908-2012

1 Aligner les valves correctement. Insérer les valves.

Montage

Information pour le bon usage du dispositif médical :
Merci de prendre impérativement connaissance
des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.
Date de réalisation : août 2015

Destination : Professionnels de Santé
Classe du dispositif médical : IIb
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Nom du fabricant : Drägerwerk AG & Co. KGaA

Instructions de retraitement

Désinfection par immersion	Nettoyage et désinfection en machine	Stérilisation à 134 °C (273,2 °F)	Contrôle visuel
<p>D-41882-2012</p> <p>D-41883-2012</p>	<p>D-41834-2012</p> <p>D-40321-2015</p> <p>D-40322-2015</p> <p>Positionner les composants de sorte que tous les espaces intérieurs ainsi que les surfaces soient entièrement immergés et que l'eau puisse s'évacuer correctement.</p>	<p>D-48343-2012</p> <p>D-41882-2012</p>	<p>D-41799-2012</p> <p>D-41848-2012</p> <p>Les pièces suivantes ne doivent pas présenter de dépôts :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grilles de débit incident - Valves anti-retour (rouge et bleue) <p>Si nécessaire, retirer les dépôts sur les plaques des valves anti-retour à l'aide d'un chiffon doux. Si les grilles de débit incident sont endommagées, contacter DrägerService®.</p>