


# BEKNOPTE HANDLEIDING – HI-FLOW STAR VOOR VOLWASSENEN

1a

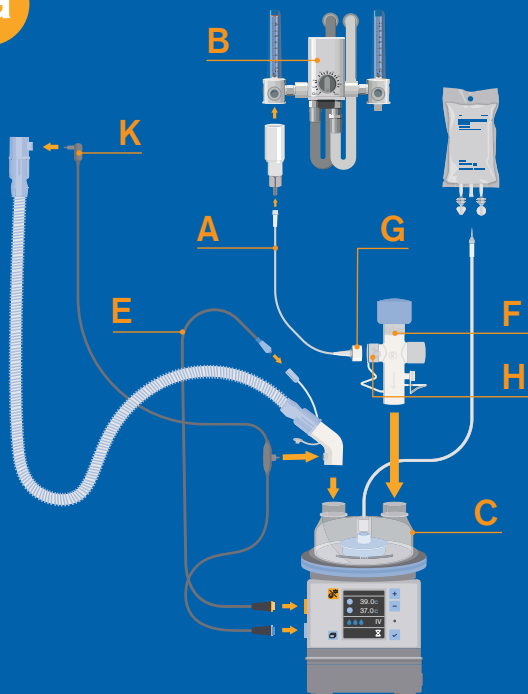

! Als de blender wordt gebruikt met een adapter van 22 mm (apart verkrijgbaar), dan wordt de korte blauwe inspiratoire slang gebruikt in plaats van de O<sub>2</sub>-slang.




! De korte blauwe inspiratoire slang (D) wordt niet gebruikt voor aansluiting op een blender.

## Aansluiten op een blender

1. Sluit de O<sub>2</sub>-slang (A) van de blender-set aan op de blender (B). Sluit de ventielset (F) aan op de bevochtigingskamer (C). Sluit de adapter van de O<sub>2</sub>-slang (G) aan op de zij-opening (H) van de ventielset (F).
2. Sluit de verwarmde inspiratoire slang (J) aan op de tweede opening van de bevochtigingskamer.
3. Bevestig de adapters van de verwarmingskabel (E) en de temperatuursensoren (K) aan de bevochtiger en aan het slangensysteem.

1b

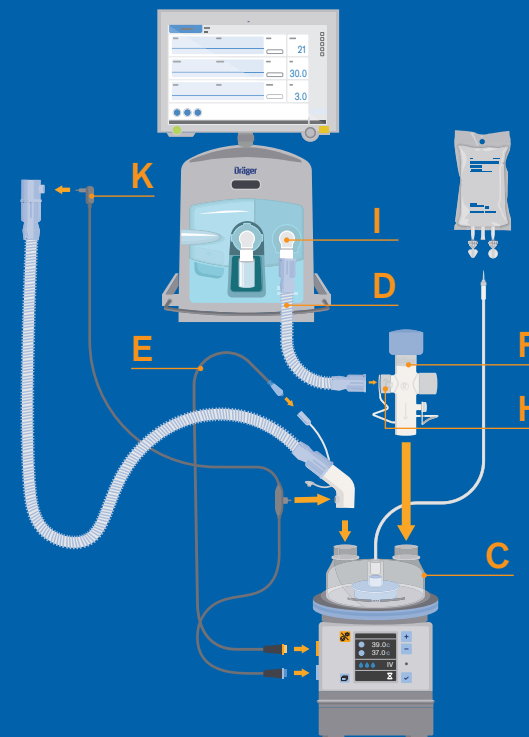



! De blender-set wordt niet gebruikt bij aansluiting op een beademingsapparaat.

## Aansluiten op een beademingsapparaat met het Hi-Flow System

1. Sluit de korte blauwe inspiratoire slang (D) aan op de inspiratieaansluiting van het beademingsapparaat (I) en op de bevochtigingskamer (C).
2. Sluit de verwarmde inspiratoire slang (J) aan op de tweede opening van de bevochtigingskamer.
3. Sluit de adapters van de verwarmingskabel (E) en de temperatuursensoren (K) aan op de bevochtiger en het slangensysteem.
4. Wanneer u de HI-Flow Star ventielset gebruikt (optioneel): sluit de ventielset (F) aan op de bevochtiger. Sluit de korte blauwe inspiratoire slang (D) aan op de zij-opening (H) van de ventielset (F).

# BEKNOPTTE HANDLEIDING – HI-FLOW STAR VOOR VOLWASSENEN

2

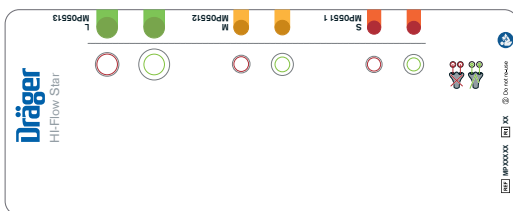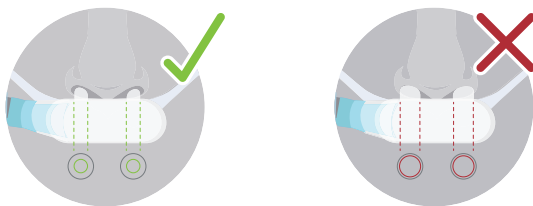

1. Bepaal met behulp van de maatsjabloon de juiste maat van de neusbril. De maatsjabloon geeft de beschikbare maten van de neusbril aan.
2. De neusbril mag de neusgaten slechts voor maximaal 50% afsluiten.
3. Sluit de neuscanule aan op de inspiratoire slang.
4. Start het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing en stel de parameters in. Controleer of er een flow uit de neusbril komt.



3

Bevestig de bedclip aan de kleding van de patiënt of aan het beddengoed, zodat de neusbril zo goed mogelijk blijft zitten.



4

1. De slang van de neuscanule kan links of rechts van de patiënt liggen.
2. Draai de neuscanule zodanig dat de slang van de neuscanule in de richting van het apparaat loopt.
3. Plaats de neusbril voorzichtig in de neus van de patiënt en breng de hoofdband aan.
4. De maat van de hoofdband kan worden afgesteld met de klittenbandsluiting.

