

Dräger Savina® 300/Classic/Select

Разборка/Сборка



Dräger Savina® 300



Dräger Savina® 300 Classic



Dräger Savina® 300 Select

Разборка/Сборка датчика потока

1 Откройте створку, поднимая ее за нижний край.

Закройте створку. **3**

2 Переместите датчик потока влево до упора.

Переместите датчик потока вправо в гнездо. **2**

3 Извлеките датчик потока из гнезда.

Вставьте датчик потока в гнездо. **1**

Разборка/Сборка клапана выдоха

1 Поверните запирающее кольцо как можно дальше влево.

Поверните запирающее кольцо как можно дальше вправо, чтобы оно зафиксировалось с отчетливым щелчком. **5**

2 Извлеките клапан выдоха из патрубка.

Поверните запирающее кольцо как можно дальше влево и вставьте клапан выдоха в патрубок. **4**

3 Извлеките муфту датчика из клапана выдоха.

Установите муфту датчика потока на клапан выдоха. **3**

4 Удалите диафрагму.

Установите диафрагму по краю корпуса клапана выдоха. **2**

5 Отсоедините и опорожните влагосборник.

Установите емкость влагосборника. **1**

Dräger Savina® 300/Classic/Select

Датчик потока: Инструкция по повторной обработке Ручная очистка и дезинфекция



Dräger Savina® 300




Dräger Savina® 300 Classic



Dräger Savina® 300 Select

- 1** Приготовьте моющий раствор.

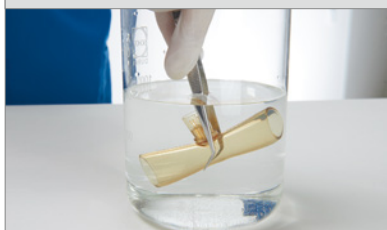

Погрузите датчик потока, избегая образования пузырьков, в моющий раствор на время, установленное для конкретного вещества.

- 2** В начале и в конце энергично покрутите датчик потока в чистящем растворе не менее 3 оборотов.



Убедитесь, что чистящий раствор омывает все поверхности и внутренние пространства.

- 3** Промойте датчик потока в воде (минимальный уровень качества: питьевая вода) и смойте все остатки чистящего средства.




- 4** Приготовьте дезинфицирующий раствор.




Покрутите датчик потока в дезинфицирующем растворе несколько раз в течение времени, определенного для конкретного применяемого средства. Убедитесь, что раствор омывает все поверхности и внутренние пространства.

- 5** Необходимо полоскать датчик потока в воде (минимальный уровень качества: питьевая вода) до удаления видимых следов дезинфицирующего средства.

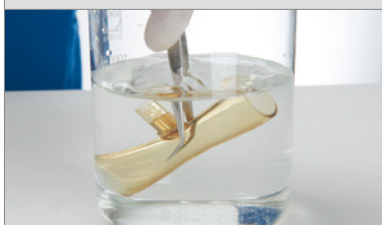

Проверьте датчик потока на предмет видимых загрязнений или повреждений.

- 6** Тщательно вытряхните остатки воды.

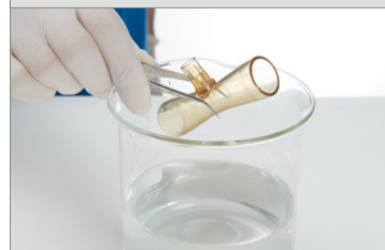

Дайте датчику потока высохнуть на воздухе не менее 30 минут.

В случае применения средств, сочетающих моющие и дезинфицирующие свойства, следуйте инструкции (погружение два раза).

Данная инструкция не заменяет и не изменяет руководство по эксплуатации. Необходимо неукоснительно соблюдать требования инструкции по применению, а также правила и протоколы клиники.

Dräger Savina® 300/Classic/Select

Инструкция по повторной обработке

Ручная очистка и дезинфекция



Dräger Savina® 300



Dräger Savina® 300 Classic



Dräger Savina® 300 Select

Обзор инструкций по повторной обработке:

	Ручная очистка и дезинфекция	Машинная очистка и дезинфекция	Стерилизация
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✗	✓
	✓	✗	✗

* В качестве альтернативы можно также использовать одноразовый клапан выдоха.

Машинная очистка и дезинфекция:

Аккуратно положите изделие в корзину.

Убедитесь в следующем:

- Все поверхности и внутренние пространства могут быть полностью промыты.
- Вода может свободно стекать.

Стерилизация:

Проверьте изделие на отсутствие видимых повреждений и при необходимости замените.

Для полукритических продуктов стерилизация возможна, но не обязательна.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации.

Данная инструкция не заменяет и не изменяет руководство по эксплуатации. Необходимо неукоснительно соблюдать требования инструкции по применению, а также правила и протоколы клиники.

Изготовитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany (Германия)