


POURQUOI PRIVILÉGIER LES ACCESSOIRES DRÄGER D'ORIGINE ? – CHAMBRE DE MESURE DE CO₂

Dräger

En quoi le monitoring du CO₂ est-il important ?

Le monitoring précis du CO₂ est la condition préalable à la réussite des soins respiratoires. Lors de la phase expiratoire, le CO₂ est l'un des paramètres les plus fiables, car il fournit des informations sur l'efficacité de la ventilation, sur les échanges gazeux et sur le métabolisme.¹

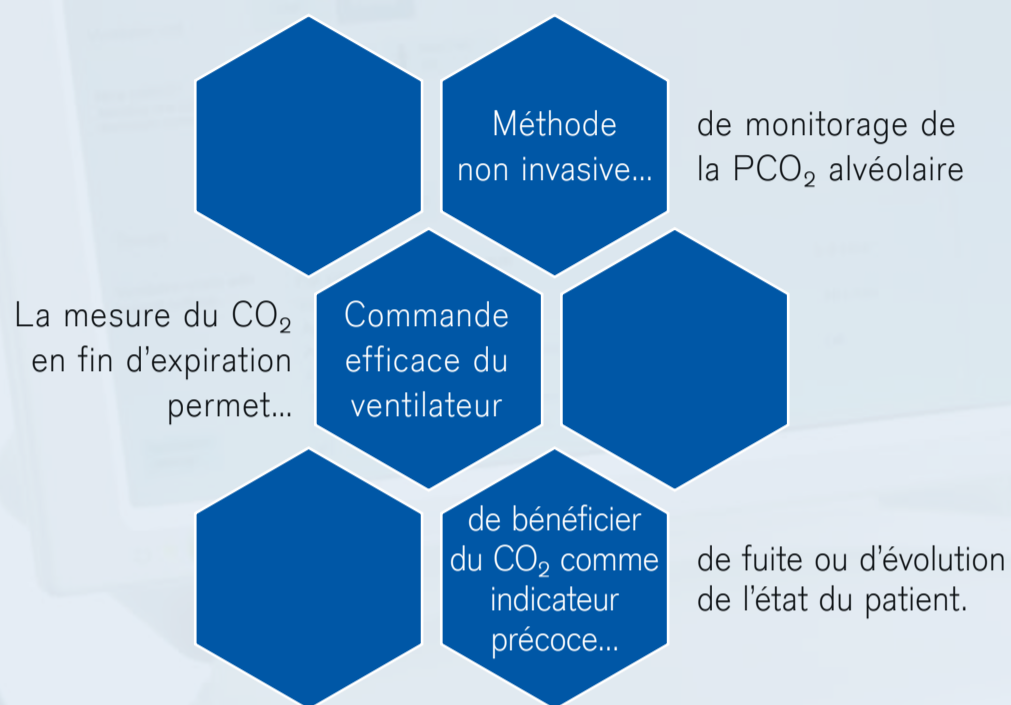

Avantages des chambres de mesure de CO₂ Dräger :



Disponibilité de chambres réutilisables ou à usage unique, pour une haute performance de ventilation



Chambres de mesure de CO₂ pour patients adultes et pédiatriques, faciles à remplacer



Bon rapport qualité-prix grâce à l'optimisation des procédures

Sources :

1. Exhaled gas analysis: technical and clinical aspects of capnography and oxygen consumption: 1989. St. John R.E., Critical Care Nurse. 20:363-374

Comment ça marche ?

La chambre de mesure du CO₂ se place au sein du circuit patient entre la pièce en Y et le tuyau. Un capteur de CO₂ peut être connecté à la chambre de mesure. Le mélange gazeux est évalué en permanence par le capteur de CO₂ connecté et sa valeur est affichée à l'écran du ventilateur.



Chambre de mesure de CO₂ réutilisable - Pédiatrique



Chambre de mesure de CO₂ à usage unique - Adulte

Pourquoi utiliser des chambres de mesure de CO₂ Dräger d'origine ?

Toutes les chambres de mesure de CO₂ Dräger sont conçues pour un fonctionnement optimal avec les capteurs de flux principal Dräger correspondants.

Nécessaires à la mesure du CO₂ avec votre ventilateur Dräger

Bien qu'une capnographie effectuée et calibrée selon les recommandations du fabricant ne présente que peu de complications, l'utilisation de chambres de mesure de CO₂ non compatibles peut avoir des conséquences :

- Hypothèses erronées sur l'état du patient en raison d'une mesure incorrecte du CO₂ par la chambre
- En cas de mauvaise fixation de la chambre dans le boîtier du capteur, possibles artefacts dans la courbe de CO₂ et déclenchement d'alarmes

! C'est pourquoi Dräger vous recommande l'utilisation d'accessoires Dräger d'origine pour vos ventilateurs Dräger !

Destination : Professionnels de Santé

Nom du fabricant : Drägerwerk AG & Co. KGaA 23542 Lübeck (Allemagne)

Classe DM : IIa.

Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.