

TUDTA?




QuickSet

Mi ez?

A QuickSettel lehetőség van egy paraméter megváltoztatására és azonnali hatás elérésére anélkül, hogy megerősítésre lenne szükség. A QuickSettel valós időben változtathatja meg a paramétert, a lélegeztetőgép képernyőjén történő valós idejű monitorozással.

Hogyan használja?

1. Válassza ki a paramétert.
2. A gomb ezután sárgára változik.
3. Tartsa lenyomva a forgógombot 1,5 másodpercig.
4. A gomb zöldre változik sárga peremmel.
5. Fordítsa el a gombot, miközben lenyomva tartja.
6. A beállítások azonnal érvényesülnek.

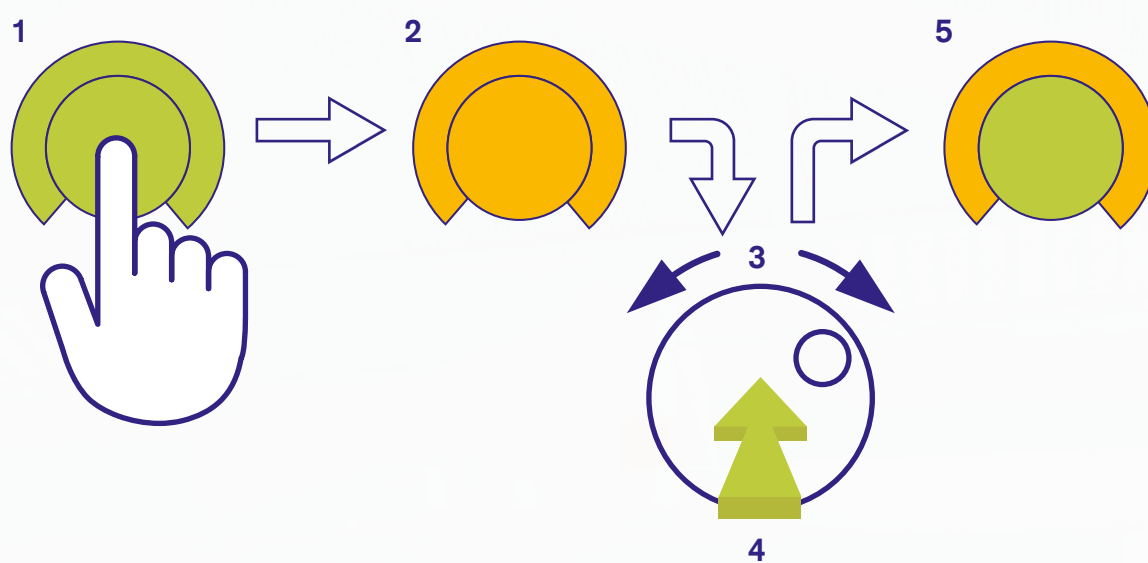

Miért fontos ez?

Bizonyos alveolus-toborzási manővertechnikák során fontos, hogy a paramétereket valós időben, folyamatosan lehessen változtatni, anélkül, hogy időt veszítenének a megerősítéssel vagy azzal, hogy a paraméter megváltozására várnak.

Miért fontos a kimenetel javítása?

A QuickSet funkció segít néhány toborzási beállításban, mint pl. megnövelt PEEP esetében a belégzési nyomás értéke nem változik¹

