


# WIST U DAT?

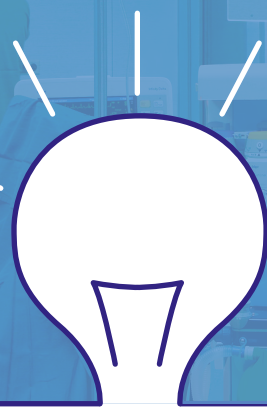


## QuickSet

### Wat is het?

Met QuickSet kunt u een parameter wijzigen en deze onmiddellijk effect laten hebben, zonder de wijziging te bevestigen. QuickSet maakt een realtime aanpassing van de parameter mogelijk met een realtime bewaking op het scherm van het beademingsapparaat.

### Hoe gebruikt u het?

1. Selecteer de parameter
2. Vervolgens wordt de knop geel
3. Houd de draaiknop nu 1,5 seconden ingedrukt
4. De knop wordt groen met een gele rand
5. Draai aan de knop terwijl u deze ingedrukt houdt
6. Instellingen worden onmiddellijk van kracht

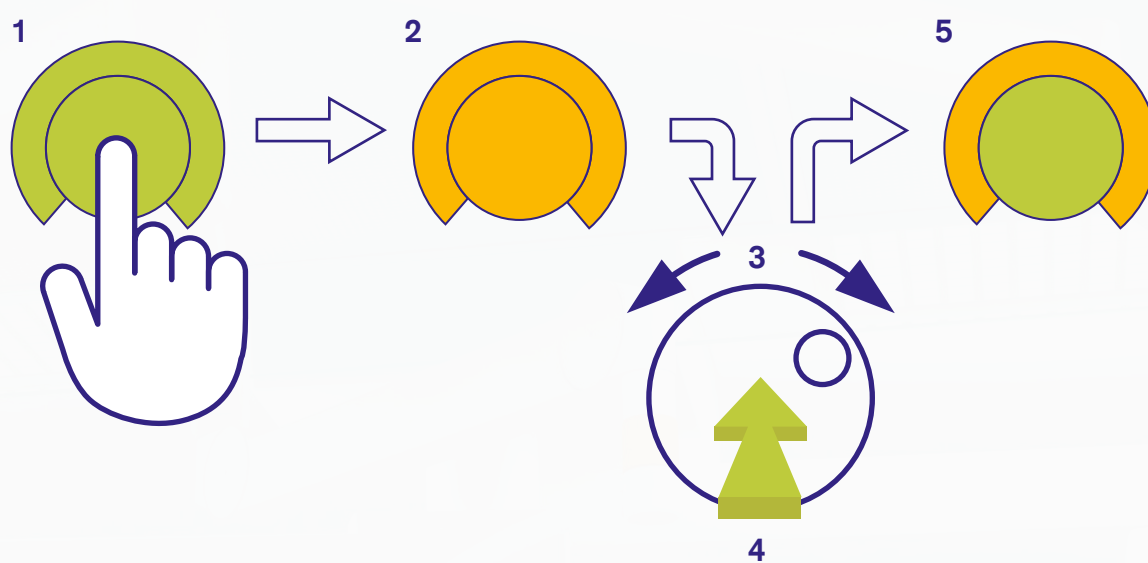


### Waarom is het belangrijk?

Bij sommige recruitmentmanoeuvres is het belangrijk dat de parameters continu realtime worden aangepast, zonder tijd te verliezen met het bevestigen en/of wachten op wijzigingen van deze parameters.

### Waarom is het zinvol voor verbetering van de resultaten?

QuickSet kan u helpen bij het uitvoeren van sommige recruitmentprocedures d.w.z. volgens Lim et. al. waarbij de inspiratoire druk gelijk blijft bij incrementele PEEP<sup>1</sup>

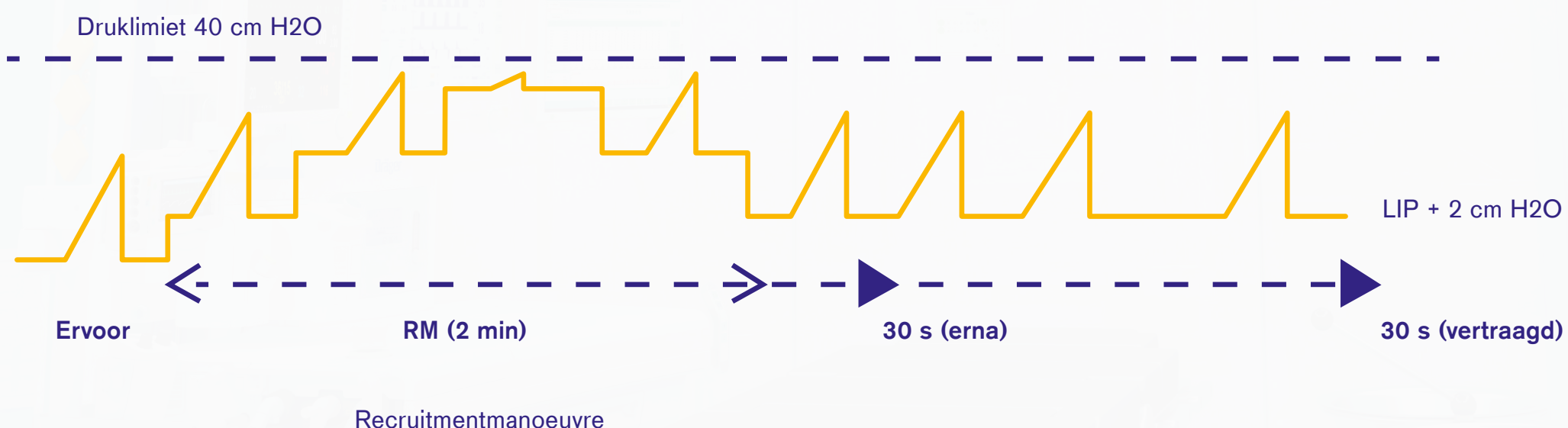

1. Lim et al., Morphometric Effects of the Recruitment Maneuver on Saline-lavaged Canine Lungs: A Computed Tomographic Analysis.