



Isolette® 8000

Inkubatori i otvorena briga

Kompanija Dräger postavlja standard za termoregulaciju uz veliki broj funkcija visokih performansi osmišljenih da pruže stabilno i izolovano okruženje za bebu. Da bi se osiguralo održavanje termo-neutralne zone, Isolette® 8000 vam omogućava da kontinuirano nadgledate centralnu i perifernu telesnu temperaturu.

Najznačajnije prednosti

Dokazani princip sa naprednom tehnologijom

Naša sposobnost da pouzdano održavamo termo-neutralno mikro okruženje stabilnim učinila je da kompanija Dräger postane pouzdan partner u termoregulaciji. Brend Isolette® poseduje dokazan i pouzdan dizajn, a pružaoci nege širom sveta znaju ga već decenijama. Napredni sistem termoregulacije, kontrolisan Dräger razrađenim PID algoritmom, održava bebu u stabilnom okruženju. Veoma mala brzina koristi se za stvaranje mirne zone koja okružuje novorođenče, sprečavajući konvektivni gubitak toplote, dok dvostruke vazdušne zavese i preventivni mehanizmi regulacije održavaju praktično stabilne uslove tokom pristupa novorođenčetu.

Povećavanje nivoa vlažnosti u mikrookolini pomaže nežnim bebama da smanje transepidermalni gubitak vode i s tim povezan hladni stres. Kada je potrebna humidifikacija, Isolette 8000 uvodi novi nivo preciznosti koji vam pomaže da efikasno regulišete postupak humidifikacije.

Dizajniran sa akcentom na udobnost

Dizajniran da smanji stres pri svakom okretanju, savijanju i uvijanju.

Što duže traje smena pružaoca nege, to će više ceniti brojne ergonomske aspekte ugrađene u Isolette 8000. Lak pristup novorođenčetu, pogodno podešavanje visine inkubatora i lako dostupne kontrole čine ga odličnim inkubatorom za bilo koje odeljenje neonatalne intenzivne nege. Sa svojim kompaktnim stilom, uređajem Isolette 8000 se lako manevriše. Lagan i kompaktan sa glatkim točkicama i ergonomskim kočnicama koje rade na pokret noge, ovaj inkubator se pomera bez napora čak i u otežanim uslovima neonatalne intenzivne nege.

Higijena bez kompromisa

Poboljšana kontrola infekcije kako bi se ispunili današnji strogi higijenski zahtevi.

Isolette 8000 predstavlja inovativni sistem za upravljanje kondenzacijom koji je posebno dizajniran za kontrolu širenja infekcije. Dräger je razvio ovaj napredni sistem tako da se kondenzacija koja se sakuplja u kabini inkubatora izoluje od čiste vode koju dovodi sistem za vlaženje. Pored toga, čitav sistem za vlaženje može se lako ukloniti za brzu, pogodnu, ali efikasnu sterilizaciju nakon svakog pacijenta, čime se održava najbolje moguće higijensko okruženje.

Efektivnost i efikasnost


Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu kompanije Dräger u nezi novorođenčadi i posvećenosti neonatalnoj intenzivnoj nezi uvek se u vašem radnom okruženju možete osloniti na Isolette 8000. Isolette 8000 se lako integriše u odeljenje neonatalne intenzivne nege, sa tehnologijama koje poznajete i kojima verujete: Babylog® respiratorni sistemi, Dräger terapija žutice, Dräger uređaji za monitoring i sistemi arhitektonskog dizajna.

Dodatna oprema



Briga o razvoju

Dräger podržava brigu o razvoju širokim asortimanom dodatne opreme. Naša pomagala za pozicioniranje što više imitiraju položaj odojčeta u materici u pokušaju da se ponovo kreiraju fizička ograničenja na koje je prevremeno rođeno dete naviklo. U ovom okruženju novorođenče može prineti ruku ustima, prisloniti noge grudima i sklupčati se. Poklopci inkubatora prigušuju svetlost i buku kako bi se obezbedilo mirno okruženje za novorođenče u njegovom ili njenom privremenom „domu“.

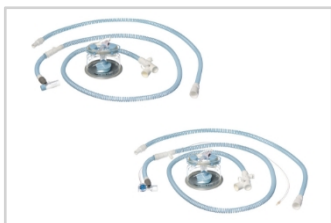

Dodatna oprema za ventilaciju novorođenčadi

- Efikasna i nežna ventilacija za novorođenčad
- Respiratorna kola, filteri i HME uređaji
- BabyFlow plus smanjuje napor disanja i povećava udobnost
- Kompatibilno sa Dräger Babylog VN500 za stabilan CPAP pritisak



Seattle PAP – Bubble CPAP System

- Bubble CPAP za stalni pozitivni respiratorni pritisak i oscilacije
- Ugao 135° u cevi jača amplitudu oscilacija za bolju razmenu gasova
- BabyFlow CPAP - udobnost i podrška
- Laka instalacija, upotreba, minimalna obuka

Vezivni proizvodi



Plafonski stativi

Rešenja za optimizaciju procesa i toka rada.

Ne prodaju se svi proizvodi, funkcije i usluge u svim zemljama. Ovde navedeni zaštitni znakovi su vlasništvo lica imenovanih u svojstvu vlasnika. Zaštitni znakovi mogu biti u vlasništvu kompanije Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ili njenih podružnica u određenim državama i ne obavezno u državi u kojoj se materijal objavljuje. Posetite www.draeger.com/trademarks za trenutni status zaštitnih znakova kompanije Dräger.

Dräger Tehnika d.o.o.

Danijelova 12-16
11010 Vozdovac, Belgrade
Тел.: +381 11 3911 222

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

