



WaterLock 2

Spotřební materiál a příslušenství

Dokonalá ochrana pro přesné měření plynů. Systém Dräger WaterLock 2 bezpečně zabraňuje v průniku vody do senzoru Multi-Gas. Membránová technologie vyvinutá společností Dräger pro WaterLock 2 brání v průniku jakýchkoli bakterií do systému měření plynů. WaterLock 2 se také bezpečně a snadno vyprazdňuje, což představuje další podstatnou přednost pro manipulaci a hygienu.

Výhody

Poskytuje bezpečné a přesné měření plynů

Při připojení pacientů k anesteziologickému přístroji nebo přístroji pro měření plynů musíte mít jistotu, že je vaše měření přesné. A navíc je pro zdraví pacienta nezbytné mít pod kontrolou pravděpodobnost výskytu křížové kontaminace.

Náš systém WaterLock 2 je konstruován s dvojitou membránou PTFE v kombinaci se dvěma samotěsnicími filtry a účinně odděluje kondenzovanou vodu a sekrety obsahující škodlivé kontaminanty, jako jsou bakterie a viry. WaterLock 2 je jakožto druhý ochranný systém vybaven vysoce absorpčními polymerovými těsněními za membránami PTFE. V případě průniku tekutiny tato těsnění zablokují průtok plynu a chrání měřicí jednotku před vniknutím vody (a kontaminantů), čímž dosáhnete přesnějšího měření plynů a zároveň ochráníte zdraví pacienta.

Bezpečná a snadná manipulace

Maximalizujte efektivitu svého pracovního postupu a zlepšete svá opatření pro kontrolu infekcí. WaterLock 2 lze jednoduše připojit a ovládat díky snadnému západkovému připojení, které vám usnadní instalaci a vyprázdnění. Stačí použít následující tři kroky:

- Uchopte WaterLock 2 za rukojeť a zasuňte jej do vašeho přístroje tak, že uslyšíte zaklapnutí.
- Připojte vzorkovací hadičku plynu k portu Luer.
- Odsajte vodu injekční stříkačkou.

WaterLock můžete na přístroji používat až čtyři týdny. V kombinaci s ultramoderními membránami PTFE můžete účinně zabránit průniku vody, bakterií a virů do vašeho systému měření plynů, a zajistit tak ochranu před infekcemi.

Stabilní a bezpečný: Jak WaterLock 2 funguje

WaterLock 2 vybavený dvěma hydrofobními mikroporézními PTFE filtry poskytuje vašemu pacientovi optimální ochranu v průběhu terapie a zároveň zajišťuje přesné odečty plynů. Je toho dosaženo použitím duálního systému, který používá samotěsnicí filtry jako druhou úroveň ochrany. Vzorkovací plyn vydechovaný pacientem prochází nejprve přes hlavní hydrofobní membránu, která odfiltruje vodu i kontaminanty, a poté projde senzory modulu. Voda je odvedena do zásobníku vody, který lze vyprázdnit pomocí standardní stříkačky. Náš Dräger WaterLock 2, optimalizovaný tak, aby zajistil rychlou odezvu a velmi efektivní odvodnění, udržuje perfektní kapnogram i za extrémních podmínek, např. při anestezii s minimálním průtokem.

Snížení nákladů

Vaše zdravotnické vybavení je cenná investice, která vám pomáhá zlepšovat výsledky vašich pacientů a zachraňovat životy. Abychom vám pomohli zvládat náklady na péči, má systém Dräger WaterLock 2 provozní životnost čtyři týdny, přičemž v případě výjimečných podmínek může být podle potřeby okamžitě vyměněn. Během této doby může být díky možnosti přímo odsát vodu pomocí standardní stříkačky vyprázdněn a opakovaně použit tak často, jak je potřeba.

Výhody

Pomáháme vytvářet udržitelnější budoucnost

Jako výrobce zdravotnické techniky s více než 130letou tradicí jsme zavázáni poskytovat výrobky vynikající kvality. Stejně tak jsme odhodláni nést odpovědnost za vytváření udržitelných výrobků.

Při vývoji našeho výrobku WaterLock2 jsme spojili bezpečnost pacientů s udržitelností. WaterLock2 proto neobsahuje přírodní latex a neobsahuje BPA, PVC ani ftaláty jako DEHP (pro člověka pravděpodobně karcinogenní*). Z téhož důvodu jsou obaly plně recyklovatelné (PE sáčky, vlnitá lepenka) a výroba probíhá v Evropě, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Udržitelnost je jedním z klíčových prvků naší DNA: „Technika pro život“. Je zakořeněna v našich základních hodnotách a je rovněž kompasem, který řídí naši filozofii. Jsme odhodláni podílet se na tom, aby se svět stal lepším, což je patrné z kvality našich výrobků a služeb zachraňujících a chránících lidské životy, a z naší neochvějně oddanosti blahu a bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků a celé společnosti. V konečném důsledku nám jde o zajištění lepší budoucnosti naší společné planety.

Více informací najdete zde: https://www.draeger.com/en_uk/About-Draeger/Sustainability

* Světová zdravotnická organizace. Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization. 2017. 424–425. ISBN 978-92-4-154995-0

Podrobnosti



D-8422-2024

6872130 WaterLock 2



D-37369-2015

6873850 / 6873500 Vzorkovací hadička, jednorázová

Informace pro objednání

	Objednací číslo
WaterLock 2, 12 kusů	6872130
Infinity ID WaterLock 2, 12 kusů	6872020
Vzorkovací hadička, jednorázová, délka 2,5 m, 10 ks	6873850
Vzorkovací hadička, jednorázová, délka 3,2 m, 10 ks	6873500

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušného vlastníka. Vlastníkem ochranných známek může být společnost Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) nebo její přidružené společnosti v některých zemích, a ne nutně v zemi, ve které je tento materiál vydán. Aktuální stav ochranných známek společnosti Dräger najdete na adrese www.draeger.com/trademarks.

Sídlo společnosti

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
■ www.draeger.com

Česká republika

Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
☎ +420 272 760 141
☎ +420 272 769 242
✉ recepcecz@draeger.com
■ www.draeger.com/cs_cz/Hospital

Dräger - South East Europe

Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
☎ +43 1 60 90 4809
☎ +43 1 69 94 597
✉ contactSEE@draeger.com

Výrobce

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
✉ info@draeger.com



Regionálního obchodního
zástupce najdete na:
www.draeger.com/contact