

Полнолицевая маска ClassicStar® NIV

Расходные материалы и принадлежности

Полнолицевая маска ClassicStar® NIV предназначена для неинвазивной вентиляции легких. Маска закрывает лицо, рот, нос и глаза, обеспечивая, тем самым эффективную терапию, даже во время дыхания через рот.



D-6282-2018

ClassicStar® SE (со стандартным угловым переходником)
Наличие углового переходника голубого цвета указывает на то, что у маски нет ни клапана, предотвращающего асфиксию, ни портов для выдоха.



D-6285-2018

ClassicStar® AAV (с клапаном, предотвращающим асфиксию)
без портов для выдоха. Желтый прозрачный угловой переходник включает в себя клапан, предотвращающий асфиксию, обеспечивая удобный доступ к окружающему воздуху в случае пониженного давления (<3 см H₂O).



D-6279-2018

ClassicStar® AAV (с клапаном, предотвращающим асфиксию)
Бесцветный прозрачный угловой переходник включает в себя клапан, предотвращающий асфиксию, обеспечивая удобный доступ к окружающему воздуху в случае пониженного давления (<3 см H₂O). Порты для выдоха поддерживают удаление CO₂ во время неинвазивной вентиляции.

Преимущества

Полнолицевая маска ClassicStar® NIV

Полнолицевая маска ClassicStar устраняет проблемы с переносицей за счет герметизации в тех частях лица, которые менее чувствительны к давлению и имеют более плавные контуры. Кроме того, полнолицевая маска предпочтительна в случае наличия аномалий лица.

- Полнолицевая маска ClassicStar NIV снабжена заполненной воздухом подушечкой, которая подгоняется индивидуально по форме лица пациента. Подушечка маски может быть надута или спущена с помощью специальной помпы. Благодаря возможности адаптации, маска ClassicStar обеспечивает повышенный комфорт и эффективное уплотнение.
- Благодаря широкой подушечке маски, площадь поверхности, на которую распределяется давление, больше, что помогает избежать раздражения кожи.
- Головной держатель, который включает в себя дополнительную головную ленту в верхней части маски, обеспечивает стабильное и надежное крепление, предотвращая, тем самым, смещение маски и снижение давления.
- Для быстрого снятия маски она снабжена быстросъемными креплениями.
- Угловой переходник ClassicStar поворачивается на 360°. В версии SE угловой переходник может также перемещаться по вертикали, что расширяет возможности адаптации.
- Полнолицевая маска ClassicStar NIV предназначена только для одного пациента.

Спецификация заказа

ClassicStar® SE	Упаковка	Номер заказа
Полнолицевая маска ClassicStar® NIV со стандартным угловым переходником, для одного пациента, размер S	1 шт.	MP02910
Полнолицевая маска ClassicStar® NIV со стандартным угловым переходником, для одного пациента, размер M	1 шт.	MP02911
Полнолицевая маска ClassicStar® NIV со стандартным угловым переходником, для одного пациента, размер L	1 шт.	MP02912
ClassicStar® AAV		
Полнолицевая маска ClassicStar® NIV с клапаном, предотвращающим асфиксию, для одного пациента, размер S	1 шт.	MP02913
Полнолицевая маска ClassicStar® NIV с клапаном, предотвращающим асфиксию, для одного пациента, размер M	1 шт.	MP02914
Полнолицевая маска ClassicStar® NIV с клапаном, предотвращающим асфиксию, для одного пациента, размер L	1 шт.	MP02915
ClassicStar® AAV – без портов для выдоха		
Полнолицевая маска ClassicStar® NIV с клапаном, предотвращающим асфиксию, без портов для выдоха, для одного пациента, размер S	1 шт.	MP02916
Полнолицевая маска ClassicStar® NIV с клапаном, предотвращающим асфиксию, без портов для выдоха, для одного пациента, размер M	1 шт.	MP02917
Полнолицевая маска ClassicStar® NIV с клапаном, предотвращающим асфиксию, без портов для выдоха, для одного пациента, размер L	1 шт.	MP02918

Примечания

Примечание

Представленная в данной брошюре информация носит справочный характер. Сведения об актуальной спецификации, технических характеристиках и др. уточняйте у представителя производителя или дистрибьютора.

Штаб-квартира

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

РОССИЯ

ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр

ул. Новохоловская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

