

Retraitement du Dräger Babyroo® TN300

Nettoyage et désinfection en 4 étapes



! Observez la réglementation de votre établissement en matière de prévention des infections et de retraitement. Nous publions ces consignes à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne remplacent pas les instructions d'utilisation et n'en diffèrent pas. Pour connaître les instructions complètes de démontage, de nettoyage et de désinfection, veuillez consulter les consignes d'utilisation de l'appareil et des différents accessoires.

Conditions préalables : Il n'y a pas de patient dans l'appareil. Tous les accessoires ont été retirés et l'alimentation électrique est débranchée. Les 30 minutes de refroidissement sont écoulées.

1 Veuillez vous reporter à la page suivante pour le démontage et le montage.



2 Désinfection des surfaces et nettoyage :

- Des surfaces de l'appareil et du module de réanimation.
- De chaque pièce retirée lors du démontage : parois latérales, paroi avant, paroi côté tête, mini-parois internes, support patient, support du matelas, plateau de radiographie, passe-tuyaux¹, mécanisme d'inclinaison du lit, poignées, plateau à instruments, tiroirs, supports de bouteilles de gaz.
- Pour en savoir plus sur la désinfection et le nettoyage des surfaces, veuillez consulter les consignes d'utilisation.
- Ne nettoyez pas à la vapeur.

3 Nettoyage du matelas :

- Matelas en mousse SoftBed : Nettoyez et essuyez avec un désinfectant comme recommandé, et avant chaque nouveau patient. Si la housse est très sale, elle peut être lavée en machine à 95 °C. Séchage en machine jusqu'à 95 °C. Dans de rares exceptions, il peut arriver que le matelas soit contaminé.
- Matelas chauffant en gel : Veuillez vous reporter à la section nettoyage et désinfection des consignes d'utilisation du matelas chauffant en gel.

4 Avant l'utilisation suivante :

- L'appareil a été assemblé et préparé et il est prêt à l'utilisation.
- Veillez à ce que toutes les surfaces soient sèches.

! N'utilisez que des désinfectants listés dans les consignes d'utilisation de l'appareil et des accessoires. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil. Utilisez des désinfectants autorisés localement et adaptés à la procédure de retraitement concernée ainsi qu'à l'usage voulu.

¹En option : nettoyage en machine et désinfection thermique.

1 Démontage / Montage

Démontage ►

Pour les étapes 2, 3 et 4, veuillez tourner la page. 

<p>1 Si nécessaire, retirez le toit.</p>  <p>8 Remplacez le toit.</p>	<p>2 Retirez le matelas SoftBed ou le matelas en gel.</p>  <p>7 Remplacez le matelas SoftBed ou le matelas en gel.</p>	<p>3 Retirez les passe-tuyaux de la paroi avant, de la paroi côté tête et des parois latérales (s'il y en a).</p>  <p>6 Remplacez les passe-tuyaux dans la paroi avant, la paroi côté tête et les parois latérales (s'il y en a).</p>	<p>4 Abaissez les parois latérales.</p>  <p>5 Fermez les parois latérales.</p>
<p>5 Retirez s'il y en a les mini-parois internes.</p>  <p>4 Remplacez, s'il y en a, les mini-parois internes.</p>	<p>6 Tirez sur chaque paroi jusqu'à ce que les chevilles sortent de leur fente, et retirez la paroi. Pour retirer la paroi côté tête, commencez par incliner le bac dans le sens opposé à la colonne principale, puis retirez la paroi.</p>  <p>3 Remettez en place dans les fentes respectives les parois latérales, la paroi avant et la paroi côté tête, de sorte à bloquer correctement les chevilles.</p>	<p>7 Retirez le support du matelas et, s'il y en a un, le plateau de radiographie du bac. Pour retirer le plateau de radiographie, tirez dessus jusqu'à ce qu'il se bloque, puis inclinez-le légèrement et retirez-le entièrement.</p>  <p>2 Remettez en place dans le bac le support du matelas et, s'il y en a un, le plateau de radiographie.</p>	<p>8 Retirez le flacon d'aspiration suspendu sur le côté ou au rail GCX puis, s'il y en a un, retirez le câble du capteur de SpO2.</p>  <p>1 Posez un nouveau flacon d'aspiration à usage unique, puis remplacez le câble du capteur de SpO2 (s'il y en a un).</p>

◀ Montage