

## Gamme Primus®\*

### Bloc patient

#### Démontage/montage



### Démontage

1 Desserrer les trois vis du piston à l'aide d'une clé hexagonale.



Serrer les trois vis du piston à l'aide d'une clé hexagonale.

2 Tirer le bloc patient vers le haut en le tenant par la poignée.



Utiliser la poignée pour insérer le bloc patient dans le dispositif de fixation.

3 Retirer la membrane du piston.



Mettre en place la membrane du piston de façon à ce que l'inscription Dräger soit lisible.

4 Retirer l'absorbeur de CO<sub>2</sub>. Dévisser l'adaptateur CLIC (en option).



Visser l'adaptateur CLIC (en option). Insérer l'absorbeur de CO<sub>2</sub>.

5 Insérer le disque de nettoyage dans l'adaptateur. Fermer l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en émettant un clic.



Retirer le disque de nettoyage de l'adaptateur. Fermer l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en émettant un clic.

6 Desserrer les raccords inspiratoire et expiratoire et les retirer.



Installer les raccords inspiratoire et expiratoire et tourner pour les serrer.

7 Retirer les deux capteurs de débit.



Insérer les deux capteurs de débit.

8 Desserrer les cinq vis du bloc patient à l'aide d'un tournevis et retirer le couvercle.



Placer le couvercle sur le bloc patient et serrer les cinq vis à l'aide d'un tournevis.

9 Soulever la partie centrale du bloc patient.



Placer la partie centrale du bloc patient sur la partie inférieure du boîtier.

\* Primus Infinity Empowered, Primus, Pallas, Apollo.

### Montage

## Gamme Primus®\*


### Bloc patient

#### Consignes de retraitement



	Nettoyage et désinfection manuels	Nettoyage et désinfection en machine	Stérilisation
	✗	✓	✓
	✓	✗	✗
	✓	✗	✓

#### Contrôle visuel

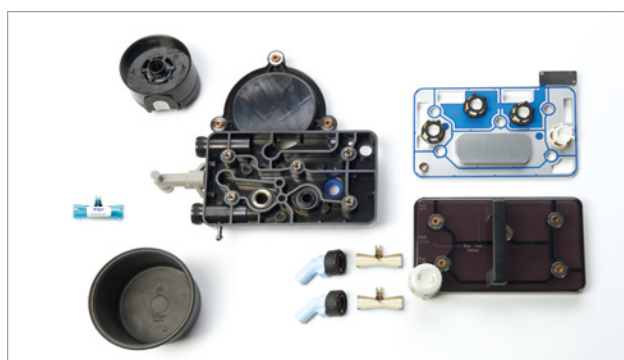

#### Désinfection par immersion :

Veillez utiliser les désinfectants répertoriés dans la notice d'utilisation des capteurs de débit Dräger.

#### Nettoyage et désinfection en machine :

Positionnez les pièces de sorte que tous les espaces intérieurs et les surfaces soient entièrement immergés et que l'eau puisse être évacuée correctement.

#### Stérilisation :

La stérilisation par plasma ou par irradiation n'est pas indiquée pour les capteurs de débit SpiroLife®.

Ces consignes ne remplacent pas les instructions de la notice d'utilisation.