

Dräger DrugTest 5000 Test Kit

Dräger DrugTest 5000-systemet består av to hovedkomponenter: Dräger DrugTest 5000 Test Kits og Dräger DrugTest 5000 Analyser. Systemet er raskt og nøyaktig for testing av orale væskeprøver. Kan teste narkotiske stoffer som amfetaminer, designer amfetaminer, opiater, kokain, metaboler, benzodiazepiner (rohypnol og valium) og cannabis.



Ergonomisk designet for enkel håndtering og oppstart. Settet består av en testkassett komplett med oral væske-samler. Enkel å bruke med enten venstre eller høyre hånd, med eller uten hansker, og den eliminerer muligheten for mistolkning av resultatene. Kassetten er produsert i et materiale som er hygienisk i bruk og utformingen av testkassetten gjør at operatøren ikke kommer i kontakt med spyttprøven.

TESTEN UTFØRES I FEM ENKLE TRINN FOR MINIMALISERING AV OPERATØRFEIL.

Først fjernes den beskyttende hetten fra oraltest-samleren og testkassetten overleveres til testpersonen. Testpersonen

plasserer så samleren i sin munn, og ved bruk av en bevegelse sideveis mellom kinnet og gummen blir væskeprøve tatt. Når tilstrekkelig med væske har blitt samlet, vil den innebygde indikatoren bli blå og testkassetten kan overleveres tilbake til operatøren. Operatøren, som har observert hele prosessen, plasserer så testkassetten og patronen i analysatoren og avventer resultatet, som vil vises klart innen noen minutter. Individuelle prøver kan enkelt identifiseres ved å skrive navn og dato på testkassetthuset. Dräger DrugTest 5000 brukes i forbindelse med Dräger DCD 5000 oral væskesamler-enhet.



ST-132219-2007

Det bærbare Dräger DrugTest 5000 Test Kit
enkel, rask, pålitelig og sikker narkotikapåvisning


BESTILLINGSINFORMASJON

Dräger DrugTest 5000 Test Kit inneholder en prøvesamler, en testkassett og en patron.

Dräger DrugTest 5000 Training Test Kit	83 19 970
Dräger DrugTest 5000 Test Kit 6-drug panel	83 19 830
Dräger DrugTest 5000 Test Kit 6-drug panel (USA version)	83 19 965
Dräger DrugTest 5000 Test Kit 2-drug panel*	83 19 990
20 stk. komplette Test Kits	


Tilbehør

Dräger DCD 5000-enhet for oppsamling av orale væskeprøver	83 19 910
---	-----------

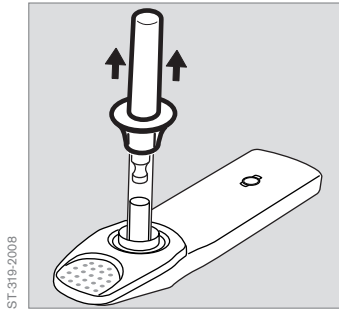Dräger DrugTest 5000 – utføres i fem enkle trinn:


ST-319-2008

Fjern den beskyttende hetten

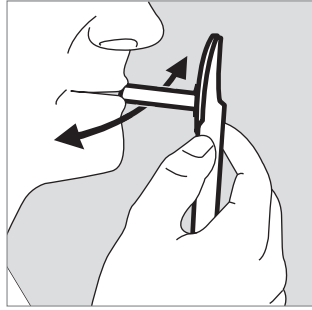


ST-320-2008

Plasser samleren inne i munnen

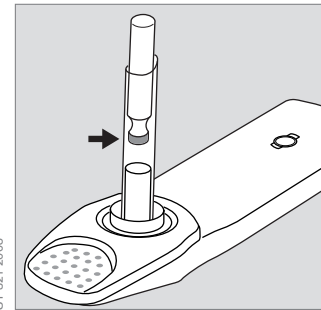


ST-321-2008

Den innebygde indikatoren blir blå

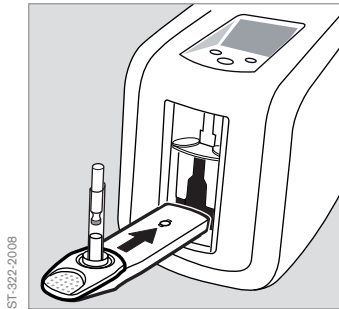

ST-322-2008

Testkassett og patron plasseres i analysatoren

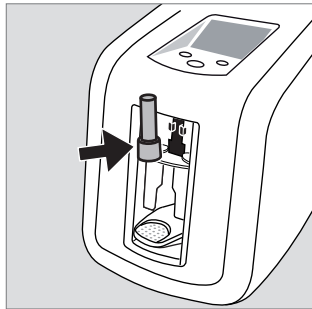

ST-323-2008

Resultatet vil vises tydelig

OPPBEVARING OG STABILITET

Testkittet må oppbevares ved en temperatur mellom 4 og 30 °C (39 til 86 °F) i den originale folieposen. Ikke bruk testkittet hvis folieposen er skadet. Testkittet må brukes straks etter pakningen er åpnet og må ikke brukes etter utløpt dato, som vises tydelig på folieposen.

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland

www.draeger.com

SALES INTERNATIONAL**NORWAY**

Dräger Norge AS
Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Norge
Tel +47 41 40 24 00
safety.no@draeger.com

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact

