


Dräger Evita® Família V Sensor de fluxo e válvula expiratória Desmontagem/Montagem



Montagem/Desmontagem Sensor de fluxo

<p>1 Abra a tampa levantando-a pela extremidade inferior.</p>  <p>Feche a tampa. 3</p>	<p>2 Empurre o sensor de fluxo para a esquerda até o fim.</p>  <p>Empurre o sensor de fluxo até encaixar na conexão. 2</p>	<p>3 Retire o sensor de fluxo do encaixe.</p>  <p>Coloque o sensor de fluxo no encaixe. 1</p>
--	--	---

Desmontagem/Montagem Válvula expiratória*

<p>1 Gire o anel de travamento para a esquerda até o fim.</p>  <p>Gire o anel de travamento para a direita até ouvir um estalo indicando o encaixe correto. 5</p>	<p>2 Desencaixe a válvula expiratória.</p>  <p>Gire o anel de travamento para a esquerda até o fim, empurre a válvula expiratória até encaixar na conexão. 4</p>	<p>3 Retire a cobertura do sensor da válvula expiratória.</p>  <p>Coloque a cobertura do sensor de fluxo na válvula expiratória. 3</p>
<p>4 Retire o diafragma.</p>  <p>Coloque o diafragma na extremidade da estrutura da válvula expiratória. Confirme que o encaixe está correto. 2</p>	<p>5 Retire e esvazie o recipiente do coletor de água.</p>  <p>Conecte o recipiente do coletor de água. 1</p>	

* A válvula expiratória neonatal também pode ser usada com o ventilador Evita® Família V. Para obter informações sobre o reprocessamento manual da válvula expiratória neonatal, consulte as instruções do Babylog.

Este guia não substitui nem altera as instruções de uso. Consulte sempre as instruções de reprocessamento presentes nas versões mais recentes das instruções de uso dos componentes. As instruções de uso e as diretrizes e políticas hospitalares precisam ser observadas sempre.

Dräger Evita® Família V


Sensor de fluxo

Instrução de reprocessamento

Limpeza manual




- 1** Prepare a solução de limpeza e desinfetante de acordo com as instruções do fabricante.

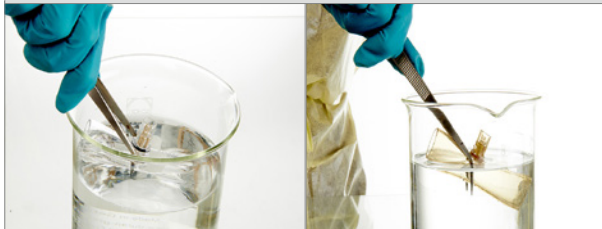

Coloque o sensor de fluxo no agente de limpeza.

- 2** Gire o sensor de fluxo nos dois sentidos, pelo menos 3 vezes. Certifique-se de que o agente de limpeza alcance todas as superfícies e espaços internos.

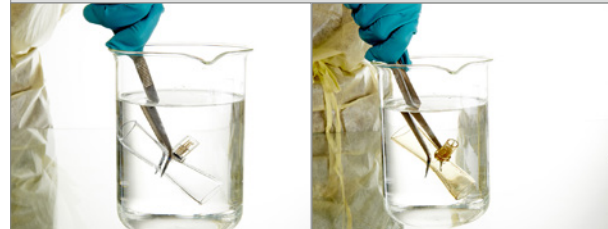


Certifique-se de que todas as superfícies e espaços internos estão em contato com a solução de limpeza. Ao final do tempo de contato especificado, gire o sensor de fluxo nos dois sentidos, pelo menos 3 vezes.

- 3** Depois do tempo de contato, enxágue o sensor de fluxo no banho de água (pelo menos água de qualidade potável).




Repita até não haver mais resíduos visíveis de agentes de limpeza.

- 4** Agite com cuidado para retirar o resíduo de água.

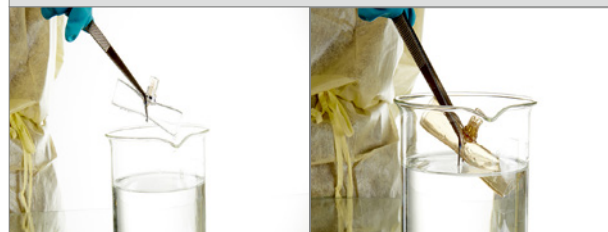

Confira se o sensor de fluxo tem sujidades visíveis e repita as etapas se necessário.

- 5** Confira se o sensor de fluxo não tem danos visíveis, prestando atenção especial aos fios medidores e seus pinos; substitua-os se necessário.

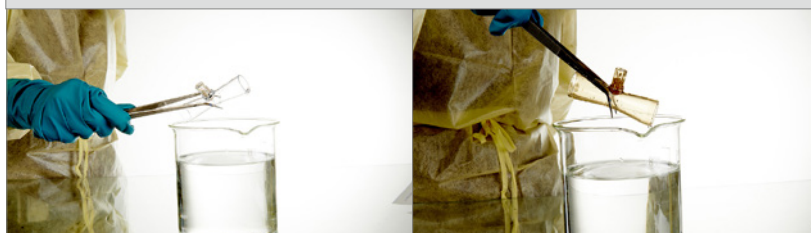

Espera o sensor de fluxo secar completamente.

Dräger Evita® Família V

Desinfecção

Limpeza em máquina



Desinfecção por imersão

- 1 Coloque o sensor de fluxo no desinfetante. Observe o tempo de contato especificado.
- 2 Ao início do tempo de contato, gire o sensor de fluxo nos dois sentidos, pelo menos 3 vezes. Certifique-se de que o desinfetante alcance todas as superfícies e espaços internos.
- 3 Ao final do tempo de contato, gire o sensor de fluxo nos dois sentidos, pelo menos 3 vezes.
- 4 Depois do tempo de contato, enxágue o sensor de fluxo no banho de água (pelo menos água de qualidade potável) até que não seja mais possível detectar resíduo de desinfetante.
- 5 Agite com cuidado para retirar o resíduo de água. Espere o sensor de fluxo secar completamente.
- 6 Confira se o sensor de fluxo não tem danos visíveis, prestando atenção especial aos fios medidores e seus pinos; substitua-os se necessário.

Se precisar de descrições visuais, veja as instruções de reprocessamento para limpeza manual.

Limpeza em máquina

Posicione a válvula expiratória como mostrado. Posicione os componentes (cobertura do sensor de fluxo, diafragma, recipiente do coletor de água) de modo estável.



Garanta que todas as superfícies e espaços internos sejam completamente enxaguados e que a água possa escorrer livremente.

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemanha

Este guia não substitui nem altera as instruções de uso. Consulte sempre as instruções de reprocessamento presentes nas versões mais recentes das instruções de uso dos componentes. As instruções de uso e as diretrizes e políticas hospitalares precisam ser observadas sempre.

Dräger. Tecnologia para a vida.