

Complément

Fabius - famille

AVERTISSEMENT

Pour utiliser correctement ce dispositif médical, veuillez lire et respecter les instructions de la notice d'utilisation et de ce supplément.

**Station d'anesthésie
Logiciel 3.n**

Supplément de la notice d'utilisation

Dispositif	Référence de pièce	Édition :
Fabius Tiro	9054607	Jusqu'à 1. Edition
Fabius GS <i>premium</i>	9054631	Jusqu'à 1. Edition
Fabius MRI	9054655	Jusqu'à 1. Edition
Fabius plus	9054678	Jusqu'à 1. Edition
Fabius <i>plus</i> XL	9054700	Jusqu'à 1. Edition

- Veuillez conserver ce supplément avec la notice d'utilisation de l'appareil médical.

Le supplément actualise les informations de la notice d'utilisation à travers les chapitres suivants :

Configuration

Configuration du mode Attente

Test des fuites

Le texte suivant a changé :

Test des valves de sécurité

Ce test contrôle l'intégrité fonctionnelle des valves de sécurité.

Les résultats du test s'affichent sur l'écran avec les résultats du test des fuites (B).

Recherche de panne en cas d'échec du test de la valve de sécurité

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

AVERTISSEMENT

Risque de surpression ou de pression négative inattendue

Une valve de sécurité encrassée ou hors service ne peut pas compenser les brusques surpressions ou pressions négatives survenant dans le système patient.

Effectuer le test de fuite avant de démarrer le dispositif. Prêter attention aux résultats du test pour valves de sécurité.


- Répéter le test des fuites. Ne pas utiliser le dispositif en cas d'échec répété du test de la valve de sécurité. Contacter DrägerService ou le partenaire de service local autorisé.

Page *Config. Attente*

Modification des configurations


Changement d'unité de pression

Le texte suivant a changé :

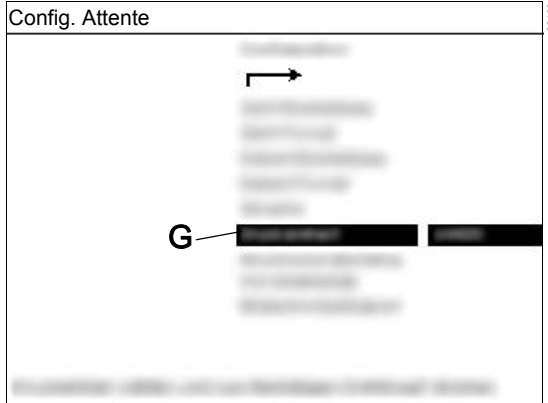

- 1 Sélectionner l'option de menu **Unité de pression** (G) et valider.

L'écran d'entrée du mot de passe s'ouvre.

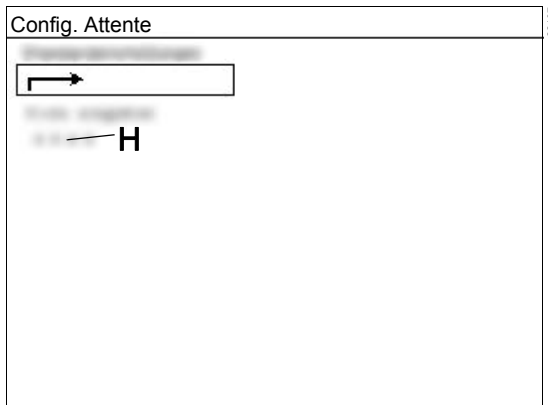

- 2 Saisir le mot de passe (H) et valider.

Les unités suivantes peuvent être sélectionnées :

- **hPa**
- **cmH₂O**
- **mbar**
- **kPa**

- 3 Sélectionner une nouvelle unité et valider.

La fenêtre se ferme.



Fabricant



Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck

Allemagne



+49 451 8 82-0

FAX

+49 451 8 82-2080



<http://www.draeger.com>

9056104 – fr

© Drägerwerk AG & Co. KGaA

Edition/Edition: 1 – 2017-07

Dräger se réserve le droit d'apporter des
modifications au dispositif médical sans préavis.

