

Dodatni dokument

# Obitelj Fabius

## UPOZORENJE

Kako biste mogli pravilno primijeniti ovaj medicinski uređaj, pročitajte i pridržavajte se uputa za rad i ovog dodatka.

## Anesteziološka radna stanica Program (softver) 3.n

## Dodatak uputama za rad

---

Uređaj	Broj dijela	Izdanje
Fabius Tiro	9054608	Do 1. Izdanje
Fabius GS <i>premium</i>	9054632	Do 1. Izdanje
Fabius MRI	9054656	Do 1. Izdanje
Fabius <i>plus</i> XL	9054701	Do 1. Izdanje

- Čuvajte ovaj dodatak zajedno s uputama za rad medicinskog uređaja.

Dodatak ažurira informacije sadržane u uputama za rad u sljedećim poglavljima:

## Konfiguracija

---

### Konfiguracija u načinu rada Pripravan

---

#### Testiranje propuštanja

Izmijenjen je sljedeći tekst:

##### Testiranje sigurnosnog ventila

Ovo testiranje provjerava ispravnost rada sigurnosnih ventila.

Rezultati testiranja prikazuju se na ekranu s rezultatima testiranja propuštanja (B).

#### Rješavanje problema pri neuspjelom testiranju sigurnosnog ventila

Izmijenjene su sljedeće sigurnosne informacije:

##### UPOZORENJE

**Opasnost od neočekivane pojave nadtlaka ili podtlaka**

**Prljavi ili neispravni sigurnosni ventil ne može kompenzirati iznenadnu pojavu nadtlaka ili podtlaka u respiracijskom sustavu.**

**Provedite testiranje propuštanja prije pokretanja uređaja. Obratite pažnju na rezultate testiranja sigurnosnih ventila.**

- Ponovite testiranje propuštanja. Ne upotrebljavajte uređaj ako je testiranje sigurnosnih ventila i dalje neuspjelo. Kontaktirajte DrägerService ili ovlaštenog lokalnog servisnog partnera

## Stranica *Trajni postavi*

### Promjena konfiguracija


#### Promjena jedinice za tlak

Izmijenjen je sljedeći tekst:



- 1 Odaberite stavku izbornika **Jedinica za tlak** (G) i potvrdite.

Otvara se ekran s upitom za lozinku.

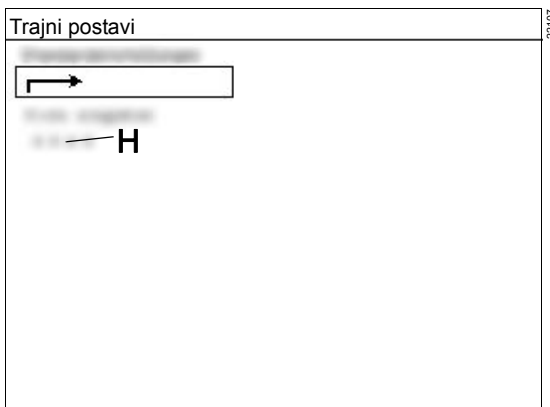

- 2 Unesite lozinku (H) i potvrdite.

Sljedeće se mjerne jedinice mogu odabrati:

- **hPa**
- **cmH<sub>2</sub>O**
- **mbar**
- **kPa**

- 3 Odaberite novu mjernu jedinicu i potvrdite.

Prozor se zatvara.



Proizvođač



**Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53 – 55

D-23542 Lübeck

Njemačka



+49 451 8 82-0

FAKS

+49 451 8 82-2080



<http://www.draeger.com>

**9056112** – hr

© Drägerwerk AG & Co. KGaA

Izdanje/Edition: 1 – 2017-07

Dräger pridržava pravo izmjena medicinskog uređaja bez prethodne najave.

