

Ek

Fabius ailesi

UYARI

Bu tıbbi cihazı uygun şekilde kullanabilmek için, kullanma kılavuzunu ve bu eki okuyun ve harfiyen takip edin.

Anestezi iş istasyonu Yazılım 3.n

Kullanma kılavuzunun eki

Cihaz	Parça numarası	Baskı
Fabius Tiro	9054622	1'a kadar. Baskı
Fabius GS <i>premium</i>	9054645	1'a kadar. Baskı
Fabius MRI	9054670	1'a kadar. Baskı
Fabius plus	9054692	1'a kadar. Baskı
Fabius <i>plus</i> XL	9054716	1'a kadar. Baskı

- Bu eki tıbbi cihazın kullanma kılavuzuyla birlikte saklayın.

Ekte, kullanma kılavuzunun şu bölümlerindeki bilgiler güncellenmektedir:

Konfigürasyon

Bekleme modundaki konfigürasyon

Kaçak testi

Aşağıdaki metin değiştirildi:

Emniyet valfi testi

Bu test, emniyet valfinin fonksiyonel bütünlüğünü kontrol eder.

Test sonuçları ekranda kaçak testi sonuçları (B) ile birlikte görüntülenir.

Emniyet valfi testi başarısız olursa sorun giderme

Aşağıdaki güvenlik bilgisi değiştirildi:

UYARI

Beklenmedik şekilde aşırı basınç veya negatif basınç oluşma riski

Kirlenmiş veya çalışmayan bir emniyet valfi, solunum sisteminde aniden ortaya çıkan aşırı basıncı veya negatif basıncı dengeleyemez.

Cihazı çalıştırmadan önce kaçak testi yapın. Emniyet valfinin test sonuçlarına dikkat edin.


- Kaçak testini tekrarlayın. Emniyet valfi testi sürekli hata veriyorsa cihazı çalıştırmayın. DrägerService veya yetkili yerel servis ortağıyla irtibata geçin

Sayfa Standby Konfig.

Konfigürasyonların değiştirilmesi


Basınç biriminin değiştirilmesi

Aşağıdaki metin değiştirildi:

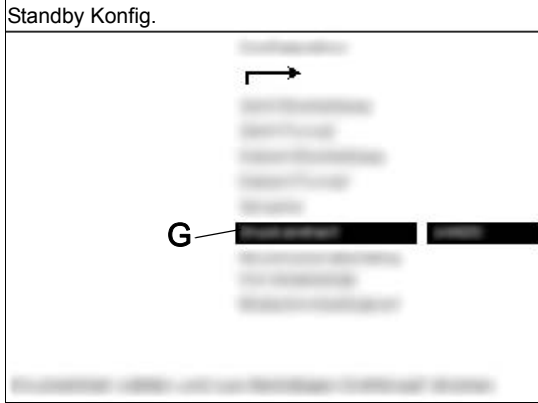

1 *Basınç Birimi* menü öğesini (G) seçin ve onaylayın.

Şifre sorgulama ekranı açılacaktır.

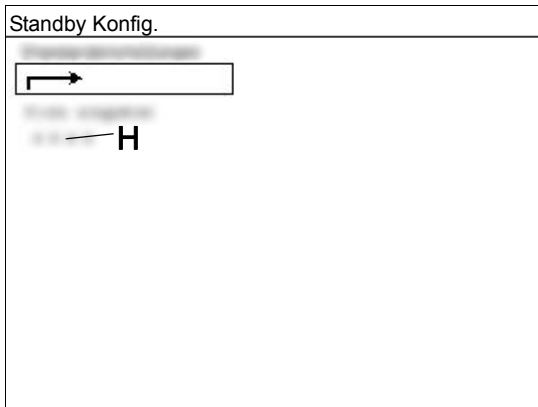

2 Şifreyi girin (H) ve onaylayın.

Aşağıdaki birimler seçilebilir:

- *hPa*
- *cmH₂O*
- *mbar*
- *kPa*

3 Yeni birimi seçin ve onaylayın.

Pencere kapalıdır.



Üretici



Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53 – 55

D-23542 Lübeck

Almanya



+49 451 8 82-0

FAKS

+49 451 8 82-2080



<http://www.draeger.com>

9056129 – tr

© Drägerwerk AG & Co. KGaA

Baskı/Edition: 1 – 2017-07

Dräger, önceden bilgi vermeksizin tıbbi cihazda
değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

