

Linea Living

Vægforsyningsenheder til medicinsk benyttede rum.



Brugsanvisning

ADVARSEL!

Brugeren skal læse denne brugsanvisning omhyggeligt igennem samt gøre sig fortrolig med produktets funktionsomfang, før brug af produktet påbegyndes.



Definitioner

ADVARSEL!

En vigtig information vedrørende en potentielt farlig situation, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis dens forekomst ikke forhindres.

FORSIGTIG!

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
En vigtig information vedrørende en potentielt farlig situation, der kan føre til en mindre betydelig eller moderat kvæstelse af brugeren eller patienten hhv. til beskadigelse af det medicinske produkt eller andre genstande, hvis det ikke forhindres, at denne situation opstår.

HENVISNING:

En yderligere information, der skal tjene til at undgå vanskeligheder i forbindelse med betjening af det medicinske produkt.



Indholdsfortegnelse



Vedrørende brugerens og patientens sikkerhed

Overhold brugsanvisningen ned i mindste detalje

ADVARSEL!

Enhver anvendelse af produktet forudsætter nøjagtigt kendskab dertil samt overholdelse af alle kapitler i denne brugsanvisning. Det medicinske produkt må udelukkende anvendes til det formål, der er anført på side 6 under "Formålsbestemmelse". Alle henvisninger, der er kendetegnet med **ADVARSEL** eller **FORSIGTIG**, samt henvisningerne på skiltene på det medicinske produkt skal overholdes ned i mindste detalje.

Tilbehør

ADVARSEL!

Ved anvendelse af tilbehøret på normskinnerne skal de anførte maksimale belastninger og momenter overholdes.

Istandholdelse

HENVISNING:

Det er ikke nødvendigt at inspicere eller vedligeholde vægkanalen regelmæssigt.

Den driftsansvarlige skal regelmæssigt gennemføre en inspektion af gas- og elektrokomponenterne.

De indeholdte komponenter i de medicinske gasanlæg (udtagningssteder), el-forsyning (stikdåser) og datateknik (svagstrømsforsyning) skal gennemføres som et led i inspektionen af de pågældende anlæg.

Patientsikkerhed

I forbindelse med det medicinske produkt, den dertilhørende dokumentation og skiltene på det medicinske produkt går man ud fra, at det medicinske produkt udelukkende erhverves og anvendes af fagfolk, samt at den uddannede bruger er bekendt med det medicinske produkts grundlæggende funktioner.

Anvisningerne vedrørende brugen samt de henvisninger, der er afmærket med ADVARSEL eller FORSIGTIG, er derfor i det væsentlige begrænset til det medicinske produkts særlige egenskaber.

Denne brugsanvisning indeholder ingen henvisninger til farer, der er åbenbare for medicinsk faguddannet personale, samt til konsekvenserne af ukorrekt brug af apparaturet og mulige bivirkninger hos patienter med forskellige primære sygdomme.

Det kan være farligt at ændre det medicinske produkt eller at anvende det ukorrekt.

Ansvar for funktion hhv. skader

Ansvar for apparatets funktion overgår i hvert enkelt tilfælde til ejeren eller den driftsansvarlige, såfremt apparatet ikke er monteret fagligt korrekt.

VTS påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået pga. ikke-overholdelse af de ovenstående henvisninger. Garanti- og ansvarsvilkårene i VTS' salgs- og leveringsbetingelser udvides ikke af ovenstående henvisninger.

VTS Vision Technology Systems
GmbH

Formålsbestemmelse

Linea – vægforsyningsenheder til medicinsk benyttede rum.

- Til forsyning af medicinske produkter med elektrisk energi og med medicinske gasser.
- Til forsyning af indirekte rumbelysning, læse- og undersøgelseslys samt nat- og orienteringslys.
- Til kommunikation og dataoverførsel.
- Til ergonomisk placering af medicinske apparater på normapparatskinnerne.

Beskrivelse

Forsyning af medicinsk benyttede rum med belysning, medicinske gasser og el-tilslutninger.

Varianter

MVE-A – Normalpleje

Vægforsyningsenhed alt efter udstyr med en forsyningskanal samt direkte og indirekte belysning.

Belastning

ADVARSEL!

Fare for person- og tingsskader ved overskridelse af belastningen!

Anførelsen af den maksimale belastning på systemet må ikke overskrides.

Overhold den maksimale belastning!

Maksimallast på standardskinner er 50 kg pr. skinnemeter hhv. 25 kg pr. enhed ophængt på standardskinne. For tilbehør med forlængerarm hhv. tilbehør med løfteeffekt er maksimum torque 5 Nm per meter. Maksimallast på stængerne er 100 kg pr. stang.

Ikke-tilladt anvendelse

ADVARSEL!

Genstande, der er lagt eller stillet på vægkanalen (f.eks. bægre med væsker, skrivemateriale, beklædningsgenstande osv.) kan falde ned.

Fare for kvæstelser!

Fare for skoldning ved nedfaldende varme væsker!

Fare for kortslutning!

Vægforsyningsskinnen må ikke anvendes til fralægning af genstande.

Valgfrit:

Linea fås også med en trækkontakt med en træksnor til lysstyring i stedet for en lavspændingshåndbetjener.

Trækkontakt

ADVARSEL!

En nedhængende træksnor kan udgøre en farekilde især for børn. Kvælningsfare!

Vær særlig omhyggelig ved opsyn med patienterne!

HENVISNING:

Af hygiejniske grunde skal trækkontaktens træksnor regelmæssigt rengøres/desinficeres.

Drift

ADVARSEL!

O₂ og lattergas er brandfremmende gasser.

Forhøjet brandfare!

Terminalenheden og stikket til O₂ og lattergas må ikke bringes i berøring med olie, fedt eller brændbare væsker.

Udtag gasser


- Kontrollér, at stikkets afmærkning stemmer overens



- med terminalenhedens
udløsningsbøsning
- Kontrollér, at gasforsynings-
slangen i stikket er fast tilsluttet
på det medicinske apparat.


Sæt stikket i parkeringsposition

- Sæt stikket ind i terminalenheden og tryk på den, til den klikker ind i 1. indgreb.

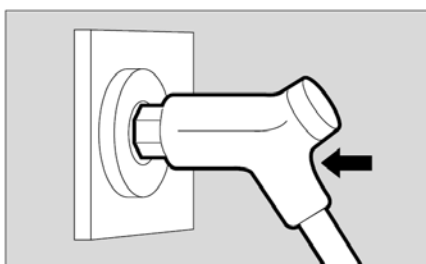


Udtag gas

- Tryk på stikket, til det klikker ind i 2. indgreb.

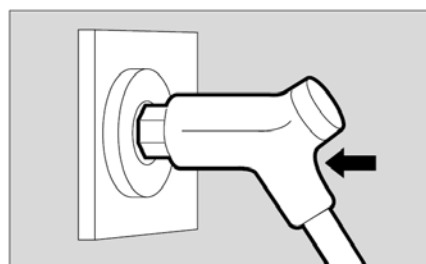


Afbryd gasudtagelsen

- Tryk let på udløsningsbøsningen: Stikket rykker tilbage i systemet (parkeringsposition).

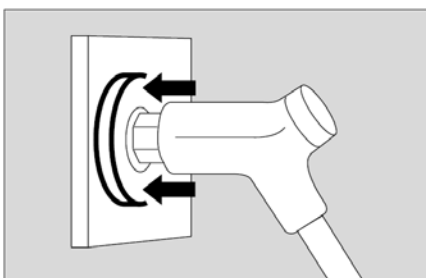

Skil stikforbindelsen helt

- Tryk på udløsningsbøsningen og træk **samtidigt** stikket ud af terminalenheden.

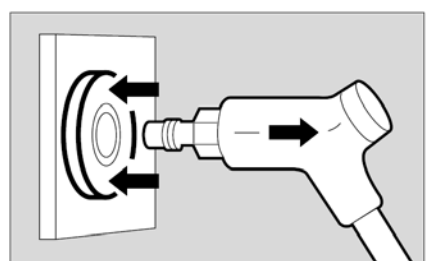

Rengøring/desinficering

ADVARSEL!

Elektriske ledninger!
Der er fare for elektrisk stød.
Åbn ikke kabinettet ved rengøring.

ADVARSEL!

Indtrængende væske kan forstyrre funktionen af apparatet eller beskadige apparatet.
Patientfare!
Fare for kortslutning!

Desinficér kun delene med fugtig aftørring og pas på, at der ikke trænger væsker ind.

FORSIGTIG!

Nogle rengøringsmidler frigør klor eller ilt.

Sundhedsfare!

Anvend ikke rengøringsmidler, der frigør klor eller ilt.

FORSIGTIG!

Apparatet består delvist af materialer, der ikke er bestandige mod bestemte bestanddele af overfladedesinfektionsmidler.

Fare for overflade- og materialebeskadigelser!

Anvend ingen præparater på basis af fenoler som halogen- hhv. iltudskillende midler!

Brug ingen opløsningsmidler som benzin eller æter!



Overfladedesinfektionsmidler på materialebasis af aldehyder og kvaternære ammoniumforbindelser, disse er bl.a. anført på den aktuelle liste fra "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie" (Tysk selskab for hygiejne og mikrobiologi).



Teknisk miljø

Temperatur i drift: +15 °C til +40 °C,
Transport og opbevaring: -20 °C til +65 °C
Rel. fugtighed: 30 til 95 %



Direktiv 93/42/EØF om medicinske
produkter
Tillæg IX, klasse IIb

Overholdte standarder

ISO 11197, EN 60601-1 og EN 1480
HTM 2015 og 2022

UMDNS 16-997

V.T.S

Vision Technology Systems GmbH

Niedereimerfeld 31

59823 Arnsberg

Tyskland

Tlf.: +49 2932 - 89 69 99

Fax: +49 2932 - 89 69 69