

Mova® kolica 3.0 Kolica za medicinsku opremu

Pomoću Mova® kolica birate pokretno, fleksibilno i sigurno radno mjesto. Olakšajte proces rada i smanjite radno opterećenje osoblja u operacijskoj sali i jedinici intenzivnog liječenja pomoću učinkovitog i pokretnog sustava za transport i priključivanje uređaja.



Prednosti

Budite fleksibilni!

Svoju opremu i pribor složite na Mova kolica u skladu s postupcima koje obavljate: ovako složena oprema moći će se upotrebljavati na raznim mjestima u bolnici, odmah pored kreveta pacijenta. Mobilnost koja se ostvaruje Mova kolicima omogućuje optimalnu upotrebu opreme. Ako se Mova kolica našeg partnera tvrtke ITD upotrebljavaju zajedno sa stropnim opskrbnim jedinicama Dräger (npr. Movita), oprema će se moći jednostavno postaviti u sobu bez zapreka. Posebna značajka: Mova kolica Lift pružaju mogućnost podizanja opreme s poda! Prednosti:

- siguran i jednostavan sustav priključivanja
- kolica se mogu podignuti do 60 cm iznad poda
- ispravno postavljanje na željenu radnu visinu
- funkcija podizanja opreme s poda povećava higijenu u operacijskoj sali
- brzo i izravno spajanje na sve priključke struje i plinova
- nema dugih kabela ili crijeva
- smanjena opasnost od spoticanja
- veća razina sigurnosti, posebice prilikom premještanja.

Sigurno i uredno

Kada su podignuta, Mova kolica Lift omogućuju brzu i temeljitu dezinfekciju poda. Nesreće zbog spoticanja o kabele i crijeva koji se nalaze na podu postaju stvar prošlosti. Ovo je posebno korisno prilikom premještanja stropnih opskrbnih jedinica. Priključci struje i plinova cijelo vrijeme ostaju priključeni. Mala je opasnost od nehotičnog odspajanja. Isto se odnosi i na verziju za priključivanje Mova kolica na opskrbnu jedinicu bez podizanja, kada se Mova kolica guraju po podu zajedno s opskrbnom jedinicom kao jedan uređaj.

Na Mova kolica se može optimalno smjestiti Vaša cijelokupna endoskopska oprema ili oprema za minimalno invazivnu kirurgiju. Dostupne su dvije širine kolica: 450 mm ili 650 mm. Rukovanje Mova kolicima zajedno sa stropnom opskrbnom jedinicom Dräger je jednostavno:

sustav za podizanje Dräger omogućuje brzo i sigurno postavljanje Mova kolica Lift na stropnu opskrbnu jedinicu. Kolica pomičite do stropne opskrbne jedinice koristeći ručke smještene na bočnim stranicama kolica. Konusni zatici za lakše pozicioniranje kolica pomažu ispravnom postavljanju na stropnu opskrbnu jedinicu. Poseban magnetski i mehanički sigurnosni sustav omogućuje precizno spajanje kolica i sprečava njihovo nehotično odspajanje. Mova kolica Lift se mogu postaviti na ergonomsku radnu visinu. To vam omogućuje siguran i udoban rad s opremom u operacijskoj sali.

Niža Mova kolica su idealna za postavljanje radnog mjesta s respiratorom. Hemodinamski monitor može se ergonomski postaviti točno iznad kolica pomoću Movita stupa ili Movita regala za opremu.

Mova kolica mogu se na dva načina priključiti na opskrbnu jedinicu:

- **Uz podizanje Mova kolica:** Mova kolica Lift mogu se brzo i sigurno postaviti na stropnu opskrbnu jedinicu. Spojni mehanizam osigurava da stropna opskrbna jedinica sigurno podiže kolica s opremom. Alternativa podizanju je priključivanje bez podizanja.

Prednosti

- **Priključivanje bez podizanja:** kolica se pomoću ručki smještenih na boku kolica mogu postaviti uz opskrbnu jedinicu. Mova kolica se priključuju na okomite šine na prednjoj strani stupa. Kolica se sada mogu pomicati zajedno s opskrbnom jedinicom kao jedan uređaj. Mova kolica mogu se brzo odvojiti tako da se povuče gumb na njihovom prednjem dijelu.

Mobilnost

Mova kolica / opskrbni sustav jamče vrlo jednostavno postavljanje opreme za respiraciju. I u verziji s priključivanjem bez podizanja, zajamčeno je sigurno priključivanje na dovod plina i električne energije i ne može se nehote odspojiti.

Tehnički podaci

	Mova® kolica Lift – 650	Mova® kolica Lift – 450	Mova® kolica, niska	Mova® kolica za priključak bez podizanja
Broj narudžbe	KU.4489.903	KU.5063.903	KU.5064.903	KU.4475.903
Spajanje na opskrbnu jedinicu	Priključak za podizanje	Priključak za podizanje	Priključak za podizanje	Priključak bez podizanja
Visina podizanja iznad poda	60 cm	60 cm	60 cm	–
Težina	62,5 kg	54,6 kg	41,8 kg	33,5 kg
Maks. nosivost	120 kg	120 kg	100 kg	100 kg
Dimenzije (V x Š x D)	1514 x 779 x 653 mm	1514 x 582 x 653 mm	977 x 582 x 653 mm	808 x 582 x 653 mm
Broj polica	4	4	2	2
Dimenzije police (Š x D)	650 x 491 mm	450 x 491 mm	450 x 491 mm	450 x 491 mm

Ovo su naše četiri osnovne inačice koje se mogu prilagoditi Vašim potrebama.

Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.

Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

ZA HRVATSKU
 Dräger Medical Croatia d.o.o.
 Avenija Većeslava Holjevca 40
 100 10 Zagreb
 Tel +385 1 65 99 444
 Fax +385 1 65 99 403
prodaja.mt@draeger.com

Dräger - South East Europe
 Regional Management
 South East Europe
 Perfektastrasse 67
 A-1230 Beč, Austrija
 Tel +43 1 60 90 4809
 Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Proizvođač:
 ITD GmbH
 Sportplatzstraße 3
 84381 Johanniskirchen
 Njemačka

Pronađite svog regionalnog
 prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt

