

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE


WaterLock® 2 / Infinity ID WaterLock® 2

Connexion du piège à eau


1. Sortir le piège à eau neuf de son emballage.
2. Noter la date du jour sur le devant du piège à eau.

REMARQUE

En cas d'utilisation du piège à eau Infinity ID WaterLock 2 avec un appareil de la gamme Infinity ID de Dräger, l'étape n° 2 n'est pas nécessaire, car la durée maximale d'utilisation du piège à eau est suivie automatiquement.

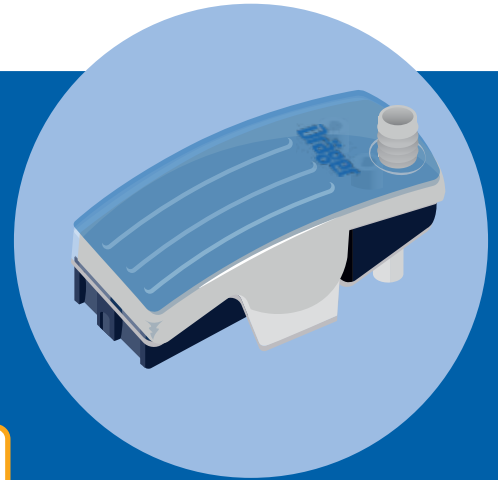

3. Tenir le piège à eau **(A)** au niveau des poignées cannelées et l'insérer dans le support de sorte qu'un déclic se fasse entendre.
4. Connecter la ligne de prélèvement **(B)** au raccord Luer Lock du piège à eau.

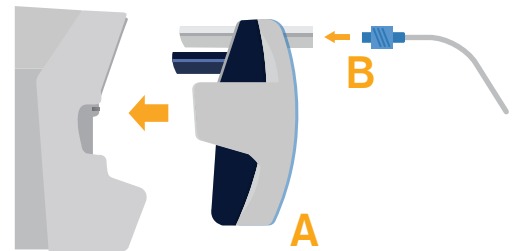

Remplacement du piège à eau


- Lorsque les 4 semaines maximum d'utilisation sont écoulées.
- En cas d'affichage d'un message d'erreur sur le moniteur patient ou la station d'anesthésie.
- Si la vidange n'a pas supprimé le message d'erreur sur le moniteur patient ou la station d'anesthésie.
- S'il est très sale.
- Si les joints expansifs des raccords sont devenus bleus.

Pour connecter le nouveau piège à eau, suivre les consignes indiquées ci-dessus (Connexion du piège à eau).


	Référence
WaterLock® 2 Lot de 12	6872130
Infinity ID WaterLock® 2 (lot de 12)	6872020
Ligne de prélèvement à usage limité (lot de 10)	8290286

Vidange du piège à eau

1. Retirer la ligne de prélèvement du piège à eau.
2. Enfoncer les poignées du piège à eau, puis tirer.
3. Insérer dans le connecteur bleu une seringue vide sans canule (C) avec une capacité d'au moins 20 ml.

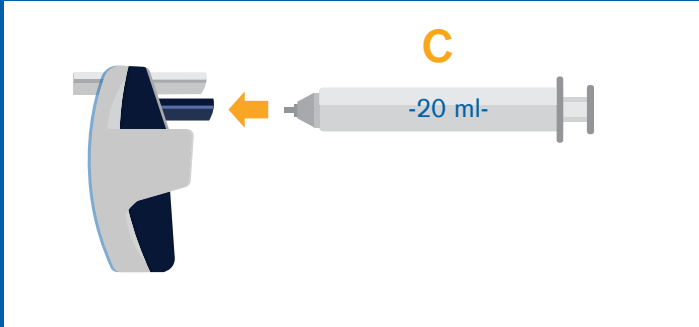

4. Vidanger l'eau, retirer la seringue pleine et la mettre au rebut avec les déchets infectieux.

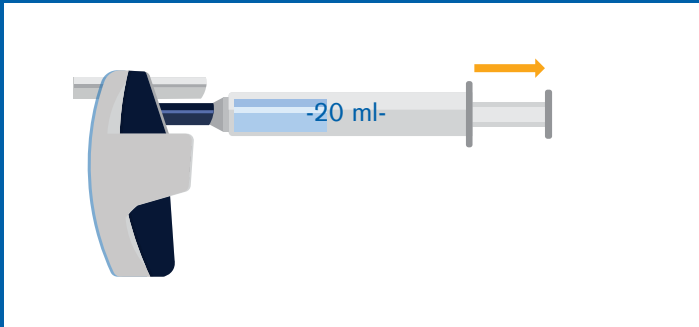

5. Insérer de nouveau le piège à eau dans le support ou l'adaptateur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, puis raccorder la ligne de prélèvement.

AVERTISSEMENT Risque d'infection



Le liquide à l'intérieur du piège à eau est susceptible d'être contaminé. Il doit être manipulé et mis au rebut avec précaution. Mettre au rebut le liquide de façon appropriée et conforme à la réglementation locale.

AVERTISSEMENT Risque d'infection



Si la ligne de prélèvement reste connectée lors du retrait du piège à eau, du liquide contaminé risque de s'échapper du piège à eau. Débrancher la ligne de prélèvement du piège à eau avant de retirer le piège à eau de l'appareil médical.

ATTENTION Risque de défaillance de la mesure des gaz



Lorsque le piège à eau est plein, la mesure des gaz est susceptible de dysfonctionner. Contrôler régulièrement le niveau de remplissage du piège à eau et vider le piège si nécessaire.

Dräger. La technologie pour la vie.

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : I
Les produits de classe I sont marqués CE par le fabricant suivant l'annexe VII de la directive 93/42/CEE. Information pour le bon usage du dispositif médical : merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.

Remarque : Ce guide de prise en main rapide ne saurait remplacer la notice d'utilisation. Toute manipulation du dispositif médical présuppose la connaissance et l'observation exactes de la notice d'utilisation.