



## Aksesuar ve Sarf Malzemeleri Parça Kodları Savina /Savina 300 Classic /Select Ventilatör

### Flow Sensor, Spirolog:

Akış Sensörü, Parça Kodu: 8403735, 5'li kutu  
Sterilize edilemez, Sekusept,powder,classic ile %4 konsantrasyonda  
15dk. daldırarak dezenfeksiyon veya manuel temizleme



### Flow Sensor, Spirolife :

Akış Sensörü, Parça Kodu: MK01900  
Buhar sterilizasyonu ve otoklav (134° - 5 dk) veya sekusept powder  
classic ile %4 konsantrasyonda 15dk. daldırarak dezenfeksiyon veya  
manuel temizleme



### Ekspirasyon Valfi Tek Kullanımlık:

Parça Kodu: MP01060, 10'lu kutu  
Tek kullanımlık, her yeni hastayla değiştirilmelidir  
Tek hasta kullanımı 7 gündür



### Ekspirasyon Valfi Çok Kullanımlık:

Parça Kodu : 8417050 (Savina 300 Classic / Select)  
Parça Kodu : 8413660 (Savina)  
Buhar sterilizasyonu ve otoklav (134° - 5 dk)



### CO2 Sensörü:

Parça Kodu: 6871950



### EtCO<sub>2</sub> sensör yerleştirme küveti:

Parça Kodu: yetişkin 6870279 , pediatrik 6870280  
Steril veya otoklav edilebilir yetişkin veya pediatrik hasta grubu



### EtCO<sub>2</sub> sensör yerleştirme küveti:

Parça Kodu: yetişkin MP01062 , pediatrik MP01063  
Tek kullanımlık yetişkin veya pediatrik hasta grubu





## Aksesuar ve Sarf Malzemeleri Parça Kodları Savina /Savina 300 Classic /Select Ventilatör

### Mekanik Filtre/HME Twinstar HEPA:

Yüksek bakteri ve virüs tutma kapasiteli ısı nem deęiřtirici

Parça Kodu: MP01801, 50'li paket

Y parçasında ve tek hastada 24 saat kullanım

Eđer HEPA özellikli filtre yoksa elektrostatik özellikli HMEF filtre kullanınız! (Sadece yetişkin hasta içindir)

Bakter tutma kapasitesi : 99.999%

Virüs tutma kapasitesi : 99.9999%



### Mekanik Filtre Safestar 55:

HME olmayan bakteri filtresi

Parça Kodu: MP01790- MP01785 50'li paket

Y parçasındaki HMEF veya HEPA özellikli bir filtreye ilave olarak cihazın ekspiryum tarafında kullanılabilir .

(Sadece yetişkin hasta içindir)

Bakter tutma kapasitesi : 99.9999%

Virüs tutma kapasitesi : 99.9999%



### Ekspirasyon Filtresi Infinity ID:

Parça Kodu: MP01781 (Savina 300 Classic / Select)

Tek hasta 24 saat kullanım

Cihazın ekspiryum tarafında kullanılır,bu ürün yoksa yerine mekanik bir filtre kullanılabilir (MP01790 veya MP01785)



### Solunum Devresi:

Tek kullanımlık çift su tutuculu 25'li paket

Parça Kodu: MP00334



### Istıcılı Solunum Devresi:

Tek kullanımlık 10'lu paket

Tek hat ısıtılmalı devre parça kodu : MP02607

Çift hat ısıtılmalı devre parça kodu: MP02606





## Aksesuar ve Sarf Malzemeleri Parça Kodları Savina /Savina 300 Classic /Select Ventilatör

### **NIV Maske ClassicStar :**

Tek hastada kullanılabilen non invaziv ventilasyon maskesi

Boylar: S, M , L ve XL

Parça Kodu: MP04711 (S), MP04712 (M), MP04713 (L),  
MP04714 (XL)

Tek hastada 30 gün kullanım



### **NIV Maske Novastar :**

5 hastada kullanılabilen non invaziv ventilasyon maskesi, jel yastıklı

Boylar: S, M , L ve XL

Parça Kodu: MP01579 (S), MP01580 (M), MP01581 (L),  
MP04705 (XL)

Temizleme ve dezenfeksiyon kılavuzuna göre temizlenip dezenfekte edilmelidir



### **NIV Total Face Maske ClassicStar :**

Tek hastada kullanılabilen tam yüz non invaziv ventilasyon maskesi, şişirilebilir. Diğer oronasal maskelerle dönüşümlü kullanılmalıdır.

Boylar S, M ve L

Parça Kodu: MP02910 (S), MP02911 (M), MP02912 (L)

Tek hastada 30 gün kullanım



### **Çok kullanımlık Nebulizer:**

pnömatik nebulizer, hava yolundan ilaç verilmesine imkan sağlar.

Hasta devresi üzerinde Y- parçasına en yakın noktada ve İnspiryum hattı üzerine konumlandırılır. Sterilizasyon mümkün (134° - 5 dk)

Parça Kodu: 8412935



### **Oksijen Sensörü:**

Parça Kodu: MX01049, 1 yıl miyatlıdır (Savina)

