

# ¿CONOCE USTED...?




## QuickSet

### ¿Qué es?

Con la función QuickSet es posible modificar un parámetro y observar un efecto de forma inmediata, sin necesidad de confirmación. QuickSet permite ajustar el parámetro en tiempo real, y observar también en tiempo real su comportamiento en la pantalla del ventilador.

### ¿Cómo se utiliza?

1. Seleccionar el parámetro
2. Esperar a que el botón pase a amarillo
3. Oprimir el mando rotatorio durante 1,5 segundos
4. El botón se pone verde con el anillo exterior de color amarillo
5. Girar el mando mientras se mantiene presionado
6. La configuración elegida se aplica inmediatamente

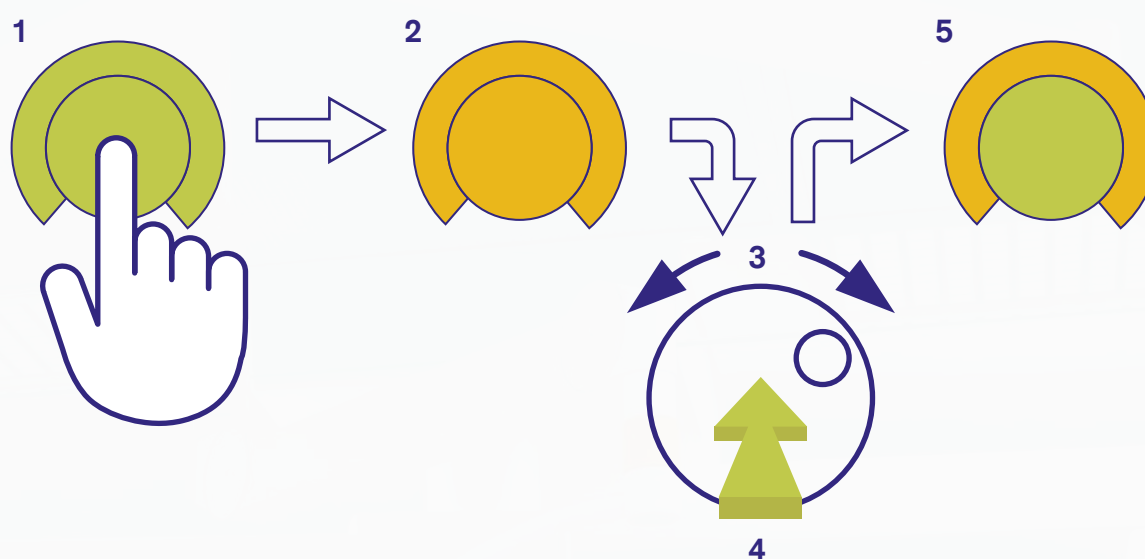


### ¿Cuál es su importancia?

Para algunas maniobras de reclutamiento es importante controlar los ajustes de los parámetros en tiempo real, sin perder tiempo confirmando y/o esperando a que cambien los valores de determinado parámetro.

### ¿En qué medida ayuda a mejorar los resultados?

QuickSet permite realizar maniobras de reclutamiento, p. ej. siguiendo el método de Lim. et al. de PEEP incremental, manteniendo la presión inspiratoria al mismo nivel.<sup>1</sup>

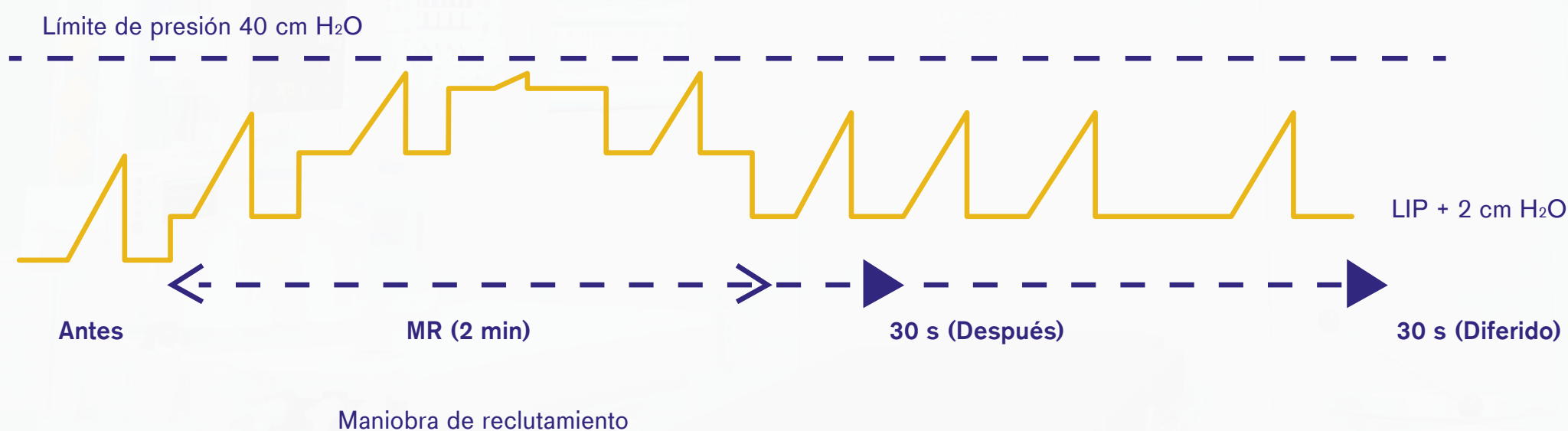

1. Lim et al., Morphometric Effects of the Recruitment Maneuver on Saline-lavaged Canine Lungs: A Computed Tomographic Analysis.