

LO SAPEVI?




QuickSet

Di che cosa si tratta?

QuickSet consente di modificare un parametro con effetto immediato, senza dover attendere alcuna conferma. QuickSet consente di regolare in tempo reale il parametro monitorandolo in tempo reale sullo schermo del ventilatore.

Come si usa?

1. Si seleziona il parametro
2. Il pulsante diventa di colore giallo
3. Si tiene premuta la manopola rotante per 1,5 secondi
4. Il pulsante diventa verde con bordo giallo
5. Si fa ruotare la manopola tenendola premuta
6. Le impostazioni sono subito attive

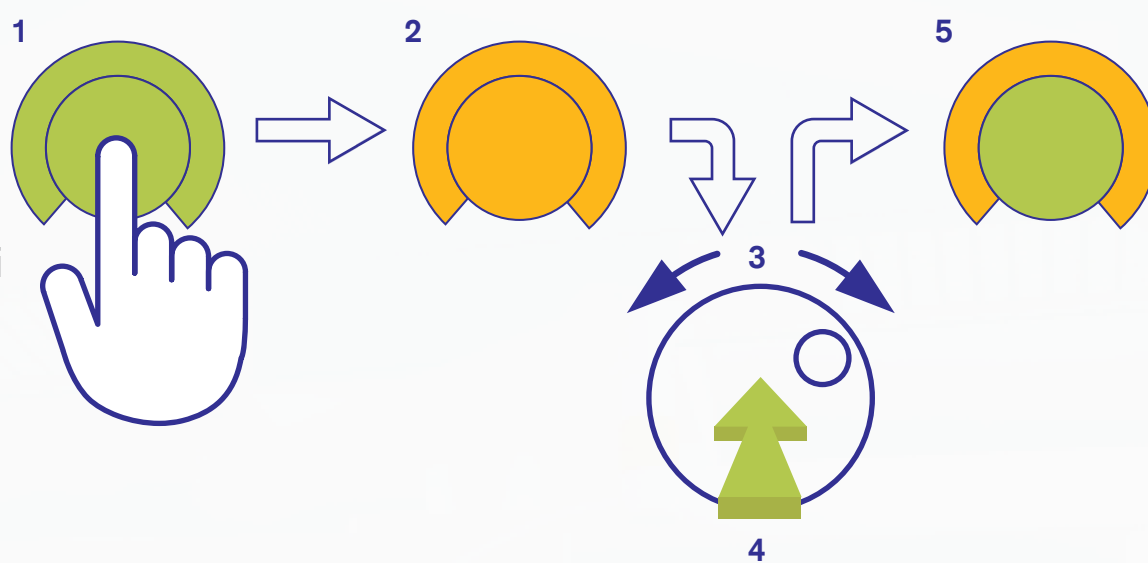


Perché è importante?

In alcune tecniche di reclutamento è importante poter regolare i parametri in tempo reale, su base continua, senza perdere tempo a confermare e/o attendere che il parametro si modifichi.

Perché è utile per migliorare gli outcome?

QuickSet è utile per eseguire diverse manovre di reclutamento, per esempio seguendo la Lim et. al. con PEEP incrementale, lasciando invariato il livello di pressione inspiratoria¹

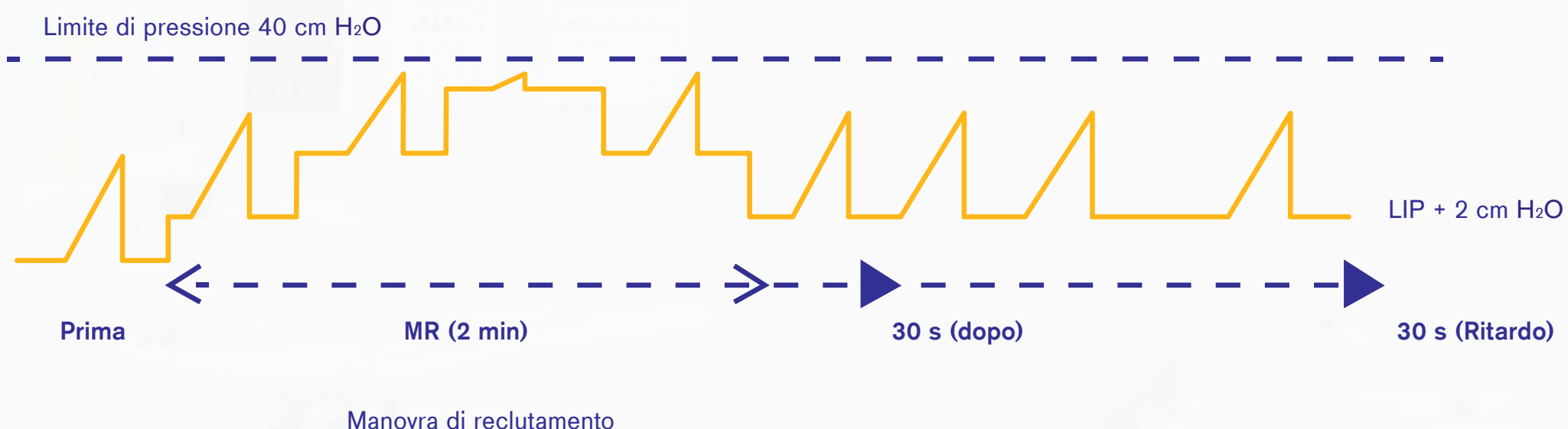

1. Lim et al., Morphometric Effects of the Recruitment Maneuver on Saline-lavaged Canine Lungs: A Computed Tomographic Analysis.