

# JESTE LI ZNALI?




## QuickSet

### O čemu se radi?

Uz QuickSet moguće je promijeniti parametar s trenutnim učinkom i bez potrebe za potvrđivanjem. QuickSet omogućuje podešavanje parametra u stvarnom vremenu uz nadzor na zaslonu ventilatora.

### Kako ga koristiti?

1. Odaberite parametar.
2. Gumb počinje svijetliti žuto.
3. Pritisnite rotirajući gumb na 1,5 sekundu.
4. Gumb svijetli zeleno sa žutim rubom.
5. Istodobno držite rotirajući gumb pritisnutim i okrećite ga.
6. Postavke odmah stupaju na snagu.

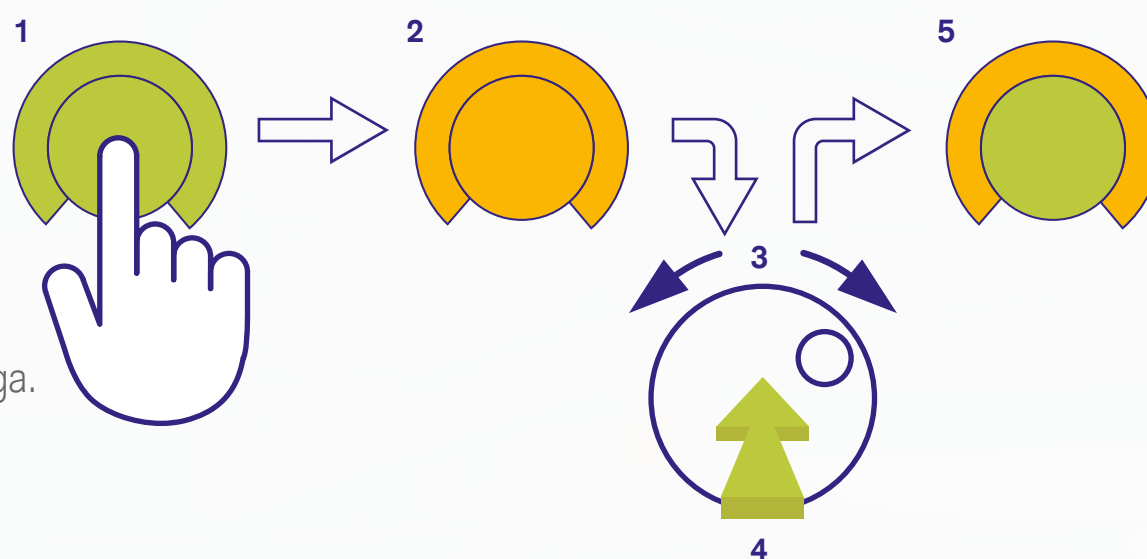


### Zašto je to važno?

U pojedinim tehnikama raspuhivanja važno je imati mogućnost neprekidnog podešavanja parametara u stvarnom vremenu bez gubljenja vremena na potvrđivanje i/ili čekanje na promjenu parametra.

### Zašto je važno poboljšati ishode?

QuickSet je koristan za provođenje manevara raspuhivanja pluća, npr. na način Lim et. al. Incremental PEEP, ostavljajući inspiracijski tlak na istoj razini<sup>1</sup>

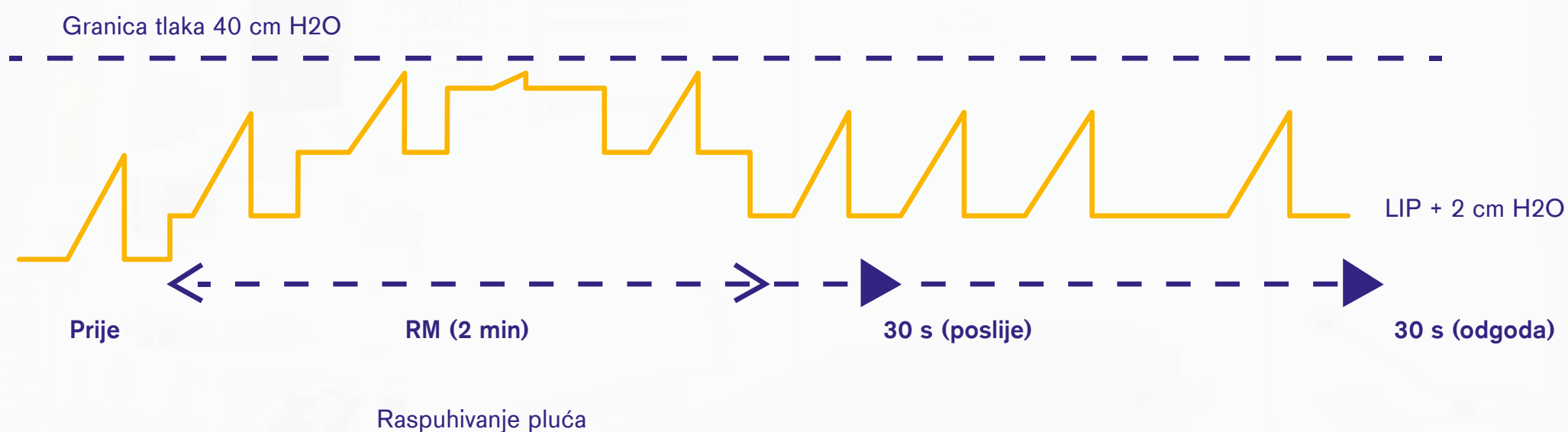

1. Lim et al., Morphometric Effects of the Recruitment Maneuver on Saline-lavaged Canine Lungs: A Computed Tomographic Analysis.