

Ventilador Dräger V300/V500

Guía rápida de funcionamiento básico y manejo

A MONTAJE DEL VENTILADOR



B PUESTA EN MARCHA Y CHEQUEO DEL VENTILADOR:

- 1 Encender el equipo.
- 2 Aparecerá en pantalla la pregunta: “¿Paciente nuevo?” Al admitir paciente nuevo, elimina paciente actual y sus datos. Elegir entre “Paciente actual”, “Nuevo Adulto” y “Nuevo Pediátrico”.

En esta pantalla principal pulsar la 2ª pestaña de la barra horizontal para elegir entre ventilación invasiva y ventilación no invasiva. Si elegimos NIV saldrá un rectángulo naranja en la parte superior.


- 3 Para realizar la comprobación del equipo elegir la 4ª pestaña horizontal “CHEQUEO SISTEMA” y elegir la 2ª pestaña vertical “CHEQUEAR DISPOSITIVO”. Confirmar con botón rotativo.

Seguir instrucciones y contestar con Sí o No. ¡El pulmón prueba debe estar conectado!

A la pregunta “¿Desea calibrar los sensores de suministro de gas interno (puede durar hasta 3 minutos)?” se debe contestar Sí. A partir de este paso, los restantes los realiza el respirador automáticamente sin tener que estar presente.




- 4** Si la comprobación se ha realizado con éxito aparecerán todos los puntos en verde pulsar 3ª pestaña lateral “CHEQUEAR CIRC. RESP.”

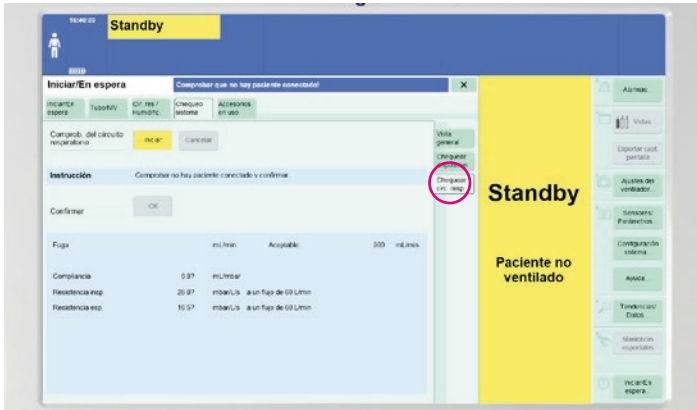

- 5** Pulsar “INICIAR” y confirmar con el mando rotatorio.
 Seguir las instrucciones:
 - Sellar el puerto de conexión del paciente y confirmar con OK. Esperar.
 - Abrir el puerto de conexión del paciente y confirmar con OK.

- 6** Una vez finalizada la comprobación, sale la información “COMPROBACIÓN CIRCUITO RESP. FINALIZADA”, pulsar 1ª pestaña superior “INICIAR/EN ESPERA”

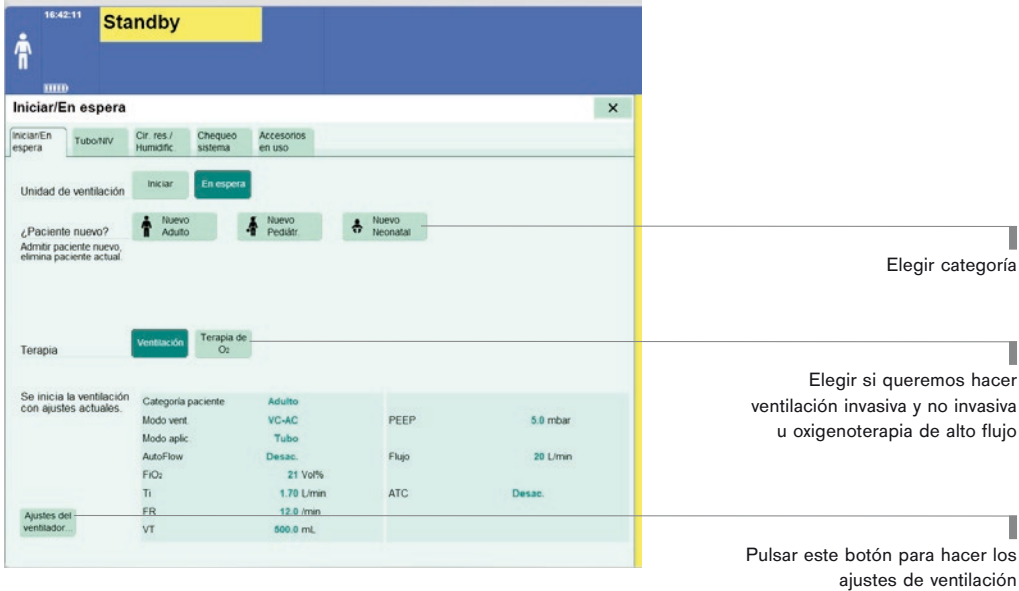

Una vez ajustados los parámetros de ventilación clicar “INICIAR”

C PANTALLA

La pantalla es táctil. Si queremos cambiar cualquier parámetro, con clicar sobre el parámetro o curva nos sale la opción de cambiar el contenido.

Lo mismo pasa con los límites de alarma.

The screenshot shows the Dräger VC-AC ventilator interface. It features three main graphs: Pressure (Paw) in mbar, Flow in Liters, and Volume in mL. On the right, key parameters are displayed: PIP (21), VMO (4.18), VTe (500), and FR (12). A bottom control bar includes a fan icon, a right-pointing arrow, and six circular buttons for PIP, VT, TI, FR, PEEP, and Pfujo. A right-side menu contains options like Alarmas, Datos, and Configuración sistema.

Información modo ventilación y algunos ajustes.
Al clicar en esta zona se extiende el panel de configuración de ajustes

Campos de parámetros

Información categoría paciente

Campos de curvas

Menú Botones de acceso

Campo donde para realizar los ajustes de ventilación. Al clicar en la flecha, se expande el panel para cambiar los modos de ventilación. Los ajustes rápidos se pueden hacer clicando sobre el parámetro (la rueda cambia a amarillo), ajustando con el botón rotativo y confirmando al final. Hasta que no se confirme con el botón, el cambio no se efectúa.

Señalización de alarmas:

- Roja - prioridad alta
- Amarilla - prioridad intermedia
- Turquesa - baja prioridad o informativa

NOTA: Esta guía rápida de uso no sustituye al manual de instrucciones facilitado por el fabricante.

SEDE PRINCIPAL
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Alemania
 www.draeger.com

ESPAÑA
 Dräger Medical Hispania S.A.
 C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
 Tel +34 90 011 64 24
 Fax +34 91 358 36 19
 atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
 Dräger Portugal, Lda.
 Rua Nossa Senhora da
 Conceição, n.º 3, R/c
 2790-111 Carnaxide
 Tel +351 21 155 45 86
 Fax +351 21 155 45 87
 clientesportugal@draeger.com