

Ventilador Dräger V300/V500

Guia rápido

A MONTAGEM DO VENTILADOR



B COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E TESTE DO VENTILADOR


- 1 Ligar o equipamento.
- 2 No ecrã aparecerá a pergunta **“Novo paciente?”** Selecionar entre **“Paciente actual”**, **“Novo Adulto”** e **“Novo Pediátrico”**. Ao admitir um novo paciente, elimina o paciente atual e os seus datos.

No ecrã principal selecionar a 2ª janela da barra horizontal para escolher entre ventilação invasiva e ventilação não invasiva. Se selecionamos NIV aparecerá um rectângulo laranja na parte superior.


- 3 Para realizar o teste do equipamento selecionar a 4ª janela **“VERIFICAÇÃO DO SISTEMA”** e selecionar a 2ª janela vertical **“TESTE DO VENTILADOR”**. Confirmar com o botão rotativo.

Seguir as instruções e responder com Sim ou Não. A ideia é ir fazendo tudo que o equipamento pede, de maneira a podermos ir respondendo Sim a todos os pontos. O pulmão de teste deve estar conectado!

À pergunta **“Deseja calibrar os sensores de fornecimento de gás interno (pode demorar até 3 minutos) pode responder Não** (Este passo do teste deverá ser efetuado a cada 3 meses). A partir deste passo, os restantes serão realizados automaticamente pelo ventilador sem ter de estar presente.

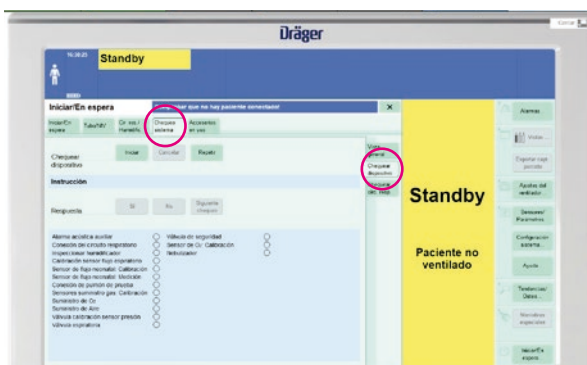


- 4** Se o teste for realizado com êxito todos os pontos aparecerão a verde. Em seguida selecionar a 3ª janela lateral “**VERIFICAÇÃO CIRC. RESP.**”

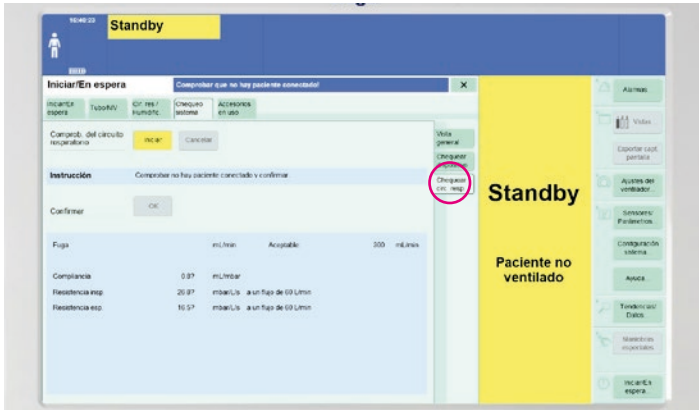

- 5** Premir “**INICIAR**” e confirmar com o botão rotativo.
 Seguir as instruções:
 – Quando solicitado pelo equipamento, manter a peça em Y tapada e confirmar com OK. Esperar.
 – Quando solicitado pelo equipamento, deixar a peça em Y ao ar e confirmar com OK.

- 6** Uma vez finalizado o teste aparece a informação “**COMPROVAÇÃO CIRCUITO RESP. FINALIZADA**”.
 Selecionar a 1ª janela superior “**INICÍO/STANDBY**”.

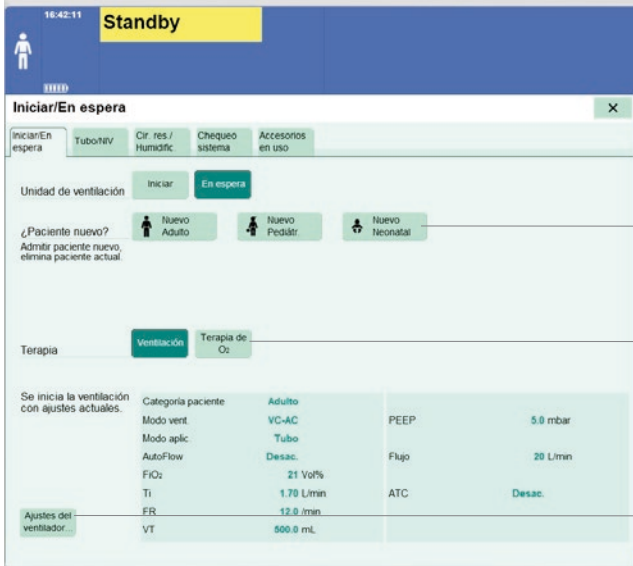

Selecionar categoria do paciente

Selecionar se queremos ventilação invasiva/não invasiva ou oxigenoterapia de alto fluxo

Premir neste botão para realizar os ajustes de ventilação

Uma vez ajustados os parâmetros ventilatórios premir “**INICIAR**” e confirmar com o botão rotativo.

C ECRÃ

O ecrã é tátil. Se quisermos alterar algum parâmetro ao premir sobre o parâmetro ou curva temos a opção de alterar o conteúdo. O mesmo acontece com os limites de alarme.

Informação do modo ventilatório. Premindo nesta área, estende-se o painel de ajuste da ventilação

Campo de parâmetros

Informação da categoria do paciente

Campo de curvas

Menu: Teclas de acesso

Campo onde são feitos os ajustes ventilatórios. Ao premir na seta expande-se o painel para mudar os modos ventilatórios. Os ajustes rápidos podem ser feitos premindo diretamente no parâmetro (que muda para amarelo), rodando com o botão rotativo e confirmando no final com o mesmo botão rotativo. A alteração não é feita até se confirmar com o botão rotativo.

Sinalização de alarmes:
■ Vermelho - prioridade elevada
■ Amarela - prioridade intermédia
■ Turquesa - baixa prioridade ou informativo

NOTA: Este guia rápido não substitui o manual de instruções fornecido pelo fabricante.

SEDE PRINCIPAL
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Alemanha
 www.draeger.com

ESPAÑA
 Dräger Medical Hispania S.A.
 C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
 Tel +34 90 011 64 24
 Fax +34 91 358 36 19
 atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
 Dräger Portugal, Lda.
 Rua Nossa Senhora da
 Conceição, n.º 3, R/c
 2790-111 Carnaxide
 Tel +351 21 155 45 86
 Fax +351 21 155 45 87
 clientesportugal@draeger.com