

Monitor Dräger Vista 120

Guía rápida de funcionamiento básico y manejo



TECLA TÁCTIL "MENÚ"

A CONFIGURACIÓN DEL MONITOR (ES MUY IMPORTANTE CONFIGURARLO PRIMERO)

1. CAMBIAR IDIOMA

Menú > Manten. Usuario > ABC > Lenguaje. (Apagar y encender para que lo coja).

2. QUITAR VOLUMEN A LAS TECLAS

Menú > Config. Sistema > Volumen teclas (o botón "Mute" en la barra de control).

3. ACTIVAR LA BARRA CONTROL DE ACCESOS DIRECTOS

Menú > Config. Pantalla > Barra control.

4. PONER 4 Ó 5 CANALES

Menú > Config. Pantalla > N° Ondas > 4 > elegir n° de ondas deseado (4 o 5 canales si desean "Presión Invasiva").

6. SELECCIONAR QUÉ PARÁMETROS VER

Menú > Config. Sistema > Mod. Interrup.: Pulsar HR, SpO2, NIBP, PR, y PI si deseado. Si queremos 5 parámetros tenemos que tener 5 canales.

7. Si quisiera cambiar el **ORDEN**, se selecciona una curva y la opción "Cambio".

8. COLORES

Menú > Manten. Usuario > ABC > Color. FC **verde**, SpO2 **azul** y NIBP **rojo**

9. ALARMAS

Ir a cualquier parámetro y ajustar config. alarmas: Alarmas encendidas en FC, SpO2 y NIBP sys y NIBP díast.

10. Ir a menú de **HR** y asegurarse que está en 5 elect (me da 2 canales de HR). Si sólo tengo 3 electrodos (me da 1 canal de HR), y puedo utilizar el canal que me sobra para pulsar otro parámetro en Mod. Interrup, por ejemplo, RR (Respiración por impedancia y ponerla en amarillo).

11. Ir a menú de **NIBP** y poner medición en Auto cada 15 minutos, por ejemplo.

12. DESHABILITAR ACCESOS DIRECTOS INNECESARIOS:

Menú > Manten. Usuario > ABC > Config. atajos: Dejar sólo: Admisión, pantalla estándar, Módulo Interrup., Puesta a zero IBP, Volumen latidos, Pantalla letra grande, en espera, modo nocturno. El resto quitarlos.

13. GUARDAR EL PERFIL:

Menú > Manten. Usuario > ABC > Config. Usuario: Dar un nombre (p.e REA). La primera vez sale un mensaje de "el archivo se ha guardado". Cuando voy a hacer modificaciones sobre el mismo perfil, que quiero volver a guardar, tengo que volver a teclear el mismo nombre, REA en nuestro caso, me dará un mensaje sobre la garantía, lo acepto y vuelvo a obtener el mensaje "el archivo se ha guardado".

B MANEJO DEL MONITOR



PARTES FÍSICAS

- **Derecha:** registradora y batería (4-5 horas).
Izquierda: Conexión de los accesorios.
- **Pantalla táctil**, con accesos directos en pantalla y teclas fijas (accesos directos repetidos), se puede manejar también usando sólo el mando rotatorio.
- **Alarmas:** Roja, Amarilla y Azul

MANEJO

- **Dar de alta** entre pacientes para recuperar la configuración estándar: Acceso directo de la pantalla de Admisión-Adulto-MP apagado.
¡Ojo! Si he añadido canales o parámetros, continúan en pantalla aunque dé de alta.
- **AÑADIR CANALES:** Menú-Config. Pantalla-Nº Ondas
- **AÑADIR PARÁMETROS:** Acceso directo de la pantalla de Módulo Interrup.-Clickarlo
- **ORDENAR SI ES NECESARIO:** clicar sobre una curva y seleccionar Cambio.
- Si quiero 2 ondas de ECG (seleccionar 5 electrodos en el menú de HR), si quiero 1 onda, seleccionar 3 electrodos)
- Es importante tener claro que lo que se visualiza en pantalla no tiene nada que ver con los accesorios que se conecten lateralmente. Se verá en pantalla lo seleccionado en el menú de Módulo Interrup. independientemente de que esté conectado el accesorio.
- El acceso al menú de alarmas se realiza desde cualquier parámetro.
- Se pueden acceder a diferentes tendencias, arritmias, eventos, etc.
- Recomendamos apagar la alarma de la temperatura.
- No hay cronómetro.
- Contraseña Usuario: **ABC**

LIMPIEZA

Los agentes de limpieza aprobados para la limpieza del monitor y de los accesorios reutilizables son:

- Detergente suave casi neutro
- Etanol (al 75%)
- Isopropanol (al 70%)

NOTA: Esta guía rápida de uso no sustituye al manual de instrucciones facilitado por el fabricante.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com