


Dräger Oxylog[®] 3000 / plus Guía rápida de funcionamiento básico y manejo

COLOCACIÓN DEL CIRCUITO RESPIRATORIO

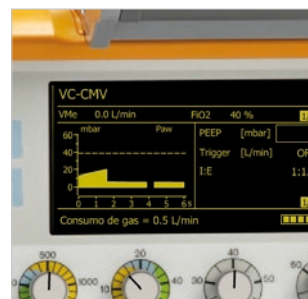

Encendido

Mantener pulsado botón de inicio y aparecerán en la pantalla las opciones.

A continuación seleccionamos tipo de tubuladura de paciente:


- Reutilizable [REUS]
- Desechable adulto [DISP]
- Desechable pediátrico [PAED]

Confirmamos con el mando giratorio.

Después de la confirmación se inicia la ventilación en el modo de ventilación VC-CMV, de forma estándar.

CAMBIO DE MODO VENTILATORIO


Para cambiar de modos ventilatorios, pulsamos el modo que deseamos, la luz parpadea y se confirma con el mando giratorio, posteriormente cambia el modo de ventilación.

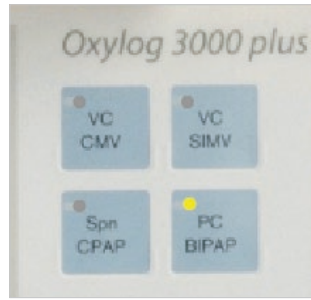

1 Seleccione el modo.



2 Confirme pulsando el mando giratorio.

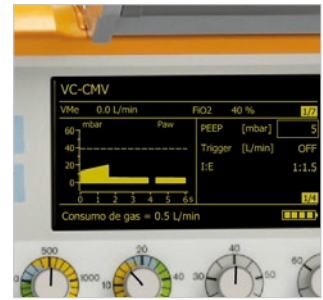


3 Modo cambiado.

PARÁMETROS



Para programar los parámetros de modos de ventilación como el VT, Frecuencia respiratoria FR, Pmax y FiO2, se realizan con los rotores para los ajustes de los modos seleccionados.

OTRAS OPCIONES

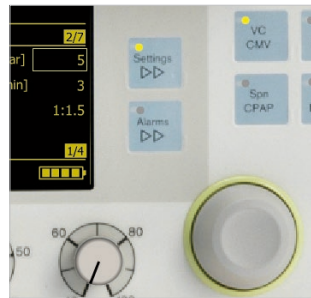

Pulsando el botón "SETTINGS" podemos cambiar/visual más opciones de ventilación como PEEP, Trigger, I:E, Tplat, AutoFlow, VNI, etc. Seleccione con el mando giratorio, cambie la información y confirme pulsando el propio botón.



Para apagar el equipo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y confirme pulsando el mando giratorio cuando aparezca en pantalla el mensaje de la imagen superior.



Para apagar el equipo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y confirme pulsando el mando giratorio cuando aparezca en pantalla el mensaje de la imagen superior.

NOTA: Esta guía rápida de uso no sustituye al manual de instrucciones facilitado por el fabricante.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com