

## Dräger Primus<sup>®</sup> / Primus<sup>®</sup> IE Guía rápida de funcionamiento básico y manejo

**1** Conectar mangueras O2, Air, N2O, AGS y electricidad, en la trasera del equipo.


### **2** ACCESORIOS

(Los sensores de flujo se encuentran en el interior del sistema de paciente)

- Circuito paciente de doble rama con pieza en Y + Filtro (Ocluir para el chequeo)
- Ramal intermedio con bolsa reservorio
- Línea de muestreo
- Trampa de agua
- Bote de Cal



**3** Arrancar el Primus en el Botón delantero (ON / OFF)

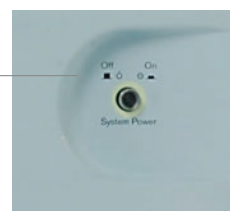


**4** Realizar el **chequeo**




Ocluir Pieza en Y



Válvula APL en 30 mb

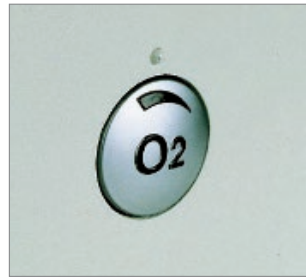

O2 emergencia cerrado

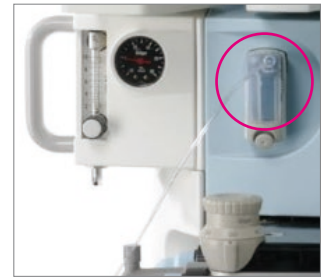


Trampa de agua y línea de muestreo

Aceptamos con el manto rotatorio. Es automático y dura unos 7 minutos.


**5** En la pantalla de **Standby: Seleccionar % O2, FGF, edad, peso ideal y modo ventilatorio.**

Confirmar cada selección con el manto rotatorio.

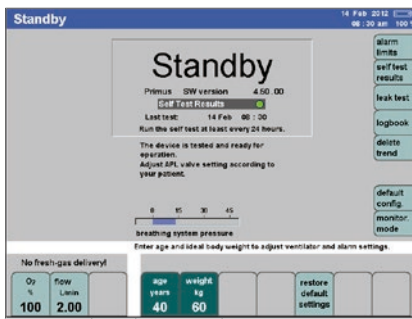

% O2 y FGF

Edad y peso del paciente

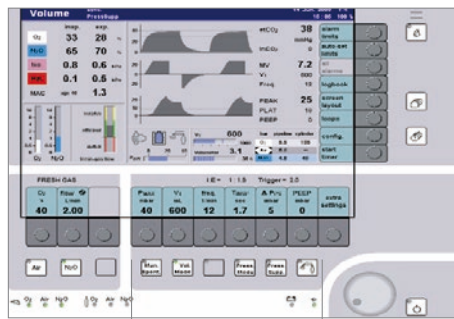

Modo Ventilatorio

**6 AJUSTE DE PARÁMETROS SEGÚN MODO VENTILATORIO ELEGIDO Y MONITORIZAR LA VM**

The image shows the control panel of a Dräger Primus ventilator. The screen displays several data points and graphs. At the top, it shows 'Volume AF' with a date of '23 Nov. 2008' and time '18:09'. The main display area is divided into several sections:

- Gas Monitoring:** A table showing O<sub>2</sub> (70%), N<sub>2</sub>O (26%), Sev. (2.4), Des. (2.2), MAC (1.8), and MAC (1.6).
- Waveforms:** Three graphs showing etCO<sub>2</sub>, inCO<sub>2</sub>, and MV (Minute Volume) over time.
- Parameters:** A list of values including V<sub>r</sub> (600), P<sub>EA</sub> (3.1), P<sub>IP</sub> (5.2), P<sub>EEP</sub> (4.8), and P<sub>EEP</sub> (4.8).
- FRESH GAS:** A section with O<sub>2</sub> (70%), flow (1.00), P<sub>max</sub> (40), V<sub>r</sub> (600), freq. (12), T<sub>exp</sub> (1.7), Δ P<sub>ps</sub> (9), and P<sub>EEP</sub> (5).
- Buttons:** A row of buttons for 'Air', 'N<sub>2</sub>O', 'Man. Sport.', 'Vent. Mode.', 'Pres. Mode.', and 'Pres. Supp.'.

Annotations on the right side of the image point to specific features:

- Silencio Alarmas (Rojo/Amarillo/Azul):** Points to a yellow alarm icon in the top right corner.
- Monitorización de gases y curvas y valores medidos:** Points to the central display area containing the waveforms and data tables.
- Ajuste de O<sub>2</sub>, FGF, Modo de Ventilación y parámetros:** Points to the 'FRESH GAS' section and the 'Vent. Mode.' button.
- Botón Standby:** Points to a circular power button at the bottom right of the panel.

Below the panel, a text box states: "Utilizar el mando giratorio para confirmar todos los cambios." (Use the rotary knob to confirm all changes.)

**NOTA:** Esta guía rápida de uso no sustituye al manual de instrucciones facilitado por el fabricante.

**SEDE PRINCIPAL**  
 Drägerwerk AG & Co. KGaA  
 Moislinger Allee 53-55  
 23558 Lübeck, Alemania  
 www.draeger.com

**ESPAÑA**  
 Dräger Medical Hispania S.A.  
 C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid  
 Tel +34 90 011 64 24  
 Fax +34 91 358 36 19  
 atencionalcliente@draeger.com

**PORTUGAL**  
 Dräger Portugal, Lda.  
 Rua Nossa Senhora da  
 Conceição, n.º 3, R/c  
 2790-111 Carnaxide  
 Tel +351 21 155 45 86  
 Fax +351 21 155 45 87  
 clientesportugal@draeger.com