


Dräger Perseus® A500 Guia rápido

1 Ligar as mangueiras de O2, Ar, N2O e AGS e o cabo da electricidade, que se encontram na parte traseira do equipamento.

2 ACESSÓRIOS

(Os sensores de fluxo encontram-se no interior da cassete do paciente)

- Circuito do paciente de dupla traqueia com peça em Y + Filtro (Ocluir para o teste)
- Traqueia intermédia com balão de respiração manual
- Linha de amostra
- Copo de condensados
- Canister de Cal

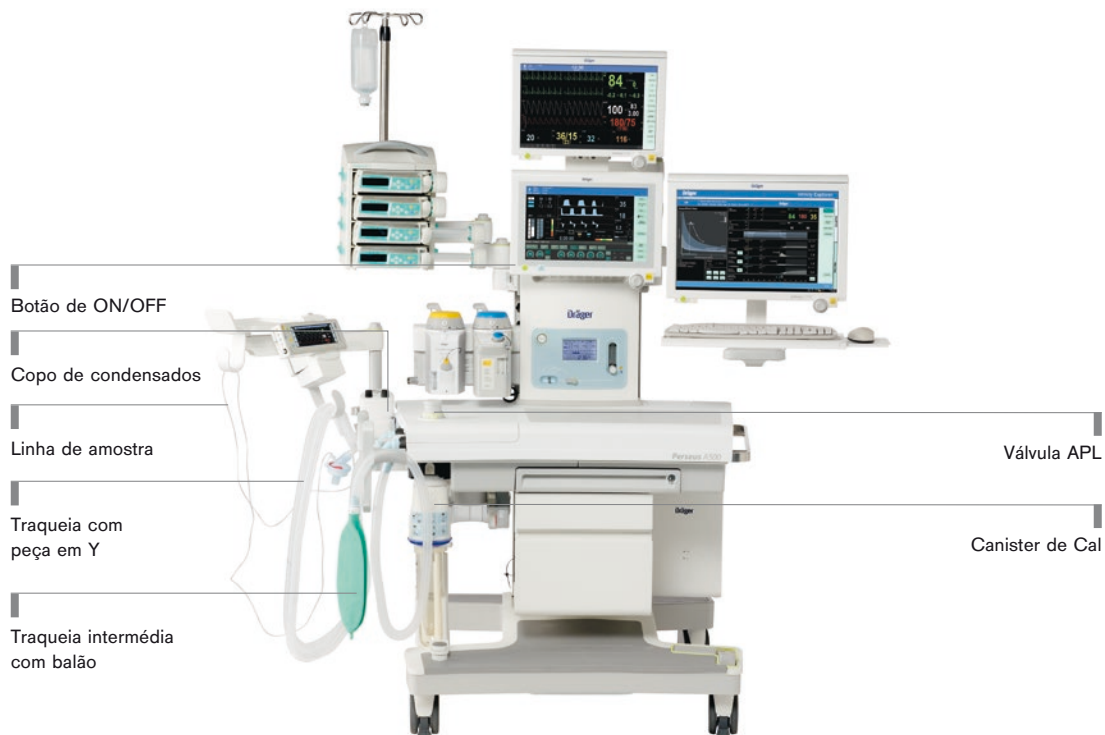

3 Ligar o Perseus no botão dianteiro Verde (ON / OFF)



4 ECRÃ

Ecrã tátil

Quando se prime, abre funções ou janelas de diálogo.

Botão ON/OFF

Liga e desliga o equipamento

Tecla Luz

Acende e apaga a luz de trabalho. Aumenta a luminosidade em 3 passos (suave, média e forte)

Botão rotativo

Utilizado para selecionar, ajustar e confirmar ajustes. Em determinadas situações ilumina-se com cor.

Tecla para silenciar os alarmes

Silencia todos os alarmes ativos durante 2 minutos.



5 UNIDADE DE MISTURA DE GÁS (CONTROLADA ELETRONICAMENTE)

Informação sobre a alimentação da rede elétrica e estado da bateria.

Informações do fornecimento de gases (O₂, Ar e N₂O) da rampa e das garrafas de gás se aplicável.

Flush de O₂ (lavagem de O₂)


Visualização da pressão do sistema interno do paciente

Debitómetro de O₂ (fluxo para insuflação de O₂)

Saída de O₂, por ex. para óculos nasais ou máscara facial


Válvula de O₂ para alternar entre:

- **Aux O₂**: Posição normal de trabalho e teste. O₂ adicional para óculos nasais depois de abrir o debitómetro
- **Add O₂**: Posição para **ventilação manual de emergência** mesmo com a máquina **DESLIGADA**. Fornece O₂ através da saída interna com a possibilidade de administrar gás halogenado.

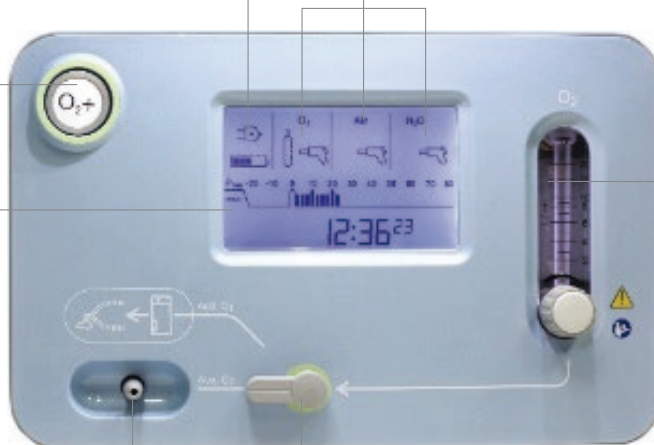


6 LIGAR O PERSEUS A500 PREMINDO O BOTÃO VERDE FRONTAL (ON / OFF)

7 TESTE DO EQUIPAMENTO

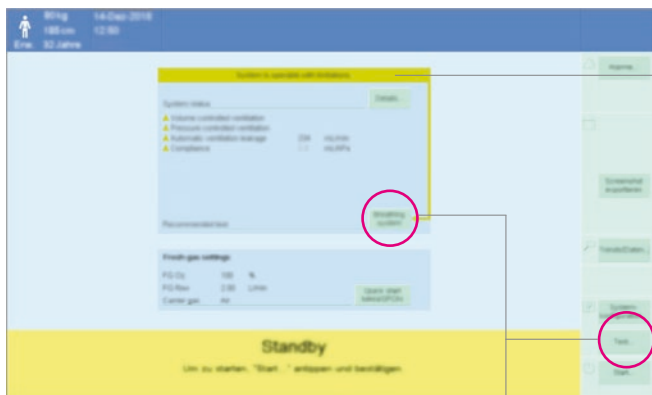

Teclas


Cor	Significado
Verde	O sistema está totalmente operacional. O teste do equipamento foi realizado nas últimas 24 horas.
Amarelo	O sistema está operacional com limitações. Existem limitações funcionais, por exemplo, sem N2O, etc. Ver no ecrã e se necessário tomar medidas adicionais para garantir a segurança do paciente
Vermelho	O sistema não está operacional. Contacte o serviço técnico se necessário.

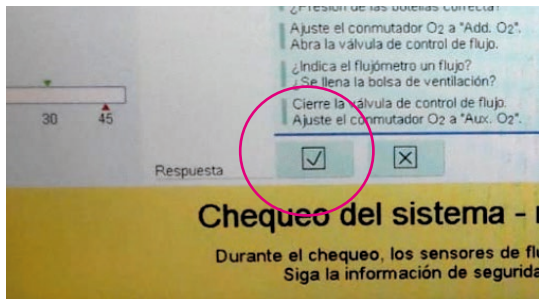


Seguir os passos indicados no ecrã

- Ocluir a peça em Y com filtro
- Válvula APL a 30 mbar
- Válvula do painel central para baixo (Aux O2)
- Conectar a linha de amostra ao filtro e ao copo de condensados
- Premir no ecrã
- O teste é automático e dura cerca de 7 minutos

8 NO ECRÃ DE STANDBY/EM ESPERA

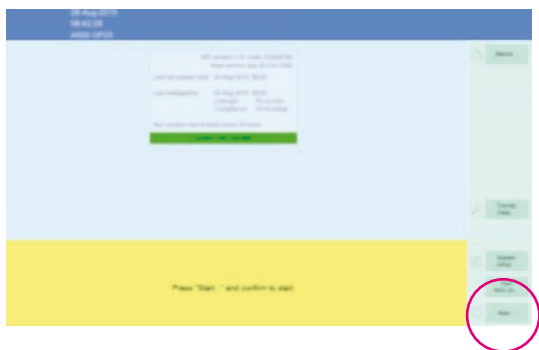


Selecionar a **Tecla INICIAR**. Utilizar o botão rotativo para modificar e confirmar todas as alterações.

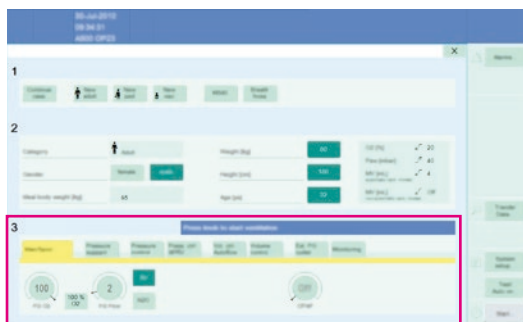

Seleciona-se o **Modo Ventilatório** e parâmetros associados

9 AJUSTE DOS PARÂMETROS SEGUNDO O MODO VENTILATÓRIO ESCOLHIDO E MONITORIZAÇÃO DO VOLUME MINUTO

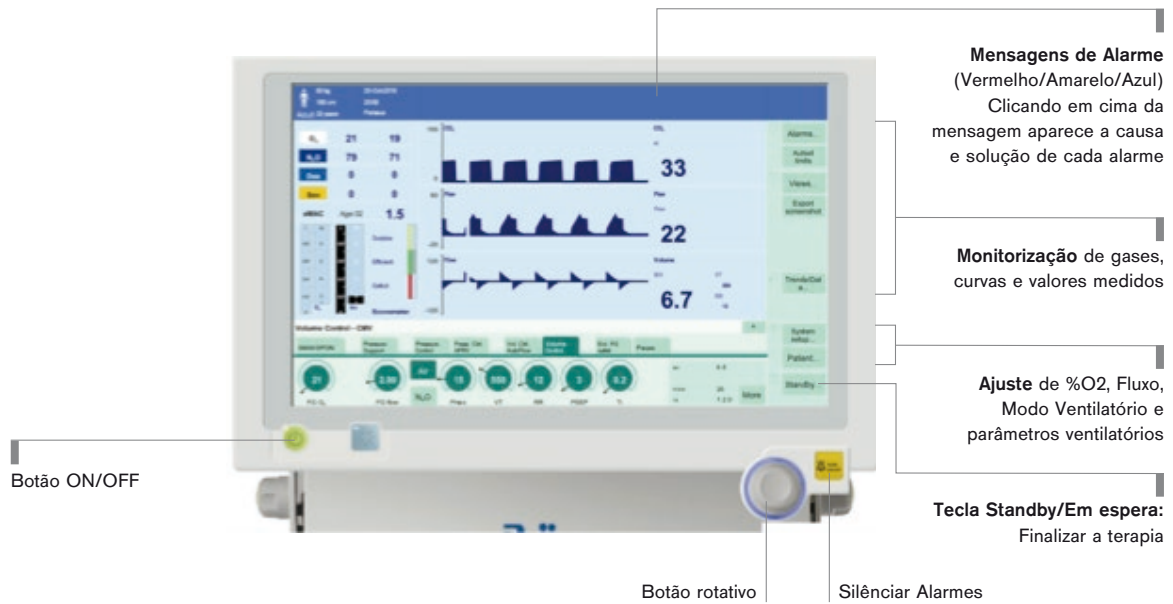

NOTA: Este guia rápido não substitui o manual de instruções fornecido pelo fabricante.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com