

Dräger Savina® 300

Guía rápida de funcionamiento básico y manejo

A PREPARACIÓN DEL EQUIPO



1. Insertar válvula espiratoria
2. Insertar sensor de flujo
3. Instalar circuito respiratorio en ambas ramas
4. Instalar cubeta de CO2 (opcional)
5. Instalar humidificador (opcional)
6. Conectar a la red eléctrica
7. Conectar mangueras de gases

B CHEQUEO DEL SISTEMA Y DEL CIRCUITO



- PASO 1**
1. Pulsar **Inicio/En espera**.
 2. Pulsar **Chequeo del Sistema**.



- PASO 2**
1. Pulsar **"Iniciar"**.
 2. Confirmar con **botón rotatorio**.



- PASO 3**
1. Responder a las preguntas mostradas en el campo de información con **SÍ/NO**.
 2. Pulsar **Chequeo del Sistema**.




- PASO 4**
1. Todos los puntos tienen que quedar **en verde**.
 2. Una vez finalizado el Chequeo, pulsar **Chequeo del Circuito**.



- PASO 5**
1. Pulsar **"Iniciar"**
 2. Confirmar con el **botón rotatorio**
 3. Cuando lo pida el equipo, **mantener la pieza en Y sellada**
 4. Cuando lo pida el equipo, **dejar la pieza en Y al aire**

¡El Chequeo del Circuito ha finalizado!

C PARTES DEL EQUIPO

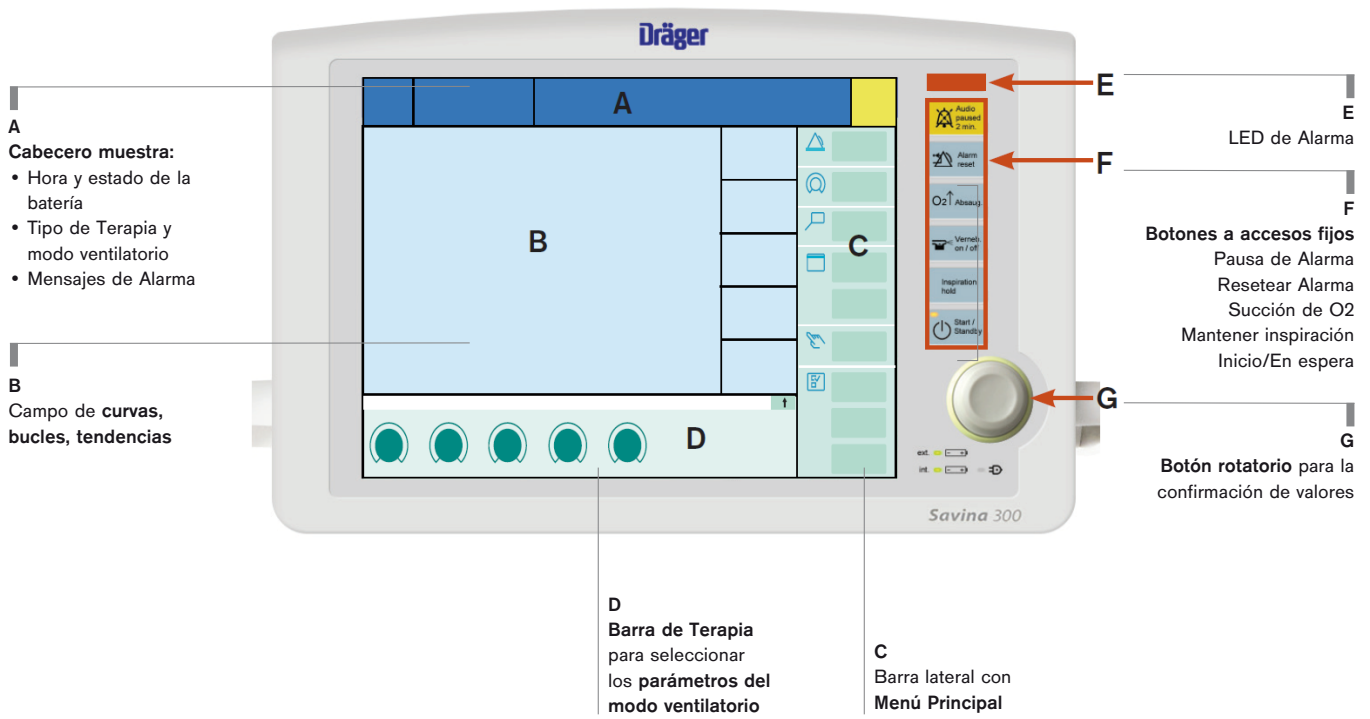

NOTA: Esta guía rápida de uso no sustituye al manual de instrucciones facilitado por el fabricante.

SEDE PRINCIPAL
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ESPAÑA
 Dräger Medical Hispania S.A.
 C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
 Tel +34 90 011 64 24
 Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
 Dräger Portugal, Lda.
 Rua Nossa Senhora da
 Conceição, n.º 3, R/c
 2790-111 Carnaxide
 Tel +351 21 155 45 86
 Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com